

Visit-Dokumentation





Alles, was Sie über Visit wissen müssen.



Sender

Tür-Sender	5
Druckknopf-Sender	11
Telefon-Sender	15
Babyruf-Sender	21
Rauchmelde-Sender	25

Empfänger

Tischblitzlampe	29
Tragbarer Empfänger	33
Pager-Empfänger	37
Armband-Empfänger	41
Alarm-Clock-Empfänger	45

Zubehör

Pager-Ladegerät	49
Mobile Phone Sensor	51
Vibrationskissen	53
Wandhalterung für Tischblitzlampe	54
Magnetschalter	55
Alarmtrittmatte	55
Externes Mikrofon	56
Kabel für externen Trigger	56

Systemübersicht

Zuverlässig und flexibel


Das Visit-Home-System ist äußerst flexibel und kann ganz einfach konfiguriert werden, um es individuell an das Zuhause und den Lebensstil des Kunden anzupassen.

Es bietet Türklingel- und Telefonerkennung sowie Überwachungsfunktionen als Babyruf-Sender und Brandschutz als Rauchmelde-Sender gemäß den höchsten Standards.



1 Tür-Sender

Überwacht die Türklingel

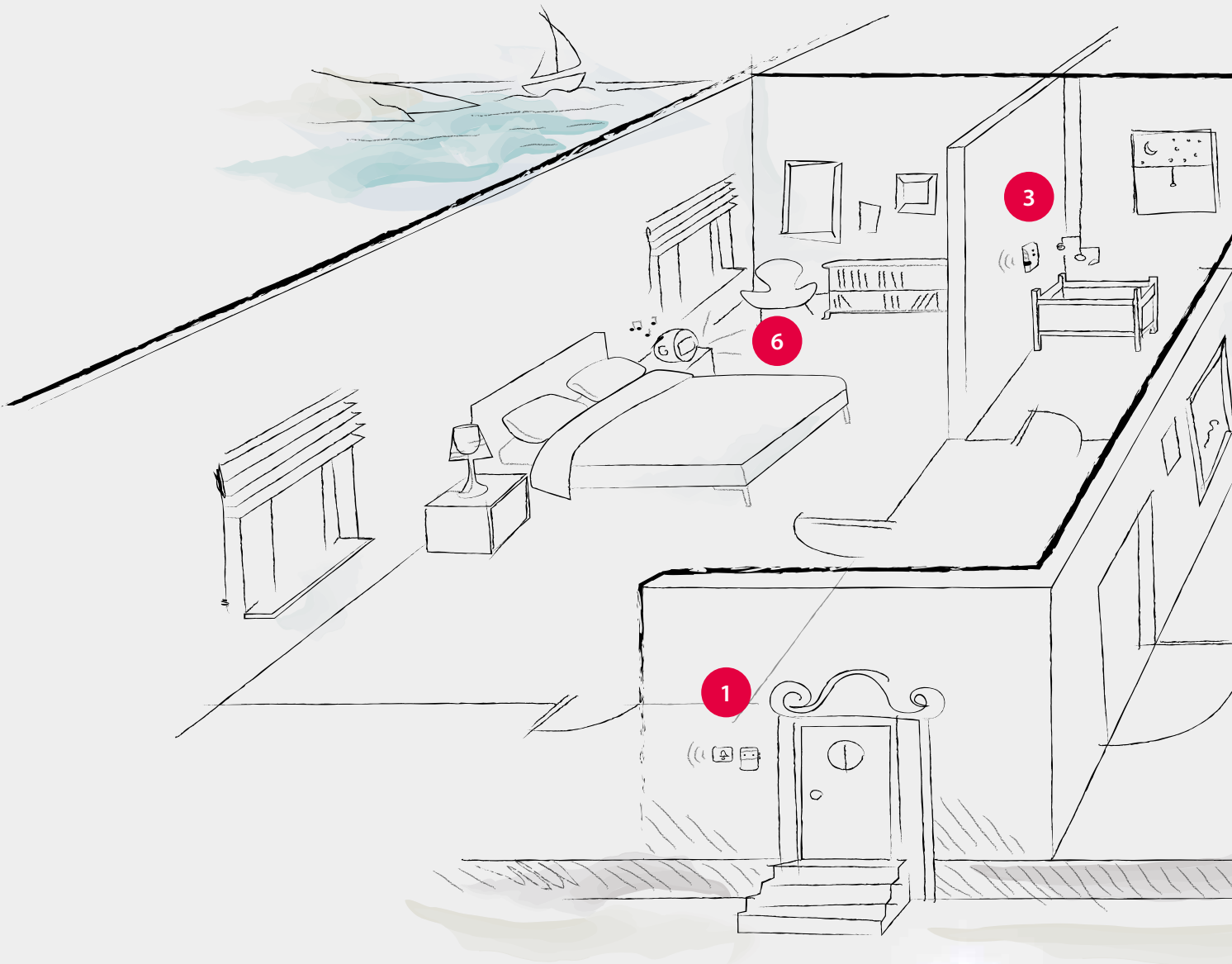

QR CODE

Einfacher Zugang zu Hilfen und Informationen

Mit dem Produkt-QR-Code haben Sie mit Ihrem Mobiltelefon oder Tablet Onlinezugang zu detaillierten Produktinformationen, Abbildungen und Installationsvideos.



5 Tischblitzlampe

Benachrichtigt Sie mit hellen Lichtsignalen




2 Rauchmelde-Sender
Erkennt Rauch und Feuer



3 Babyruf-Sender
Überwacht Ihr Kind



4 Telefon-Sender
Überwacht Telefone und Tablets

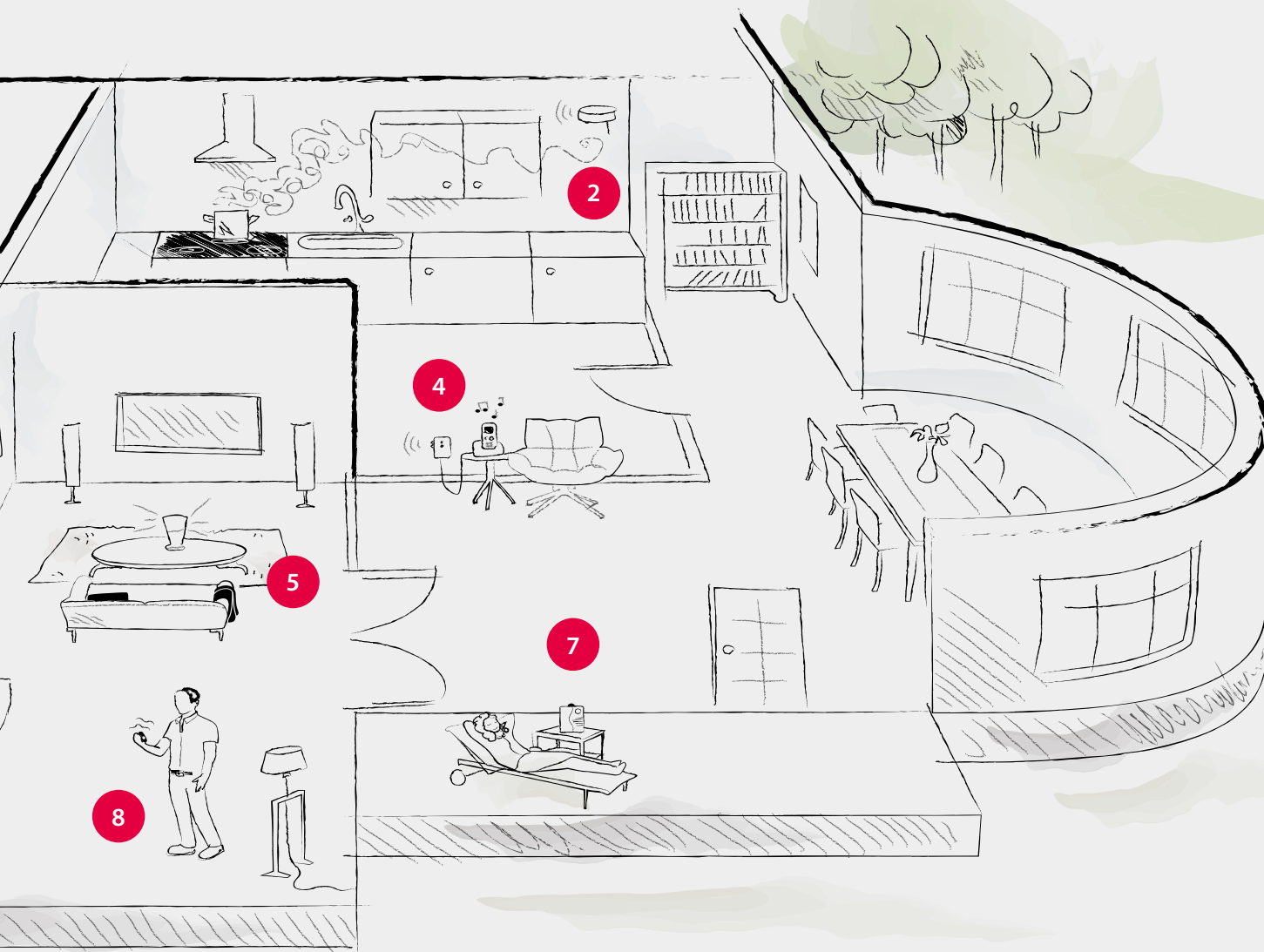

6 Alarm Clock
Verwendet Ton-, Licht- und Vibrationssignale




7 Tragbarer Empfänger
Benachrichtigt Sie mit Licht- und Tonsignalen



8 Pager-Empfänger
Benachrichtigt Sie mit Vibrationssignalen

Visit Tür-Sender

Tasten und Anschlüsse

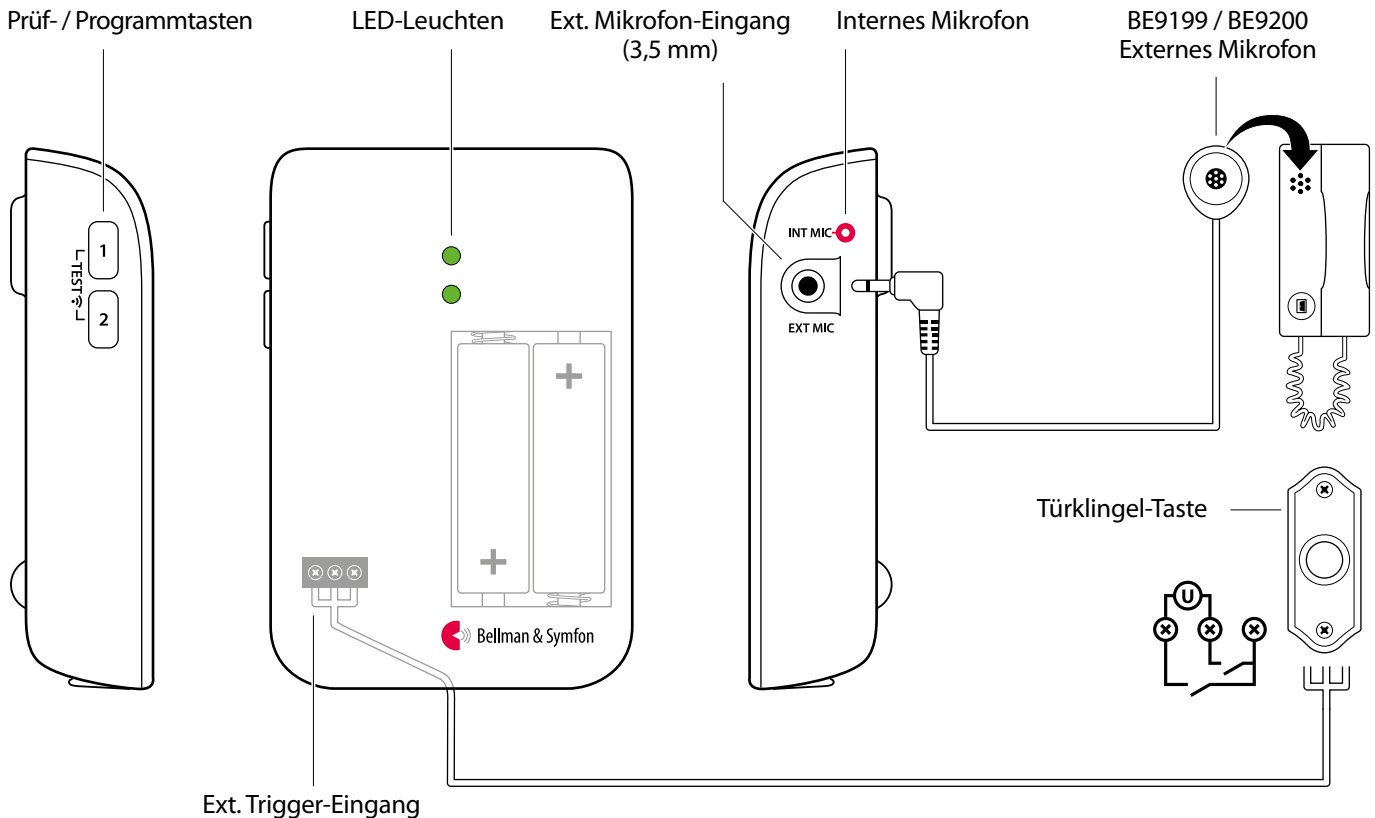

Technische Spezifikationen

Lieferumfang

- Visit Tür-Sender BE1411
- 2 x Alkaline-Batterien (1,5 V; AA)
- Klettverschluss für Wandbefestigung
- Schraube und Wanddübel

Strom und Batterie

- Batteriestrom:
2 x Lithium- oder Alkaline-Batterien (1,5 V; AA)
- Stromverbrauch
Aktiv < 70 mA
Ruhezustand < 15 µA
- Betriebsdauer
Alkaline-Batterie ca. 5 Jahre
Lithium-Batterien ca. 10 Jahre

Abmessungen und Gewicht

- Höhe: 100 mm, 4,0 Zoll
- Breite: 65 mm, 2,6 Zoll
- Tiefe: 27 mm, 1,1 Zoll
- Gewicht: 120 g, 4,2 oz (inkl. Batterien)

Aktivierung

- Prüftasten und intern. Mik.
- Elektromagnetischer Detektor
- Externes Mikrofon
- Vorhandene, an externen Trigger-Eingang angeschlossene Türklingel

Eingänge

- Externer Trigger-Eingang (3,5 mm)
- Eingang für externen Trigger

Umgebung

- Nur für den Innengebrauch
Betriebstemperatur:
15 °C bis 35 °C (59 °F bis 95 °F)
- Relative Luftfeuchtigkeit:
5 % bis 95 % (nicht kondensierend)

Frequenz und Reichweite

- Frequenz: 314,91 MHz, 433,92 MHz oder 868,30 MHz, abhängig von der Region
- Reichweite: 50 - 250 m (55 - 273 yd), abhängig von Funkfrequenz und Gebäudeeigenschaften


Zubehör

Folgendes Zubehör ist erhältlich:

- Externes Mikrofon BE9199 (2,5 m)
- Externes Mikrofon BE9200 (0,75 m)


Installation – Einzelschallquelle

- 1 Ziehen Sie die Batterielasche heraus, um das Gerät zu starten.
Reinigen Sie die Wand mit einem feuchten Tuch und ziehen Sie die Schutzfolie vom Klettband ab.
- 2 Bringen Sie den Sender links von der Türklingel und so nah wie möglich an der Schallquelle des Klingeltons an.
Sie können dazu auch den beiliegenden Dübel und die Schraube verwenden.

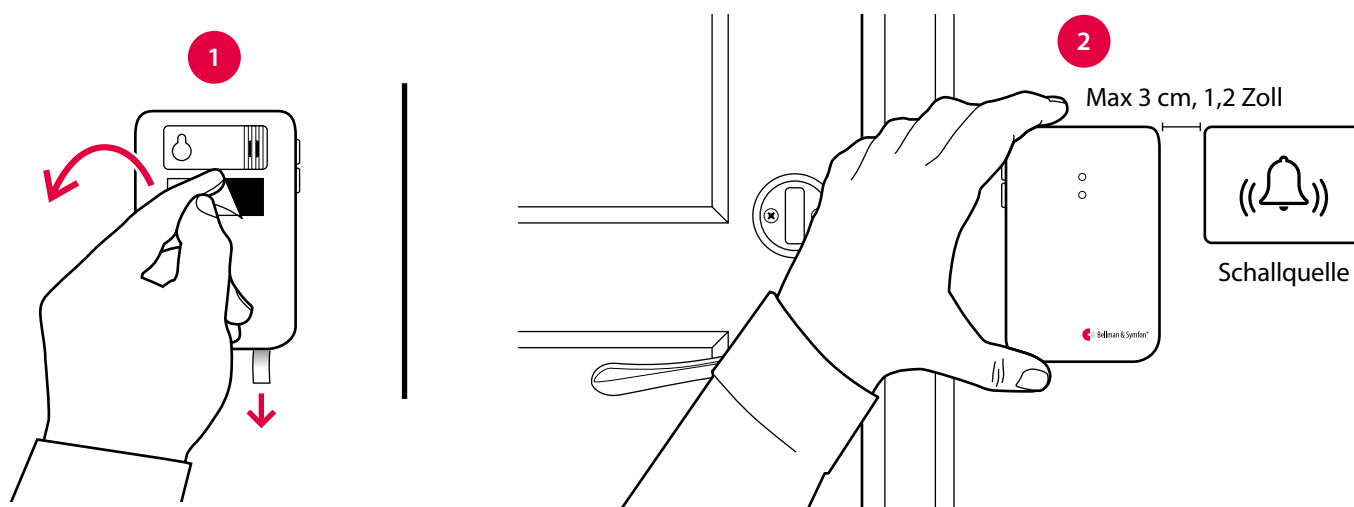

Installation – Gegensprechanlage mit elektronischer Türklingel

- 1 Ziehen Sie die Schutzfolie vom (separat erhältlichen) externen Mikrofon ab und bringen Sie es an dem Lautsprecher der Gegensprechanlage an. Schließen Sie das externe Mikrofon am externen Mikrofon-Eingang des Tür-Senders an.
- 2 Ziehen Sie die Batterielasche heraus, um das Gerät zu starten.
Reinigen Sie die Wand mit einem feuchten Tuch und ziehen Sie die Schutzfolie vom Klettband ab.
- 3 Bringen Sie den Sender links von der Türklingel und so nah wie möglich an der Schallquelle des Klingeltons an.
Sie können dazu auch den beiliegenden Dübel und die Schraube verwenden.

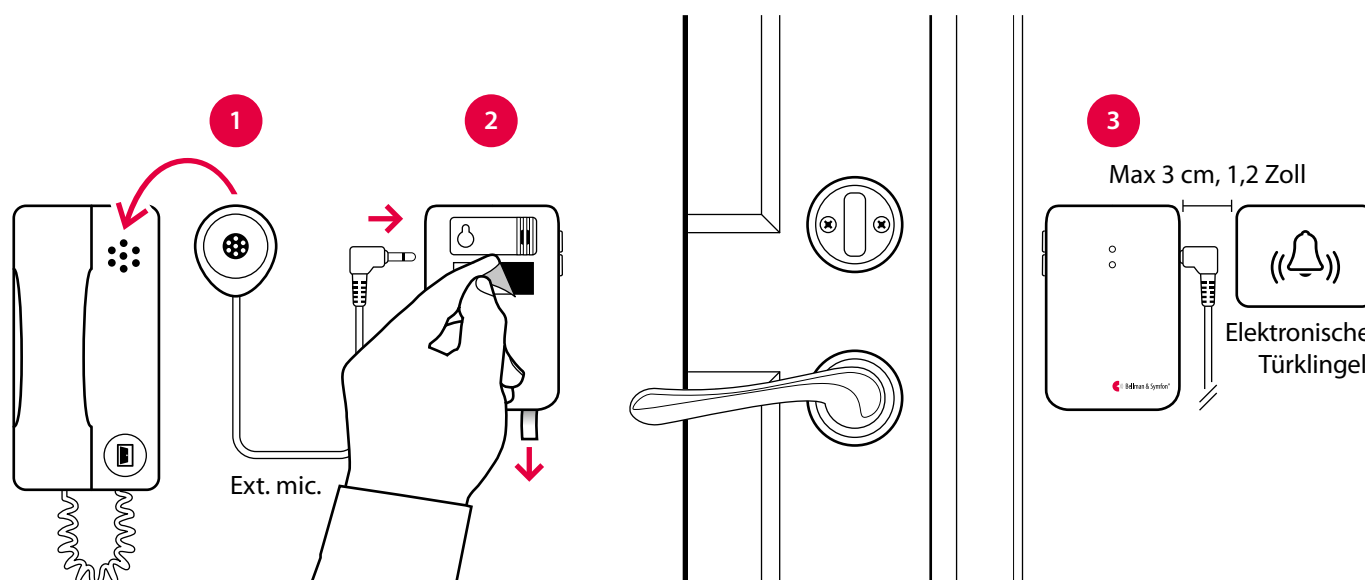


Visit Tür-Sender

Installation – Gegensprechanlage mit mechanischer Türklingel

Wenn Sie eine Gegensprechanlage mit mechanischer Türklingel verwenden, benötigen Sie ggf. zwei Tür-Sender, d. h. einen für jede Schallquelle.

- 1 Ziehen Sie an der Batterielasche, um den jeweiligen Tür-Sender zu starten.
Reinigen Sie die Wandoberfläche mit einem feuchten Tuch und ziehen Sie die Schutzfolie vom Klettband ab.
- 2 Montieren Sie den einen Sender links von der Türklingel und den anderen links von dem Lautsprecher der Gegensprechanlage, so nah wie möglich an den Schallquellen.

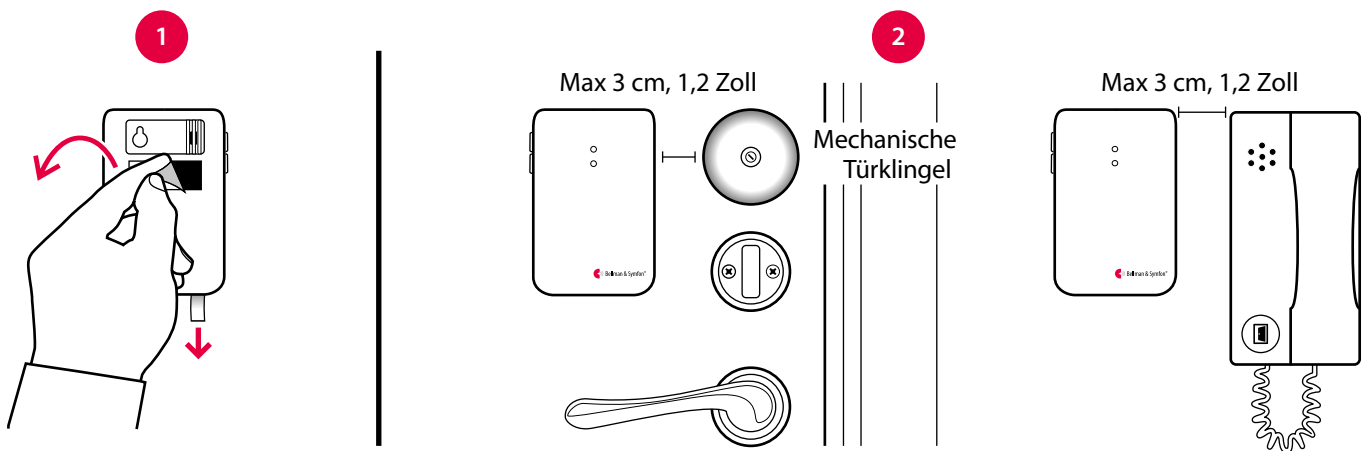

Prüfen der Verbindung

Mit der Prüftaste


- 1 Drücken Sie am Tür-Sender gleichzeitig beide Prüftasten. Die obere LED leuchtet grün auf und zeigt damit an, dass ein Funksignal übertragen wird.
- 2 Die grüne Visit-LED am Empfänger leuchtet auf und zeigt damit an, dass das Signal empfangen wurde. Zusätzlich sendet der Empfänger Blitzlicht- oder Vibrationssignale aus. Dies ist abhängig vom Empfängermodell.

Hinweis: Wenn Sie das Signalmuster geändert haben, reagiert das Gerät gemäß den Angaben in folgender Tabelle.

Verwendung der Türklingel oder der Gegensprechanlage

- 1 Drücken Sie die Taste der Türklingel oder Gegensprechanlage. Die LED des Senders leuchtet grün auf und zeigt damit an, dass das Tonsignal erkannt wird.
- 2 Die grüne Visit-LED am Empfänger leuchtet auf und zeigt damit an, dass das Funksignal empfangen wurde. Zusätzlich sendet der Empfänger Blitzlicht- oder Vibrationssignale aus. Dies ist abhängig vom Empfängermodell.

Hinweis: Wenn Sie das Signalmuster geändert haben, reagiert das Gerät gemäß den Angaben in der Tabelle auf Seite 9.

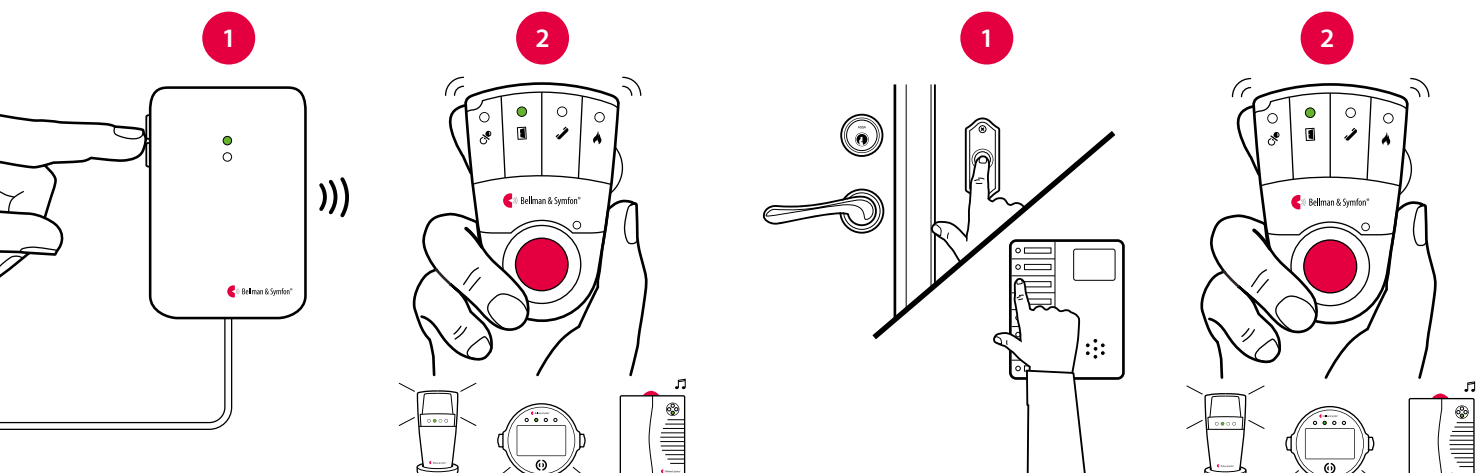


Programmierung des Senders

Der Tür-Sender ist von Anfang an darauf programmiert, den Großteil aller Türklingeln und Gegensprechanlagen zu erkennen. Falls die Signalstärke oder der Signalton der Türklingel erheblich abweicht, muss der Tür-Sender ggf. erst noch lernen, den Ton Ihrer Türklingel zu erkennen.

So programmieren Sie den Sender:

- 1** Halten Sie die Taste 1 solange gedrückt, bis die obere LED zu blinken beginnt. Lassen Sie die Taste los, um die Aufnahme zu starten.
- 2** Lassen Sie die Türklingel mindestens fünf Mal läuten. Warten Sie zwischen jedem Läuten ein bis zwei Sekunden. Die Aufnahme dauert fünf Minuten und endet automatisch. Sie können die Aufnahme auch manuell durch Drücken der Taste 1 beenden.
- 3** Bei Beendigung der Aufnahme leuchtet die LED grün auf und zeigt damit an, dass die Aufnahme erfolgreich war. Falls die LED orange leuchtet, siehe Fehlersuche.
- 4** Läuten Sie an der Türklingel. Die obere LED des Senders leuchtet grün auf und bestätigt damit, dass das Tonsignal erkannt wird. Sie können den Ton der Gegensprechanlage aufnehmen. Dazu wiederholen Sie die oben erklärten Schritte mit Taste 2.

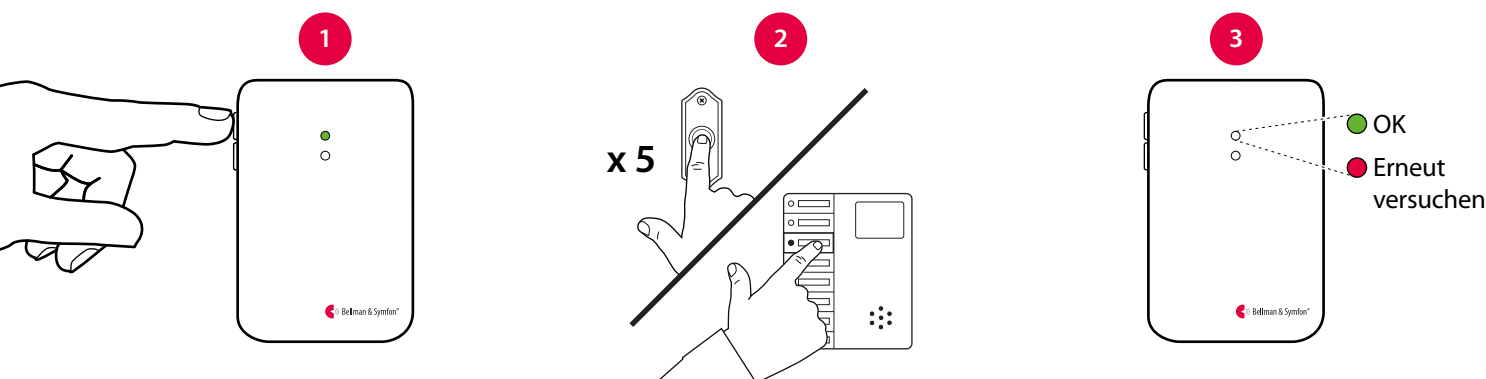

Löschen aufgenommener Töne

Halten Sie die Tasten 1 und 2 gleichzeitig für fünf Sekunden gedrückt, um alle aufgenommenen Töne zu löschen.

Hinweis: Die aufgenommenen Töne werden gelöscht und der Sender kehrt zu den Werkseinstellungen zurück, die Funkfrequenz- und Signal-Einstellungen bleiben jedoch unverändert.

Verwendung der elektromagnetischen Erkennung

Der Sender kann darauf eingestellt werden, die von elektrischen Türklingeln erzeugten elektromagnetischen Felder zu erkennen. Die Vorgehensweise hierfür lautet wie folgt:

- Öffnen Sie die vordere Abdeckung und stellen Sie Signalschalter Nr. 4 auf die obere Position (= Ein), um die elektromagnetische Erkennung zu aktivieren. Zum Deaktivieren stellen Sie den Signalschalter wieder zurück auf die untere Position (= Aus).



Verwendung des Zubehörs


Verwendung eines externen Mikrofons

Das externe Mikrofon kann verwendet werden, wenn die externe Schallquelle zu weit vom internen Mikrofon entfernt ist oder wenn zum Beispiel getrennte Informationen von Türklingel und Gegensprechanlage gewünscht sind.

Anschluss von Zubehör an den externen Trigger-Eingang

Entfernen Sie die vordere Abdeckung, um Zugang zur Schraubklemme zu bekommen. Drei Anschlusspunkte sind vorhanden.

- Für den Anschluss eines aktiven Schalters, wie z. B. ein Strom führendes Relais, verwenden Sie die Anschlusspunkte 1 und 2.
Hinweis: Der Strom muss 2 bis 30 VDC betragen und polaritätsunabhängig sein oder 2 bis 24 VAC bei 5 bis 150 Hz betragen.
- Für den Anschluss eines passiven mechanischen Schalters, wie z. B. eine Türklingeltaste, verwenden Sie die Anschlusspunkte 2 und 3.

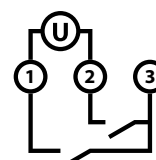

Visit Tür-Sender

Standardmäßiges Signalmuster

Wenn der Tür-Sender aktiviert wird, passiert Folgendes:

- 1 Die LED des Senders leuchtet grün auf und zeigt damit an, dass er an den Empfänger sendet.
- 2 Die Visit-LED am Empfänger leuchtet grün auf und der Empfänger beginnt, in einer bestimmten Geschwindigkeit Ton-, Blitzlicht- oder Vibrationssignale auszusenden. Dies wird Signalmuster genannt. Das Signalmuster wird vom angeschlossenen Zubehör und dem Sender bestimmt. Standardmäßig ist es dieses Muster:

Sender		Empfänger-Signalmuster			
Quelle	LED	LED	Ton	Vibration	Blitzlicht
■ Internes Mikrofon	Grün, oben	Grünes Leuchten	1 x Türgong, tief	Langsam ■□□□	Ja
■ Externes Mikrofon	Grün, unten	Grünes Blinken	2 x Türgong, hoch	Langsam ■□□□	Ja
■ Angeschlossene Türklingel	Grün, oben	3 x grünes Blinken	1 x Türgong, hoch	Langsam ■□□□	Ja

Signalmuster ändern

Das Signalmuster wird vom Sender vorgegeben. Öffnen Sie die vordere Abdeckung des Senders und stellen Sie für die Änderung des Signalmusters die Signalschalter gemäß den Angaben in der nachstehenden Tabelle um.



Sender		Empfänger-Signalmuster			
Quelle		LED	Ton	Vibration	Blitzlicht
1 2 3 4	Int. Mik. / erlerntes Signal 1 / Test Ext. Mik. / erlerntes Signal 2 Angeschlossene Türklingel	Grünes Leuchten Grünes Blinken 3 x grünes Blinken	1 x Türgong, tief 2 x Türgong, hoch 1 x Türgong, hoch	Langsam ■□□□ Langsam ■□□□ Langsam ■□□□	Ja Ja Ja
1 2 3 4	Int. Mik. / erlerntes Signal 1 / Test Ext. Mik. / erlerntes Signal 2 Angeschlossene Türklingel	2 x grünes Blinken 3 x grünes Blinken Grünes Blinken	2 x Türgong, tief 1 x Türgong, hoch 2 x Türgong, hoch	Langsam ■□□□ Langsam ■□□□ Langsam ■□□□	Ja Ja Ja
1 2 3 4	Int. Mik. / erlerntes Signal 1 / Test Ext. Mik. / erlerntes Signal 2 Angeschlossene Türklingel	3 x grünes Blinken 2 x grünes Blinken 3 x orangefarbenes Blinken	1 x Türgong, hoch 2 x Türgong, tief Babymelodie	Langsam ■□□□ Langsam ■□□□ Schnell ■■■■■■	Ja Ja Ja
1 2 3 4	Int. Mik. / erlerntes Signal 1 / Test Ext. Mik. / erlerntes Signal 2 Angeschlossene Türklingel	Grünes Blinken Grünes Leuchten Orangefarbenes Blinken	2 x Türgong, hoch 1 x Türgong, tief Babymelodie	Langsam ■□□□ Langsam ■□□□ Schnell ■■■■■■	Ja Ja Ja
1 2 3 4	Int. Mik. / erlerntes Signal 1 / Test Ext. Mik. / erlerntes Signal 2 Angeschlossene Türklingel	Grünes Leuchten 3 x grünes Blinken 2 x grünes Blinken	1 x Türgong, tief 1 x Türgong, hoch 2 x Türgong, tief	Langsam ■□□□ Langsam ■□□□ Langsam ■□□□	Ja Ja Ja
1 2 3 4	Int. Mik. / erlerntes Signal 1 / Test Ext. Mik. / erlerntes Signal 2 Angeschlossene Türklingel	Grünes Leuchten Grünes Blinken Gelbes Blinken	1 x Türgong, tief 2 x Türgong, hoch 2 x Klingelsignal, hoch	Langsam ■□□□ Langsam ■□□□ Mittel ■■□□	Ja Ja Ja
1 2 3 4	Int. Mik. / erlerntes Signal 1 / Test Ext. Mik. / erlerntes Signal 2 Angeschlossene Türklingel	3 x grünes Blinken Grünes Leuchten Rotes + orangefarbenes	1 x Türgong, hoch 1 x Türgong, tief Leuchten	Langsam ■□□□ Langsam ■□□□ Lang	Ja Ja Ja
1 2 3 4	Int. Mik. / erlerntes Signal 1 / Test Ext. Mik. / erlerntes Signal 2 Angeschlossene Türklingel	Grünes Blinken 2 x grünes Blinken Rotes Blinken	2 x Türgong, hoch 2 x Türgong, tief Feueralarmsignal	Langsam ■□□□ Langsam ■□□□ Lang	Ja Ja Ja



Funkfrequenz ändern

Wenn Ihr Visit-System ohne Grund aktiviert wurde, ist vermutlich in der Nähe ein anderes System installiert, das Ihr System aktiviert. Um derartige Funkinterferenzen zu verhindern, müssen Sie an allen Geräten die Funkfrequenz ändern. Die Funkfrequenzschalter befinden sich unter der Sender-Abdeckung.

So ändern Sie die Funkfrequenz:

- 1 Öffnen Sie die vordere Sender-Abdeckung und stellen Sie einen beliebigen Funkfrequenzschalter auf die obere Position (= Ein), um die Funkfrequenz zu ändern. (Standardmäßig befinden sich alle Funkfrequenzschalter in der unteren Position = Aus.)
- 2 Halten Sie die Prüf-/Funktionstaste des Empfängers so lange gedrückt, bis die grüne und die gelbe Visit-LED abwechselnd blinken. Lassen Sie die Taste los.
- 3 Drücken Sie innerhalb von dreißig Sekunden am Sender gleichzeitig beide Prüftasten, um die neue Funkfrequenz zu übermitteln.
- 4 Am Empfänger blinken alle Visit-LEDs fünf Mal, um anzuzeigen, dass die Funkfrequenz geändert wurde. Anschließend kehrt das Gerät in den normalen Modus zurück.

Hinweis: Um als Gruppe funktionieren zu können, muss an allen Visit-Geräten dieselbe Funkfrequenz eingestellt sein.

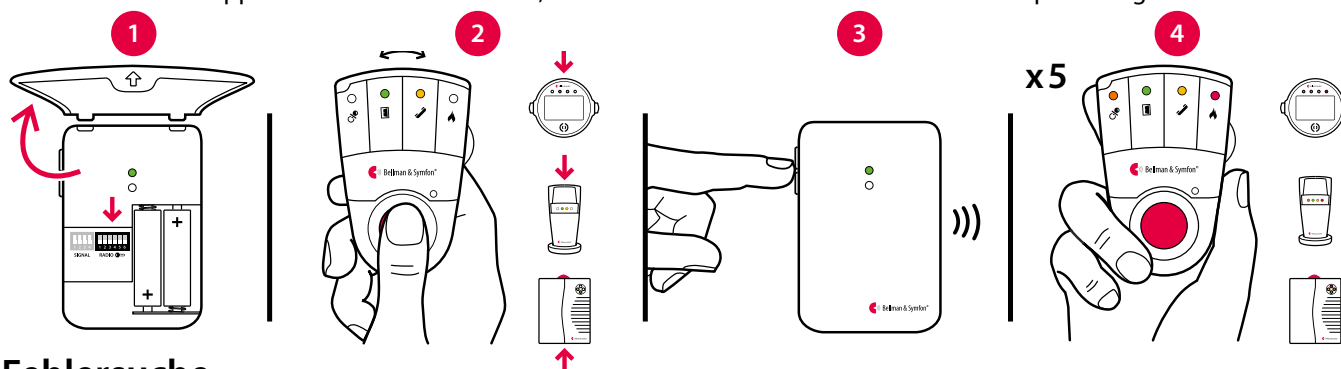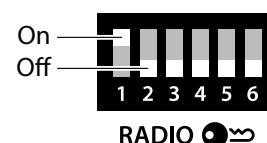


Fehlersuche

Problem	Lösung
Die LEDs blinken einmal pro Minute orangefarben.	Ersetzen Sie die Batterien. Verwenden Sie ausschließlich Lithium- oder Alkaline-Batterien (1,5 V; AA; LR6).
Die Empfänger-LEDs blinken einmal pro Sekunde orangefarben.	- In der Umgebung des Tür-Senders befinden sich weitere, den Tür-Sender störende Schallquellen. Schalten Sie diese aus oder stellen Sie sie leiser. - Trennen Sie das externe Mikrofonzubehör, um sicherzustellen, dass es nicht defekt ist.
Die Empfänger-LED leuchtet auf, wenn ich die Türklingel oder Gegensprechanlage betätige – aber der Empfänger wird nicht aktiviert.	- Überprüfen Sie die Batterien von Sender und Empfänger sowie die Verbindungen bzw. Anschlüsse. - Verringern Sie den Abstand zwischen Empfänger und Sender, um sicherzustellen, dass sie in Reichweite sind. - Stellen Sie sicher, dass der Tür-Sender und der Empfänger auf dieselbe Frequenz eingestellt sind. Weitere Informationen finden Sie unter Funkfrequenz ändern.
Die Sender-LED leuchtet nicht auf, wenn ich die Türklingel oder Gegensprechanlage betätige.	- Betätigen Sie die Türklingel und verringern bzw. vergrößern Sie dabei den Abstand des Senders zur Schallquelle. Der ideale Abstand beträgt weniger als 3 cm. - Programmieren Sie den Sender darauf, den Ton der Türklingel zu erkennen. Siehe Programmierung. - Falls die Signalstärke oder der Signalton stark variiert, wechseln Sie zur elektromagnetischen Erkennung. - Falls der Tür-Sender immer noch nicht aktiviert wird, halten Sie die Tasten 1 und 2 gleichzeitig für fünf Sekunden gedrückt, um die aufgenommen Töne zu löschen und die obigen Schritte zu wiederholen.
Der Empfänger wird ohne ersichtlichen Grund aktiviert.	Vermutlich ist in der Nähe ein anderes Visit-System installiert, das Ihr System aktiviert. Ändern Sie bei allen Geräten die Funkfrequenz, siehe Funkfrequenz ändern.

Visit Druckknopf-Sender

Tasten und Verbindungen

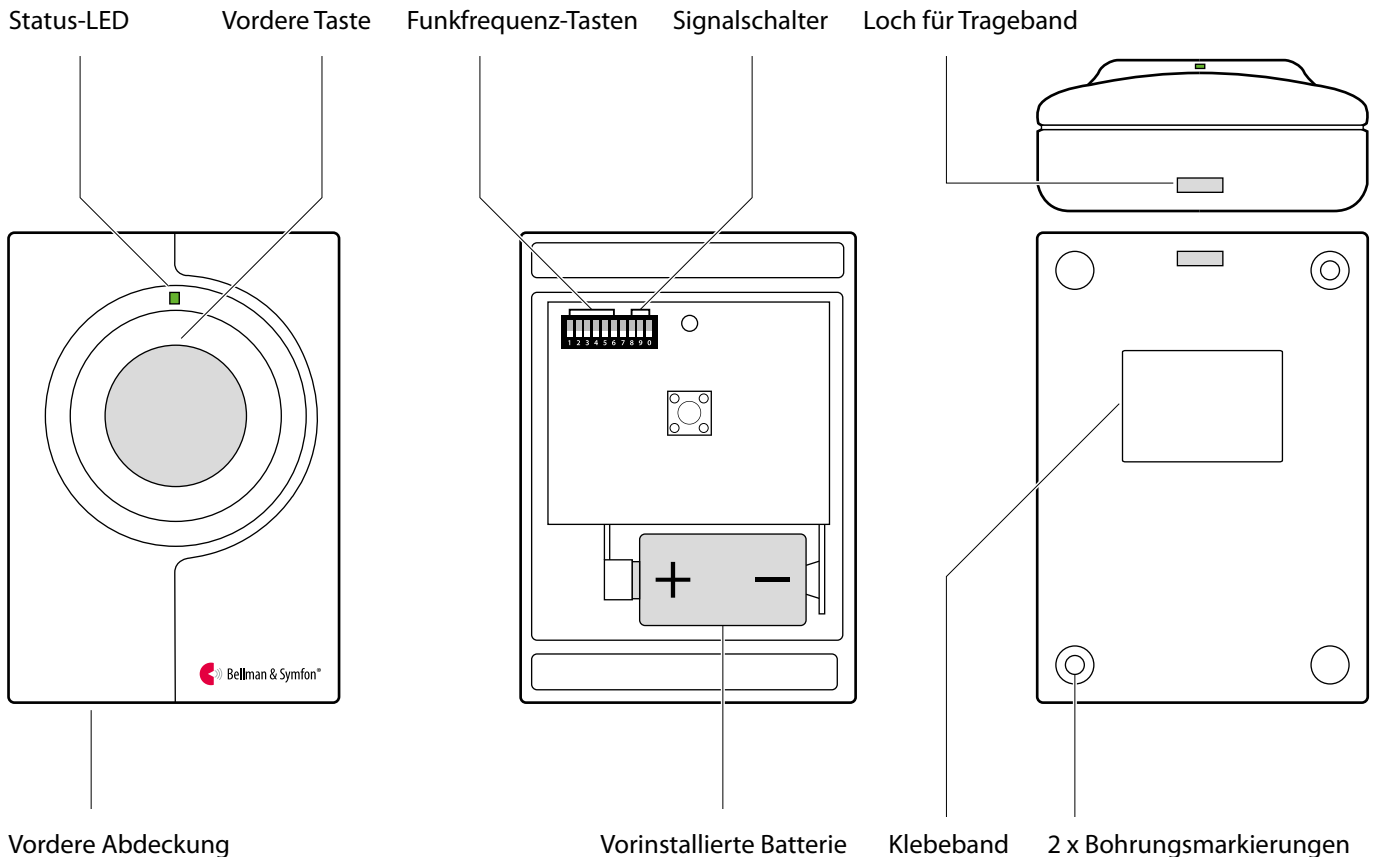

Technische Spezifikationen

Lieferumfang

- BE1420 Visit Druckknopf-Sender mit vorinstallierter Alkaline-Batterie
- Trageband mit Sicherheitsverschluss
- Klebeband, Schrauben und Dübel

Strom und Batterie

- Batterietyp
1 x Alkaline (6 V, PX28A) oder
1 x Lithium (6 V, PX28L)
- Stromverbrauch
Aktiv < 35 mA
Ruhezustand < 0,05 µA
- Betriebsdauer
Alkaline-Batterien ca. 2 Jahre
Lithium-Batterien ca. 5 Jahre

Abmessungen und Gewicht

- Höhe: 66 mm, 2,6 Zoll
- Breite: 48 mm, 1,9 Zoll
- Tiefe: 23 mm, 0,9 Zoll
- Gewicht: 50 g, 1,8 oz (inkl. Batterien)

Aktivierung

- Mit der vorderen Taste

Wartung und Reinigung

- Wartungsfrei
Mit einem trockenen Tuch reinigen
- Verwenden Sie keine Haushaltsreinigungsmittel, Aerosol-Sprays, Lösungsmittel, keinen Alkohol, Ammoniak oder Scheuermittel

Frequenz und Reichweite

- Frequenz
314,91 MHz, 433,92 MHz oder
868,30 MHz, abhängig von der Region
- Reichweite
50 - 250 m (55 - 273 yd),
abhängig von Funkfrequenz und
Gebäudeeigenschaften

Umgebung


- Für den Innengebrauch. Für den Außengebrauch nur an einem geschützten Ort. Das Gerät ist nicht gegen Wasser bzw. Regen geschützt.
- Betriebstemperatur
15 °C bis 35 °C (59 °F bis 95 °F)
- Relative Luftfeuchtigkeit
5 % bis 95 % (nicht kondensierend)

Verwendung als Ruftaste

Der Sender kann als drahtlose Ruftaste um den Hals getragen werden.

So verwenden Sie ihn als Ruftaste:

- 1 Bringen Sie das Umhängeband am Sender an.
- 2 Hängen Sie sich den Sender um Ihren Hals.

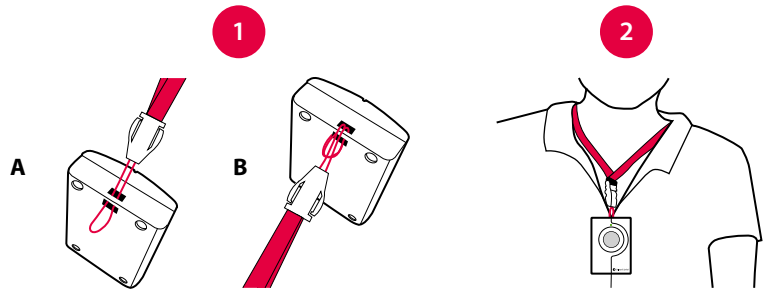


Verwendung als Türklingel

Der Sender kann auch als drahtlose Türklingel verwendet werden. So bringen Sie ihn an:


Montage mit Schrauben

- 1 Nehmen Sie vorsichtig die vordere Sender-Abdeckung ab und bohren Sie an den Markierungen zwei Löcher.
- 2 Befestigen Sie das Gerät mit den beiliegenden Schrauben an der Wand und bringen Sie die Abdeckung wieder an.

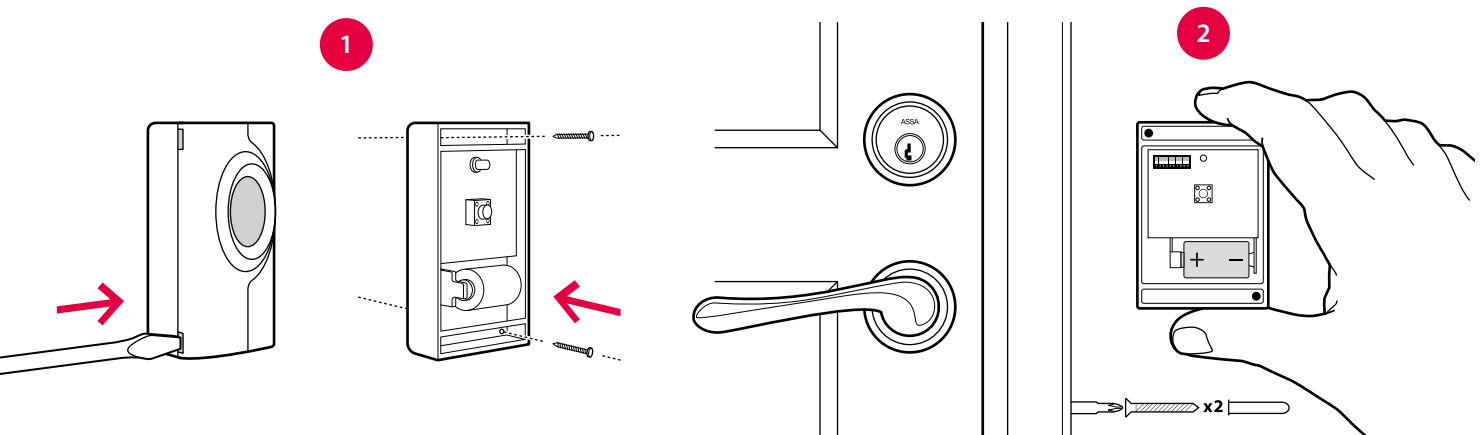

Montage mit Klebeband

- 1 Kleben Sie das beiliegende Klebeband auf die Rückseite des Senders. Reinigen Sie die Wand mit einem feuchten Tuch und ziehen Sie die Schutzfolie vom Klebeband ab.
- 2 Installieren Sie das Gerät wettergeschützt an der Eingangstür.

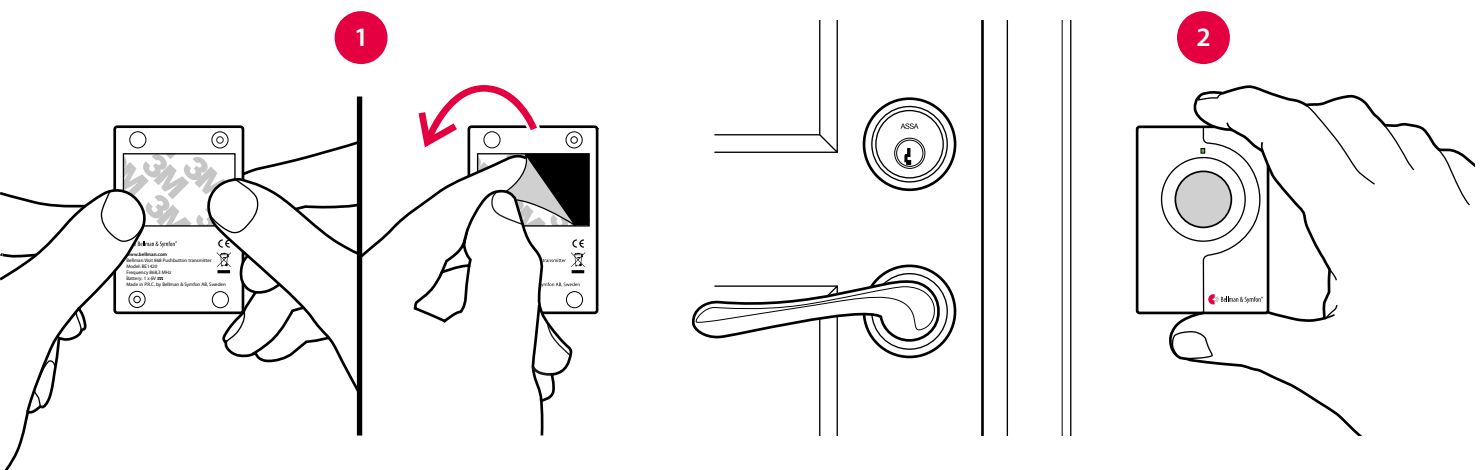


Visit Druckknopf-Sender

Prüfen der Verbindung

Mit der vorderen Taste

- 1 Drücken Sie die vordere Taste des Senders. Die LED leuchtet grün auf und zeigt damit an, dass ein Funksignal übertragen wird.
- 2 Die grüne Visit-LED am Empfänger leuchtet auf und zeigt damit an, dass das Signal empfangen wurde. Zusätzlich beginnt der Empfänger, in einer bestimmten Geschwindigkeit Ton-, Blitzlicht- oder Vibrationssignale auszusenden. Dies wird Signalmuster genannt. Der Sender gibt das Signalmuster vor, das standardmäßig wie folgt eingestellt ist:

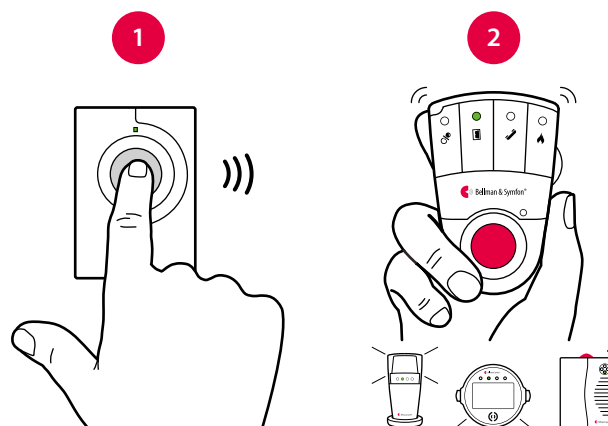

Standardmäßiges Signalmuster

Sender	Empfänger-Signalmuster			
LED	LED	Ton	Vibration	Blitzlicht
■ Grünes Leuchten	Grünes Leuchten	1 x Türgong, tief	Langsam ■□□□	Ja

Signalmuster ändern

Das Signalmuster kann ganz einfach geändert werden. Öffnen Sie einfach die vordere Abdeckung des Senders und stellen Sie für die Änderung des Signalmusters die Signalschalter Nr. 8, 9 und 0 gemäß den Angaben in der nachstehenden Tabelle um:



Sender	Empfänger-Signalmuster			
Schalter	LED	Ton	Vibration	Blitzlicht
	Grünes Leuchten	1 x Türgong, tief	Langsam ■□□□	Ja
	2 x grünes Blinken	2 x Türgong, tief	Langsam ■□□□	Ja
	3 x grünes Blinken	1 x Türgong, hoch	Langsam ■□□□	Ja
	Grünes Blinken	2 x Türgong, hoch	Langsam ■□□□	Ja
	Orangefarbenes Leuchten	Babymelodie	Schnell ■■■■■■	Ja
	Orangefarbenes Blinken	Babymelodie	Schnell ■■■■■■	Ja
	Gelbes Leuchten	1 x Klingelsignal, tief	Mittel ■□■□	Ja
	Gelbes Blinken	2 x Klingelsignal, hoch	Mittel ■□■□	Ja



Funkfrequenz ändern

Wenn Ihr Visit-System ohne Grund aktiviert wurde, ist vermutlich in der Nähe ein anderes System installiert, das Ihr System aktiviert. Um derartige Funkinterferenzen zu verhindern, müssen Sie an allen Geräten die Funkfrequenz ändern. Die Funkfrequenzschalter befinden sich unter der Sender-Abdeckung.

So ändern Sie die Funkfrequenz:

- 1 Entfernen Sie die vordere Sender-Abdeckung und stellen Sie einen beliebigen Funkfrequenzschalter auf die obere Position (= Ein), um die Funkfrequenz zu ändern. (Standardmäßig befinden sich alle Funkfrequenzschalter in der unteren Position = Aus)
- 2 Halten Sie die Prüf-/Funktionstaste des Empfängers so lange gedrückt, bis die grüne und die gelbe Visit-LED abwechselnd blinken. Lassen Sie die Taste los.
- 3 Drücken Sie innerhalb von dreißig Sekunden am Sender die vordere Taste, um die neue Funkfrequenz zu übermitteln.
- 4 Am Empfänger blinken alle Visit-LEDs fünf Mal, um anzuzeigen, dass die Funkfrequenz geändert wurde. Anschließend kehrt das Gerät in den normalen Modus zurück.

Hinweis: Um als Gruppe funktionieren zu können, muss an allen Visit-Geräten dieselbe Funkfrequenz eingestellt sein.

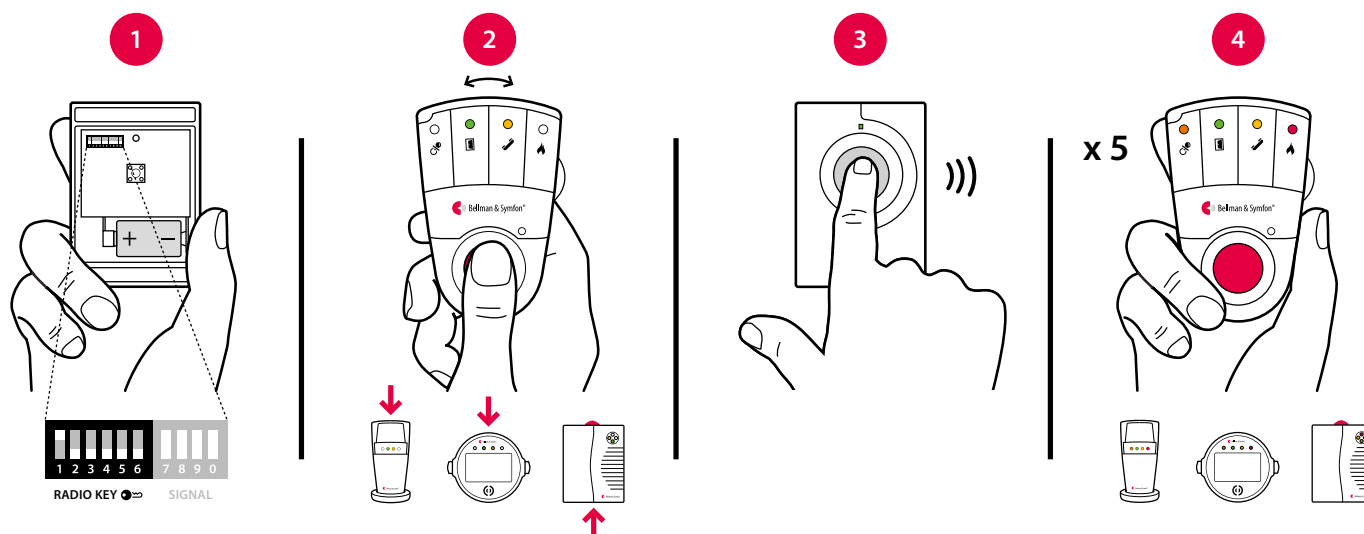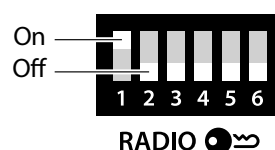

Fehlersuche

Problem

Lösung

Die Sender-LED leuchtet gelb auf, wenn ich die Taste betätige.

- Die Batterie ist fast leer. Ersetzen Sie die alte Batterie mit einer Alkaline-Batterie (PX28A) oder Lithium-Batterie (PX28L).

Die Sender-LED leuchtet nicht auf, wenn ich die Taste betätige.

- Überprüfen Sie, ob die Batterie richtig positioniert ist.
- Ersetzen Sie die alte Batterie mit einer Alkaline-Batterie (PX28A) oder Lithium-Batterie (PX28L).

Die Sender-LED leuchtet grün auf, aber der Empfänger wird nicht aktiviert.


- Überprüfen Sie die Batterien des Senders und die Verbindungen bzw. Anschlüsse.
- Verringern Sie den Abstand zwischen Empfänger und Sender, um sicherzustellen, dass sie in Reichweite sind.
- Stellen Sie sicher, dass die Geräte auf dieselbe Frequenz eingestellt sind, siehe **Funkfrequenz ändern**.

Der Empfänger wird ohne ersichtlichen Grund aktiviert.

- Vermutlich ist in der Nähe ein anderes Visit-System installiert, das Ihr System aktiviert. Ändern Sie bei allen Geräten die Funkfrequenz, siehe **Funkfrequenz ändern**.

Visit Telefon-Sender

Tasten und Verbindungen

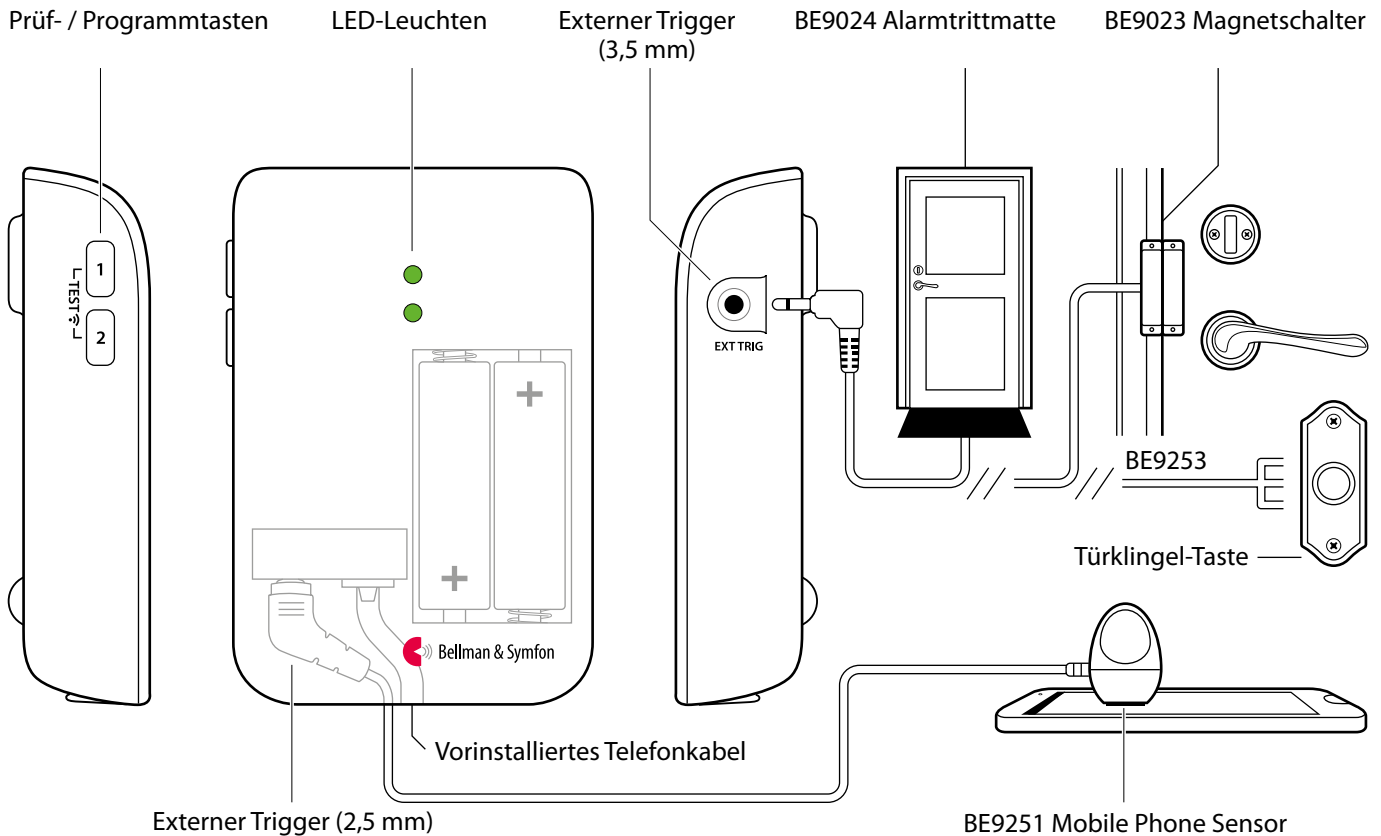

Technische Spezifikationen

Lieferumfang

- BE1431 Visit Telefon-Sender
- 2 x Alkaline-Batterien (1,5 V; AA)
- Telefonkabel und Adapter
- Schraube und Wanddübel

Strom und Batterie

- Batteriestrom
2 x Lithium- oder Alkaline-Batterien (1,5 V; AA)
- Stromverbrauch
Aktiv < 70 mA
Ruhezustand < 15 µA
- Betriebsdauer
Alkaline-Batterien ca. 5 Jahre
Lithium-Batterien ca. 10 Jahre

Abmessungen und Gewicht

- Höhe: 100 mm, 4,0 Zoll
- Breite: 65 mm, 2,6 Zoll
- Tiefe: 27 mm, 1,1 Zoll
- Gewicht: 120 g, 4,2 oz (inkl. Batterien)

Aktivierung

- Die Prüftasten
- Ein Festnetztelefon
- Ein Smartphone oder Tablet über den Mobile Phone Sensor
- Eine Alarmtrittmatte oder ein Magnetschalter
- An externen Trigger angeschlossene Türklingel

Umgebung

- Nur für den Innengebrauch

Zubehör

- BE9251 Mobile Phone Sensor
- BE9023 Magnetschalter
- BE9024 Alarmtrittmatte
- BE9253 Kabel für ext. Trigger (3,5 mm)

Eingänge

- RJ11-Analogeingang für Telefon
- Externer Trigger-Eingang (2,5 mm)
- Externer Trigger-Eingang (3,5 mm)


Frequenz und Reichweite

- Frequenz: 314,91 MHz, 433,92 MHz und 868,30 MHz, abhängig von der Region
- Reichweite: 50 - 250 m (55 - 273 yd), abhängig von Funkfrequenz und Gebäudeeigenschaften

Installation des Senders

- 1 Ziehen Sie die Batterielasche heraus, um das Gerät zu starten.
Reinigen Sie die Wand mit einem feuchten Tuch und ziehen Sie die Schutzfolie vom Klettband ab.
- 2 Installieren Sie den Sender an der Wand. Sie können dazu auch den beiliegenden Dübel und die Schraube verwenden.
- 3 Schließen Sie den Telefonadapter wie unten gezeigt an.

Hinweis: Das Aussehen des Adapters kann ggf. je nach Region unterschiedlich ausfallen.

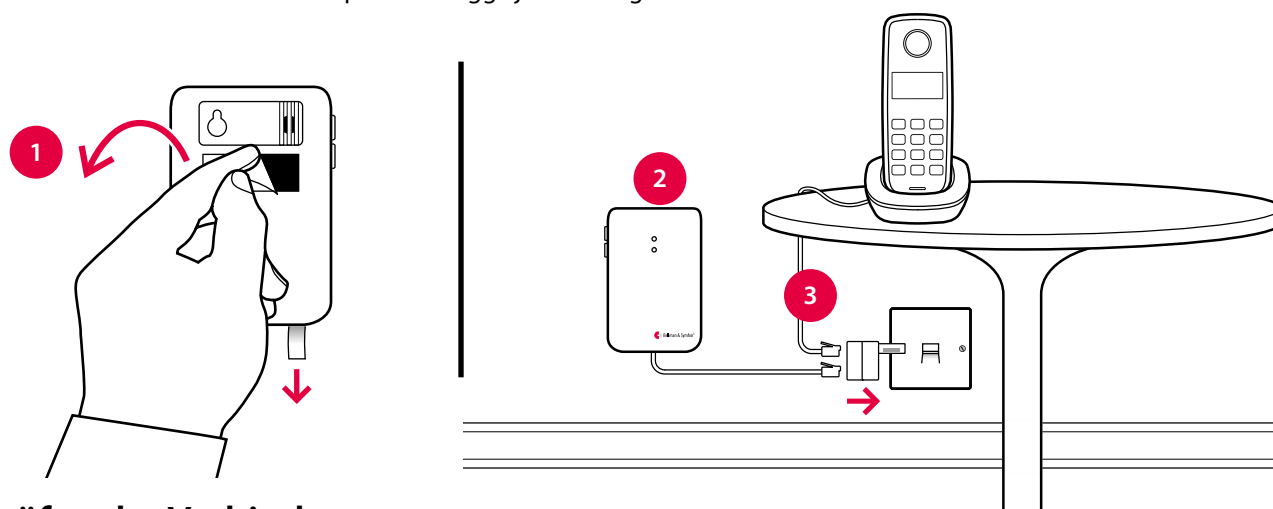


Prüfen der Verbindung

Mit der Prüftaste

- 1 Drücken Sie am Telefon-Sender gleichzeitig beide Prüftasten. Die obere LED leuchtet grün auf und zeigt damit an, dass ein Funksignal übertragen wird.
- 2 Die gelbe Visit-LED am Empfänger leuchtet auf und zeigt damit an, dass das Signal empfangen wurde. Zusätzlich sendet der Empfänger Blitzlicht- oder Vibrationssignale aus. Dies ist abhängig vom Empfängermodell.


Hinweis: Wenn Sie das Signalmuster geändert haben, reagiert das Gerät gemäß den Angaben in der Tabelle auf Seite 19.

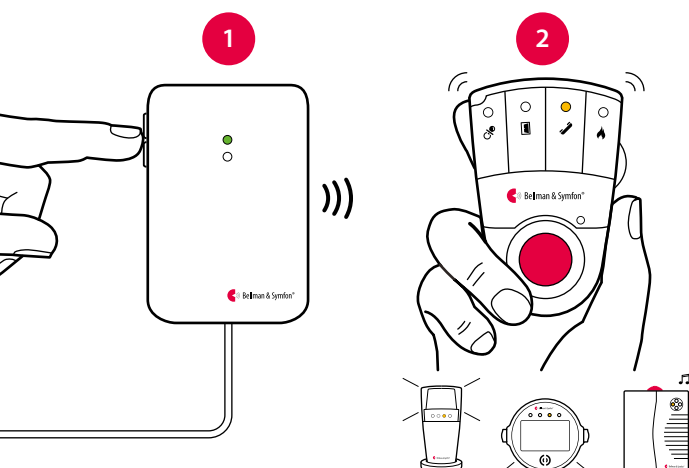

Mit einem Mobiltelefon

- 1 Rufen Sie die Festnetznummer beispielsweise von einem Mobiltelefon an. Die obere LED des Senders leuchtet grün auf und zeigt damit an, dass ein eingehender Anruf erkannt wird.
- 2 Die gelbe Visit-LED am Empfänger leuchtet auf und zeigt damit an, dass das Funksignal empfangen wurde. Zusätzlich sendet der Empfänger Blitzlicht- oder Vibrationssignale aus. Dies ist abhängig vom Empfängermodell.


Hinweis: Wenn Sie das Signalmuster geändert haben, reagiert das Gerät gemäß den Angaben in der Tabelle auf Seite 19.

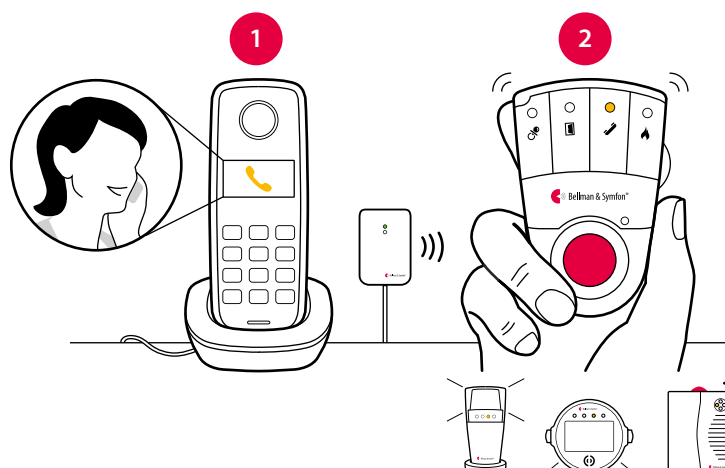

Anschluss an das Telefon


Variante 1

Zum einen können Sie den Telefon-Sender mit dem beiliegenden Kabel an die sogenannte TAE-Dose anschließen (rechts oder links):

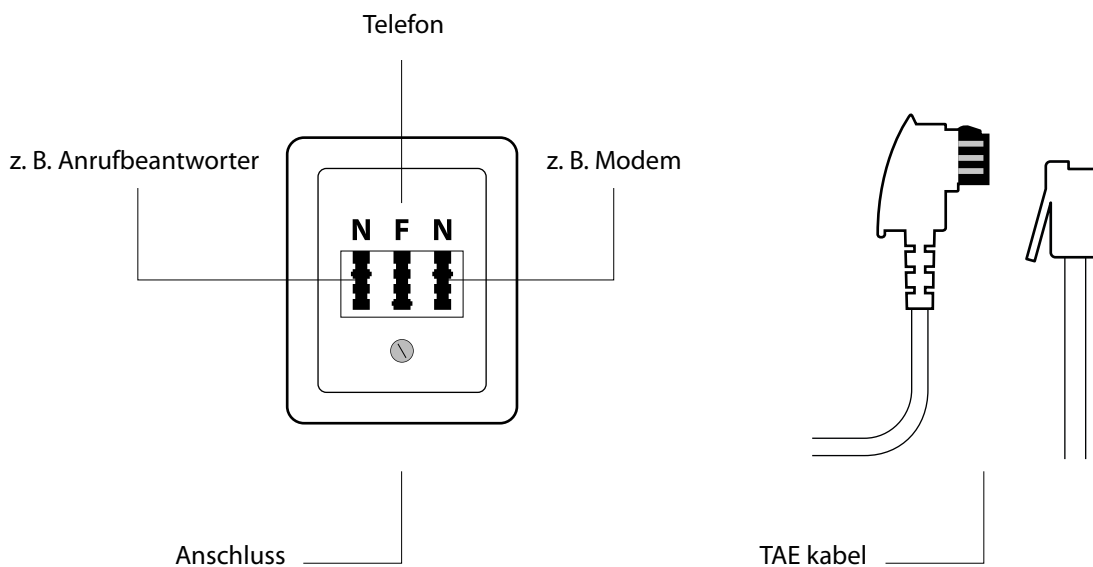


Variante 2

Sollte Ihnen nur der mittlere Anschluss zur Verfügung stehen, benötigen Sie zusätzlich einen Kabel/Adapter oder ein Y-Kabel (erhältlich im Elektrofachhandel):

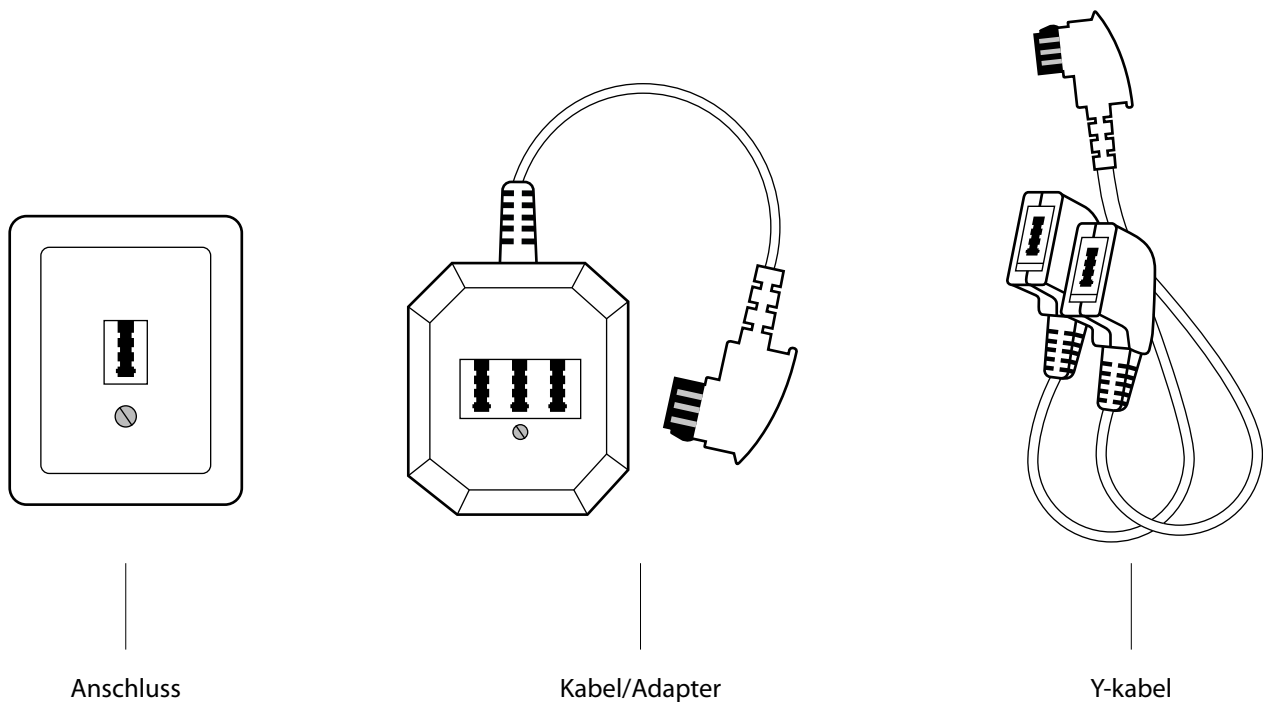


Variante 3

Sollten Sie Ihre Telefonie über einen Router/DSL Modem betreiben, ist das anschließen des Telefon-Senders abhängig von dem bereits angeschlossenen Analog-Telefon. Sollte Ihr Telefon an einen dieser anschlüsse angeschlossen sein, verfahren Sie bitte wie bei **Variante 2** dargestellt.

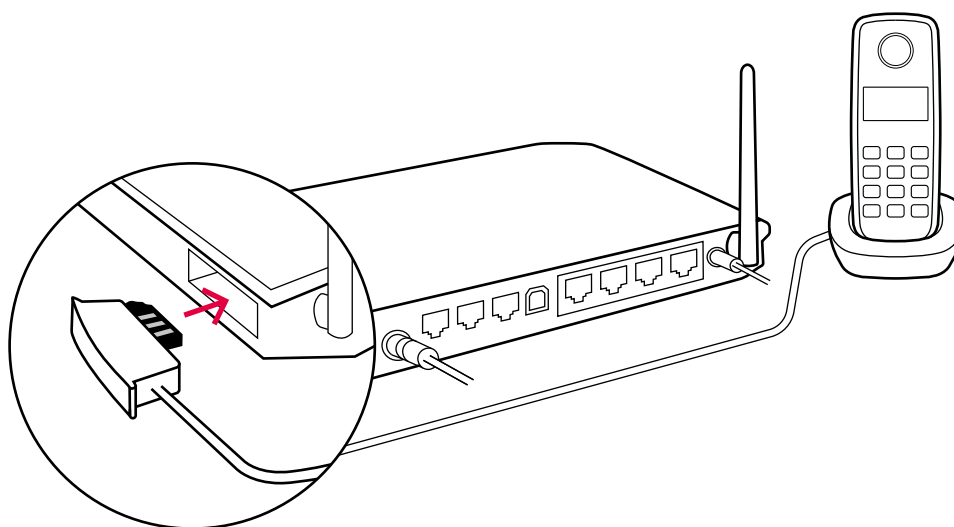

Variante 4

Ist Ihr Telefon am Router mit einem RJ11 (Westernstecker) Kabel verbunden, benötigen Sie neben dem beiliegenden Kabel, den zusätzlichen Splitter BE9005. Generell lässt sich natürlich der Visit Telefon-Sender auch an einen freien Anschluss des Routers oder DSL Modems anschließen. Dies setzt jedoch voraus, dass dieser über die jeweilige Software mit der entsprechenden Rufnummer (muss zwingend die gleiche wie am Telefon sein) belegt wurde.

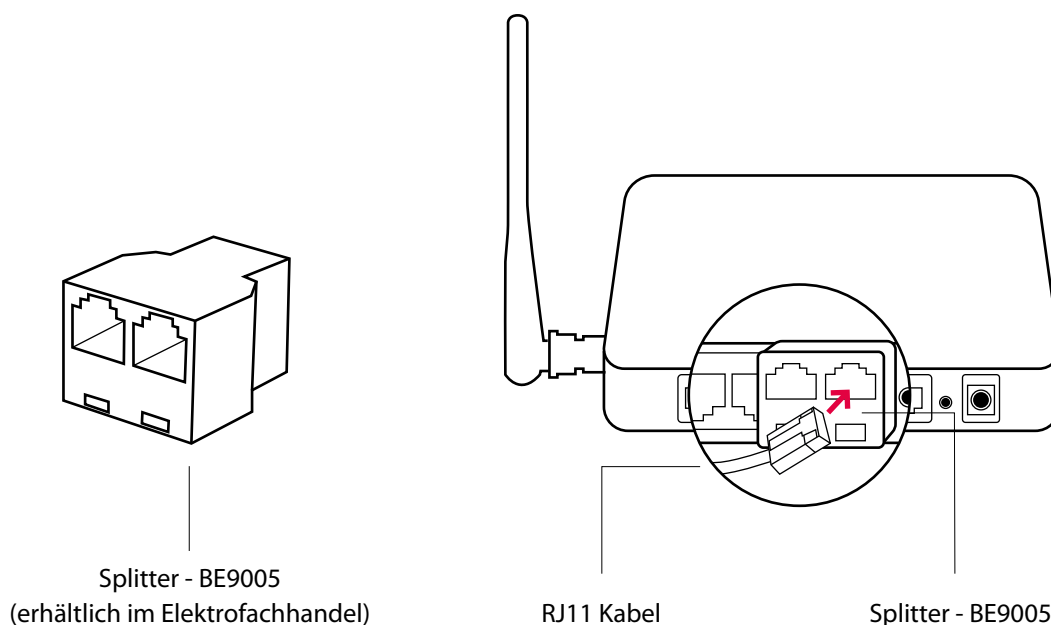

Visit Telefon-Sender

Standardmäßiges Signalmuster

Wenn der Telefon-Sender von einem eingehenden Anruf oder von einem ausgelösten Zubehörgerät aktiviert wird, passiert Folgendes:

- 1 Die LED des Senders leuchtet auf und zeigt damit an, dass der Sender an den Empfänger sendet.
- 2 Die Visit-LED am Empfänger leuchtet auf und der Empfänger beginnt, in einer bestimmten Geschwindigkeit Ton-, Blitzlicht- oder Vibrationssignale auszusenden. Dies wird Signalmuster genannt. Das Signalmuster wird vom angeschlossenen Zubehör und dem Sender bestimmt. Standardmäßig ist es dieses Muster:

Sender		Empfänger-Signalmuster			
Quelle	LED	LED	Ton	Vibration	Blitzlicht
■ Festnetztelefon	Grün, oben	Gelbes Leuchten	1 x Klingelsignal, tief	Mittel ■□■□	Ja
■ Mobile Phone Sensor	Grün, oben	Gelbes Blinken	2 x Klingelsignal, hoch	Mittel ■□■□	Ja
■ Weiteres Zubehör	Grün, unten	Grünes Leuchten	1 x Türgong, tief	Langsam ■□□□	Ja

Signalmuster ändern

Das Signalmuster wird vom Sender vorgegeben. Öffnen Sie die vordere Abdeckung des Senders und stellen Sie für die Änderung des Signalmusters die Signalschalter gemäß den Angaben in der nachstehenden Tabelle um.



Sender		Empfänger-Signalmuster			
	Quelle	LED	Ton	Vibration	Blitzlicht
	Festnetztelefon / Prüftaste	Gelbes Leuchten	1 x Klingelsignal, tief	Mittel ■□■□	Ja
	Mobile Phone Sensor	Gelbes Blinken	2 x Klingelsignal, hoch	Mittel ■□■□	Ja
	Weiteres Zubehör	Grünes Leuchten	1 x Türgong, tief	Langsam ■□□□	Ja
	Festnetztelefon / Prüftaste	Gelbes Leuchten	1 x Klingelsignal, tief	Mittel ■□■□	Ja
	Mobile Phone Sensor	Gelbes Blinken	2 x Klingelsignal, hoch	Mittel ■□■□	Ja
	Weiteres Zubehör	2 x grünes Blinken	2 x Türgong, tief	Langsam ■□□□	Ja
	Festnetztelefon / Prüftaste	Gelbes Leuchten	1 x Klingelsignal, tief	Mittel ■□■□	Ja
	Mobile Phone Sensor	Gelbes Blinken	2 x Klingelsignal, hoch	Mittel ■□■□	Ja
	Weiteres Zubehör	3 x gelbes Blinken	1 x Klingelsignal, hoch	Mittel ■□■□	Ja
	Festnetztelefon / Prüftaste	Gelbes Leuchten	1 x Klingelsignal, tief	Mittel ■□■□	Ja
	Mobile Phone Sensor	Gelbes Blinken	2 x Klingelsignal, hoch	Mittel ■□■□	Ja
	Weiteres Zubehör	2 x orangefarbenes Blinken	Babymelodie	Schnell ■■■■■■	Ja
	Festnetztelefon / Prüftaste	2 x gelbes Blinken	2 x Klingelsignal, tief	Schnell ■■■■■■	Ja
	Mobile Phone Sensor	Gelbes Leuchten	1 x Klingelsignal, tief	Mittel ■□■□	Ja
	Weiteres Zubehör	3 x orangefarbenes Blinken	Babymelodie	Schnell ■■■■■■	Ja
	Festnetztelefon / Prüftaste	2 x gelbes Blinken	2 x Klingelsignal, tief	Mittel ■□■□	Ja
	Mobile Phone Sensor	Orangefarbenes Blinken	Babymelodie	Schnell ■■■■■■	Ja
	Weiteres Zubehör	Grünes Blinken	2 x Türgong, hoch	Langsam ■□□□	Ja
	Festnetztelefon / Prüftaste	Orangefarbenes Blinken	Babymelodie	Mittel ■□■□	Ja
	Mobile Phone Sensor	3 x gelbes Blinken	1 x Klingelsignal, hoch	Mittel ■□■□	Ja
	Weiteres Zubehör	2 x grünes Blinken	2 x Türgong, tief	Langsam ■□□□	Ja
	Festnetztelefon / Prüftaste	3 x gelbes Blinken	1 x Klingelsignal, hoch	Mittel ■□■□	Ja
	Mobile Phone Sensor	2 x gelbes Blinken	2 x Klingelsignal, tief	Mittel ■□■□	Ja
	Weiteres Zubehör	Grünes Blinken	2 x Türgong, hoch	Langsam ■□□□	Ja



Funkfrequenz ändern

Wenn Ihr Visit-System ohne Grund aktiviert wurde, ist vermutlich in der Nähe ein anderes System installiert, das Ihr System aktiviert. Um derartige Funkinterferenzen zu verhindern, müssen Sie an allen Geräten die Funkfrequenz ändern. Die Funkfrequenzschalter befinden sich unter der Sender-Abdeckung.

So ändern Sie die Funkfrequenz:

- 1 Öffnen Sie die vordere Sender-Abdeckung und stellen Sie einen beliebigen Funkfrequenzschalter auf die obere Position (= Ein), um die Funkfrequenz zu ändern. (Standardmäßig befinden sich alle Funkfrequenzschalter in der unteren Position = Aus)
- 2 Halten Sie die Prüf-/Funktionstaste des Empfängers so lange gedrückt, bis die grüne und die gelbe Visit-LED abwechselnd blinken. Lassen Sie die Taste los.
- 3 Drücken Sie innerhalb von dreißig Sekunden am Sender gleichzeitig beide Prüftasten, um die neue Funkfrequenz zu übermitteln.
- 4 Am Empfänger blinken alle Visit-LEDs fünf Mal, um anzuzeigen, dass die Funkfrequenz geändert wurde. Anschließend kehrt das Gerät in den normalen Modus zurück.

Hinweis: Um als Gruppe funktionieren zu können, muss an allen Visit-Geräten dieselbe Funkfrequenz eingestellt sein.

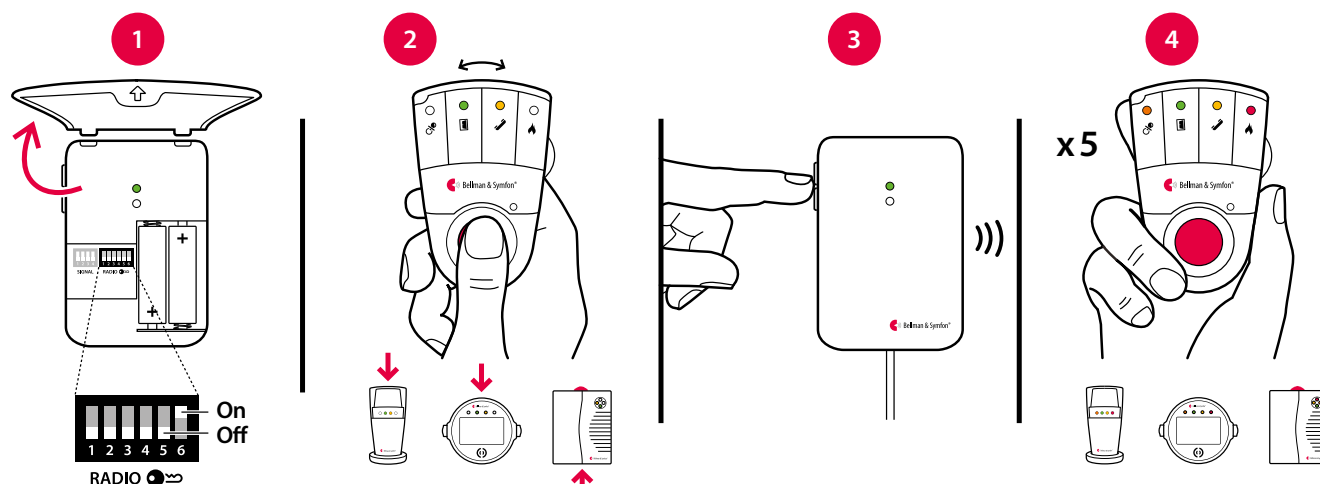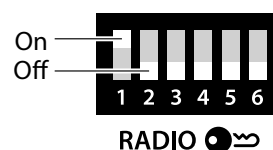


Fehlersuche

Problem	Lösung
Die LEDs blinken einmal pro Minute orangefarben.	Ersetzen Sie die Batterien. Verwenden Sie ausschließlich Lithium- oder Alkaline-Batterien (1,5 V; AA; LR6).
Die Sender-LED leuchtet grün auf, aber der Empfänger reagiert nicht.	- Überprüfen Sie die Batterien von Sender und Empfänger sowie die Verbindungen bzw. Anschlüsse. - Verringern Sie den Abstand zwischen Empfänger und Sender, um sicherzustellen, dass sie in Reichweite sind. - Stellen Sie sicher, dass die Geräte auf dieselbe Frequenz eingestellt sind, siehe Funkfrequenz ändern.
Die Sender-LED leuchtet nicht auf, wenn das Telefon klingelt oder ein Zubehörgerät ausgelöst wird.	Drücken Sie die Prüftasten des Senders. Prüfen Sie alle Verbindungen bzw. Anschlüsse, wenn die LED grün aufleuchtet. Wenn die LED nicht grün aufleuchtet, ersetzen Sie die Batterien. Verwenden Sie ausschließlich Lithium- oder Alkaline-Batterien (1,5 V; AA; LR6).
Die Sender-LED leuchtet nicht auf, wenn ich die Prüftasten betätige.	Ersetzen Sie die Batterien. Verwenden Sie ausschließlich Lithium- oder Alkaline-Batterien (1,5 V; AA; LR6). Wenn die LED weiterhin nicht aufleuchtet, setzen Sie sich mit Ihrem Händler zwecks Service-Informationen in Verbindung.
Der Empfänger wird ohne ersichtlichen Grund aktiviert.	Vermutlich ist in der Nähe ein anderes Visit-System installiert, das Ihr System aktiviert. Ändern Sie bei allen Geräten die Funkfrequenz, siehe Funkfrequenz ändern.

Visit Babyruf-Sender

Tasten und Verbindungen

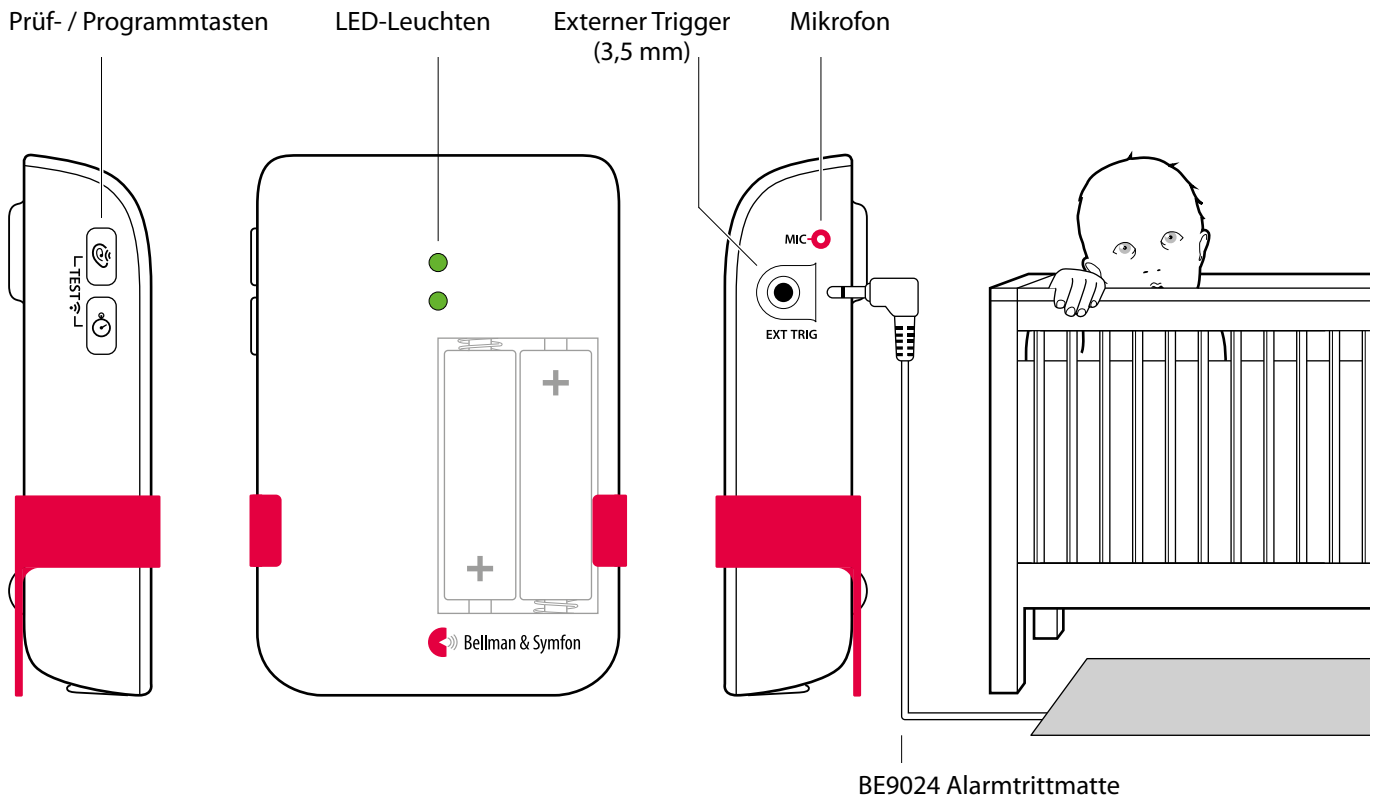

Stellen Sie stets sicher, dass sich der Babyruf-Sender außerhalb der Reichweite von Kindern befindet.
Stellen Sie den Babyruf-Sender niemals im Bett oder Laufgitter des Kindes auf.

Technische Spezifikationen

Lieferumfang

- BE1491 Visit Babyruf-Sender
- 2 x Alkaline-Batterien (1,5 V; AA)
- Tischständer (vormontiert)
- Schraube und Wanddübel

Abmessungen und Gewicht

- Höhe: 100 mm, 4,0 Zoll
- Breite: 65 mm, 2,6 Zoll
- Tiefe: 27 mm, 1,1 Zoll
- Gewicht: 120 g, 4,2 oz (inkl. Batterien)

Umgebung

- Nur für den Innengebrauch
Betriebstemperatur
15 °C bis 35 °C (59 °F bis 95 °F)
- Relative Luftfeuchtigkeit
5 % bis 95 % (nicht kondensierend)

Strom und Batterie

- Batteriestrom
2 x Lithium- oder Alkaline-Batterien
(1,5 V; AA)
- Stromverbrauch
Aktiv < 70 mA
Ruhezustand < 400 µA
- Betriebsdauer
Alkaline-Batterien ca. 6 Monate
Lithium-Batterien ca. 1 Jahr

Aktivierung

- Über das interne Mikrofon und die Prüftasten
- Zubehör Alarmtrittmatte

Einstellungen

- Empfindlichkeit
65 dB, 75 dB, 85 dB
- Verzögerung
30 s, 10 s, 1 s

Frequenz und Reichweite


- Frequenz: 314,91 MHz, 433,92 MHz und 868,30 MHz, abhängig von der Region
- Reichweite: 50 - 250 m (55 - 273 yd), abhängig von Funkfrequenz und Gebäudeeigenschaften

Zubehör

- BE9024 Alarmtrittmatte
Benachrichtigt Sie, wenn Ihr Baby sein Bett verlässt

Installation des Babyruf-Senders

- 1 Ziehen Sie die Batterielasche heraus, um das Gerät zu starten.
(Sie können auch die Prüftasten für drei Sekunden gedrückt halten, um es ein- oder auszuschalten).
- 2 Platzieren Sie den Babyruf-Sender auf dem Nachttisch oder befestigen Sie ihn mit beiliegender Schraube und Dübel an der Wand. Der empfohlene Abstand beträgt 0,5 bis 2,0 Meter (stets außerhalb der Reichweite des Kindes).

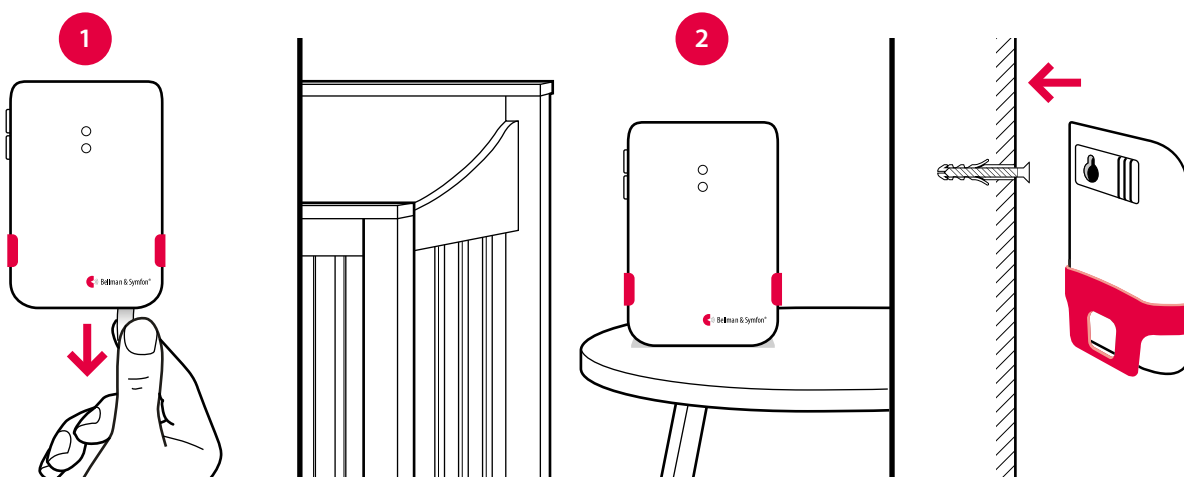


Prüfen der Verbindung

Mit der Prüftaste

- 1 Drücken Sie am Babyruf-Sender gleichzeitig beide Prüftasten. Die obere LED leuchtet grün auf und zeigt damit an, dass ein Funksignal übertragen wird.
- 2 Die orangefarbene Visit-LED am Empfänger leuchtet auf und zeigt damit an, dass das Signal empfangen wurde. Zusätzlich sendet der Empfänger Blitzlicht- oder Vibrationssignale aus. Dies ist abhängig vom Empfängermodell.


Hinweis: Wenn Sie das Signalmuster geändert haben, reagiert das Gerät gemäß den Angaben in folgender Tabelle.

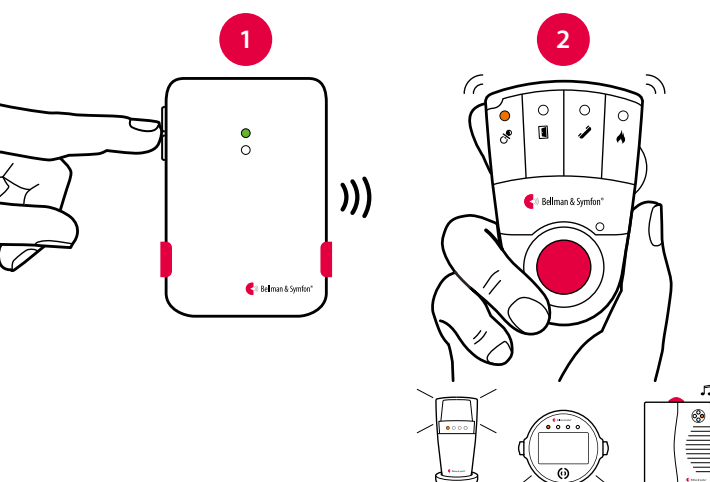

Mit der Stimme

- 1 Stellen Sie sich neben den Babyruf-Sender und machen Sie ein paar Geräusche. Die obere LED leuchtet grün auf und zeigt damit an, dass das Geräusch bzw. Schall erkannt wird.
- 2 Die orangefarbene Visit-LED am Empfänger leuchtet auf und zeigt damit an, dass das Funksignal empfangen wurde. Zusätzlich sendet der Empfänger Blitzlicht- oder Vibrationssignale aus. Dies ist abhängig vom Empfängermodell.

Hinweis: Wenn Sie das Signalmuster geändert haben, reagiert das Gerät gemäß den Angaben in folgender Tabelle.

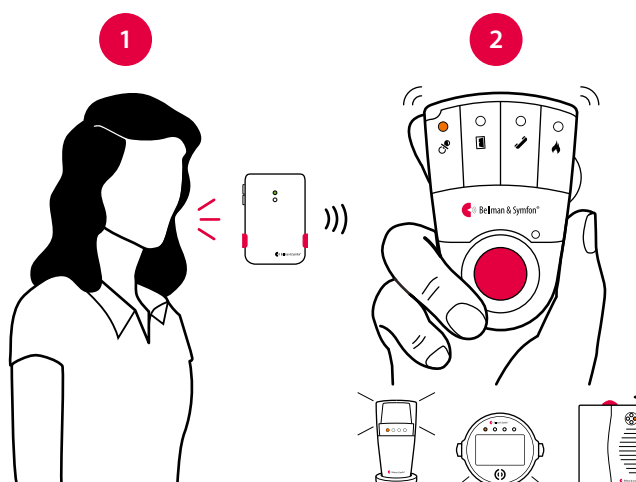

Visit Babyruf-Sender

Einstellungen anpassen

Die Tasten für Empfindlichkeit und Verzögerung befinden sich auf der linken Seite des Babyruf-Senders. Wenn Sie eine Taste drücken, wird anhand der Farbe der zugehörigen LED die aktuelle Einstellung angezeigt. Drücken Sie die Taste wiederholt, um die Einstellung zu ändern.


- Der Babyruf-Sender wird trotz schreienden Babys nicht aktiviert: Empfindlichkeit erhöhen.
- Der Babyruf-Sender wird bereits bei leisen Geräuschen aktiviert: Empfindlichkeit verringern.
- Der Babyruf-Sender wird zu früh/spät aktiviert: Verzögerung entsprechend anpassen.

Empfindlichkeitseinstellungen

	65 dB	Rot
	75 dB	Orange
	85 dB	Grün

Verzögerungseinstellungen

	30 s	Rot
	10 s	Orange
	1 s	Grün

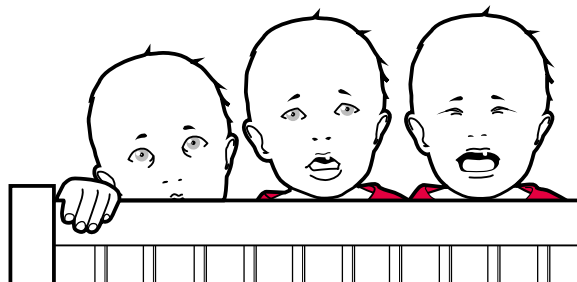

Standardmäßiges Signalmuster

Wenn der Babyruf-Sender von der Stimme des Babys oder der Alarmtrittmatte aktiviert wird, passiert Folgendes:

- 1 Die LED des Babyruf-Senders leuchtet grün auf und zeigt damit an, dass es an den Empfänger sendet.
- 2 Die Visit-LED am Empfänger leuchtet orangefarben auf und der Empfänger beginnt, in einer bestimmten Geschwindigkeit Ton-, Blitzlicht- oder Vibrationssignale auszusenden. Dies wird Signalmuster genannt. Der Babyruf-Sender und die Alarmtrittmatte geben das Signalmuster vor. Standardmäßig ist es dieses Muster:

Babyruf-Sender		Empfänger-Signalmuster			
Quelle	LED	LED	Ton	Vibration	Blitzlicht
■ Stimme des Babys	Grün, oben	Orangefarbenes Leuchten	Babymelodie	Schnell ■■■■■■	Ja
■ Alarmtrittmatte	Grün, unten	Grünes Leuchten	1 x Türgong, tief	Langsam ■■■■■■	Ja

Signalmuster ändern

Wenn Sie mehr als ein Kind haben, können Sie für jeden Babyruf-Sender ein eigenes Signalmuster der Visit-LED einstellen. Dazu öffnen Sie einfach die vordere Abdeckung und stellen einen beliebigen Funkfrequenzschalter auf die obere Position (= Ein). Vergewissern Sie sich, dass alle anderen Schalter in der unteren Position (=Aus) stehen.



Babyruf-Sender		Empfänger-Signalmuster			
	Quelle	LED	Ton	Vibration	Blitzlicht
	Babyruf-Sender 1 Alarmtrittmatte 1	Orangefarbenes Leuchten Grünes Leuchten	Babymelodie Babymelodie	Schnell ■■■■■■ Schnell ■■■■■■	Ja Ja
	Babyruf-Sender 2 Alarmtrittmatte 2	2 x orangefarbenes Blinken 2 x grünes Blinken	Babymelodie Babymelodie	Schnell ■■■■■■ Schnell ■■■■■■	Ja Ja
	Babyruf-Sender 3 Alarmtrittmatte 3	3 x orangefarbenes Blinken 3 x orangefarbenes Blinken	Babymelodie Babymelodie	Schnell ■■■■■■ Schnell ■■■■■■	Ja Ja
	Babyruf-Sender 4 Alarmtrittmatte 4	Orangefarbenes Blinken Orangefarbenes Blinken	Babymelodie Babymelodie	Schnell ■■■■■■ Schnell ■■■■■■	Ja Ja



Funkfrequenz ändern

Wenn Ihr Visit-System ohne Grund aktiviert wurde, ist vermutlich in der Nähe ein anderes System installiert, das Ihr System aktiviert. Um derartige Funkinterferenzen zu verhindern, müssen Sie an allen Geräten die Funkfrequenz ändern. Die Funkfrequenzschalter befinden sich unter der Abdeckung des Babyruf-Senders.

So ändern Sie die Funkfrequenz:

- 1 Entfernen Sie vorsichtig den Tischständer und öffnen Sie die vordere Abdeckung des Babyruf-Senders. Stellen Sie einen beliebigen Funkfrequenzschalter auf die obere Position (= Ein), um die Funkfrequenz zu ändern.
- 2 Halten Sie die Prüf-/Funktionstaste des Empfängers so lange gedrückt, bis die grüne und die gelbe Visit-LED abwechselnd blinken. Lassen Sie die Taste los.
- 3 Drücken Sie innerhalb von dreißig Sekunden am Babyruf-Sender gleichzeitig beide Prüftasten, um die neue Funkfrequenz zu übermitteln.
- 4 Am Empfänger blinken alle Visit-LEDs fünf Mal, um anzuzeigen, dass die Funkfrequenz geändert wurde. Anschließend kehrt das Gerät in den normalen Modus zurück.

Hinweis: Um als Gruppe funktionieren zu können, muss an allen Visit-Geräten dieselbe Funkfrequenz eingestellt sein.

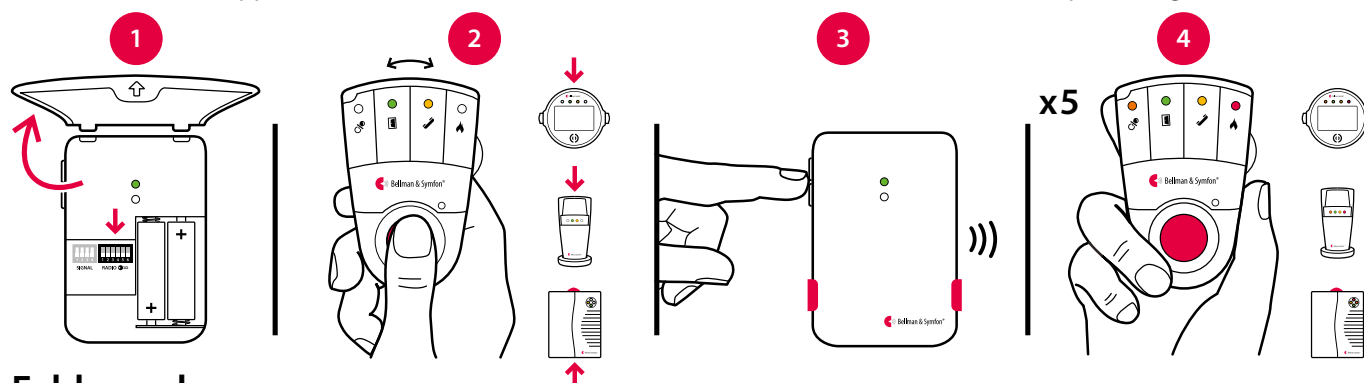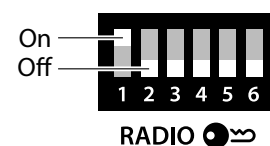


Fehlersuche

Problem	Lösung
Die LEDs blinken einmal pro Minute orangefarben.	■ Ersetzen Sie die Batterien. Verwenden Sie ausschließlich Lithium- oder Alkaline-Batterien (1,5 V; AA; LR6).
Die Babyruf-Sender-LED leuchtet grün auf, aber der Empfänger wird nicht aktiviert.	■ Überprüfen Sie die Batterien von Babyruf-Sender und Empfänger sowie die Verbindungen bzw. Anschlüsse. ■ Verringern Sie den Abstand zwischen Babyruf-Sender und Empfänger, um sicherzustellen, dass sie in Reichweite sind. ■ Stellen Sie sicher, dass die Geräte auf dieselbe Frequenz eingestellt sind, siehe Funkfrequenz ändern.
Die Babyruf-Sender-LED leuchtet nicht auf, obwohl das Baby schreit.	■ Verringern Sie den Abstand zwischen Baby und Babyruf-Sender oder erhöhen Sie die Mikrofon-Empfindlichkeit, siehe Einstellungen anpassen. ■  Hinweis: Stellen Sie stets sicher, dass sich der Babyruf-Sender außerhalb der Reichweite von Kindern befindet. Stellen Sie den Babyruf-Sender niemals im Bett oder Laufgitter des Kindes auf.
Der Babyruf-Sender wird bereits bei leisen Geräuschen aktiviert.	■ Verringern Sie die Empfindlichkeit oder vergrößern Sie den Abstand des Babyruf-Senders zum Kinderbett, siehe Einstellungen anpassen.
Der Babyruf-Sender wird zu früh aktiviert.	■ Erhöhen Sie die Verzögerung. Weitere Informationen finden Sie unter Einstellungen anpassen.
Der Babyruf-Sender wird zu spät aktiviert.	■ Verringern Sie die Verzögerung. Weitere Informationen finden Sie unter Einstellungen anpassen.
Der Empfänger wird ohne ersichtlichen Grund aktiviert.	■ Vermutlich ist in der Nähe ein anderes Visit-System installiert, das Ihr System aktiviert. Ändern Sie bei allen Geräten die Funkfrequenz, siehe Funkfrequenz ändern.

BE1480 Visit Rauchmelde-Sender

Tasten und Steuerelemente

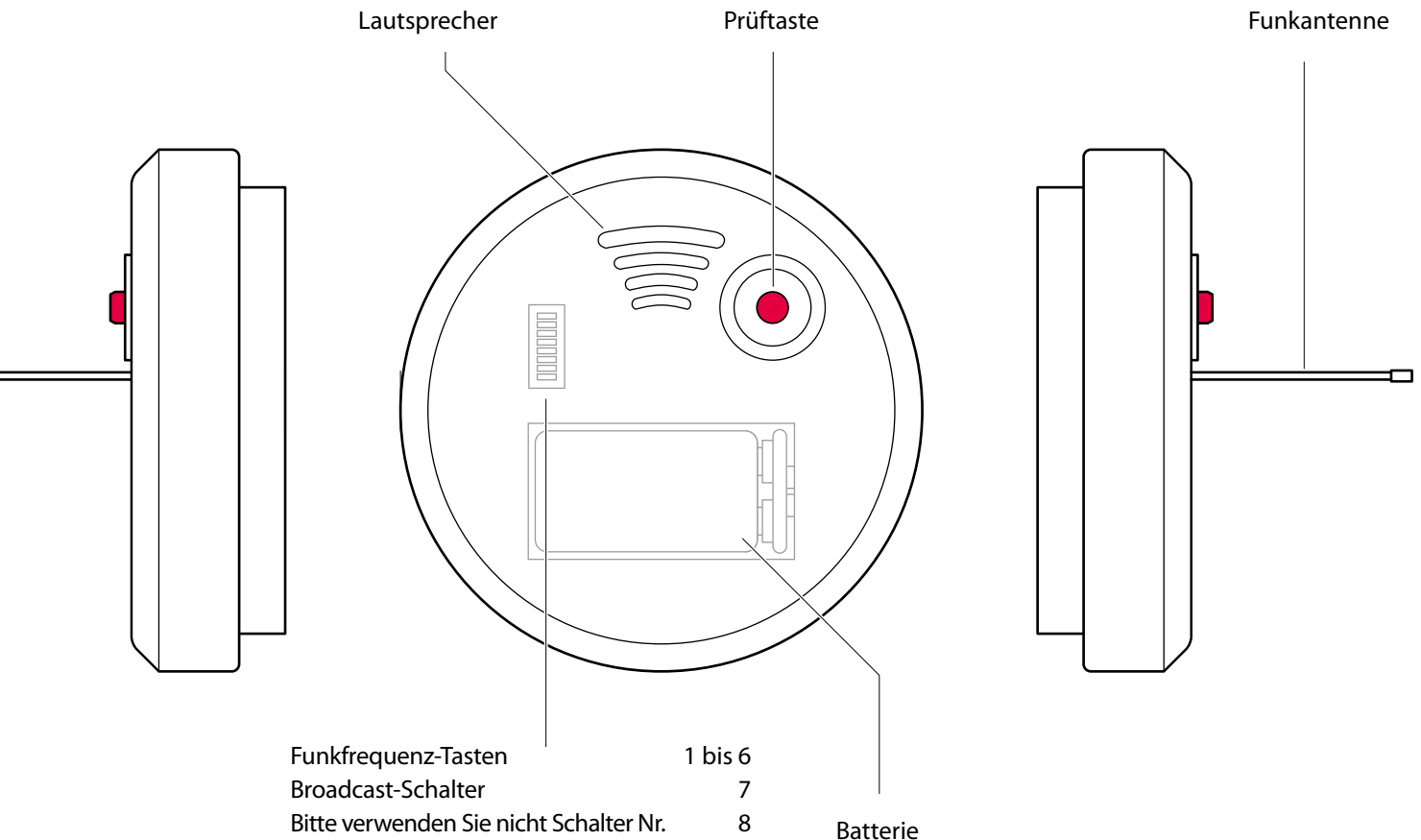

Technische Spezifikationen

Lieferumfang

- BE1480 Visit Rauchmelde-Sender
- 1 x Alkaline- oder Lithiumbatterie (9V)
- Montageplatte
- Schrauben und Dübel

Abmessungen und Gewicht

- Höhe: 100 mm, 4,0 Zoll
- Breite: 100 mm, 2,6 Zoll
- Tiefe: 35 mm, 1,4 Zoll
- Gewicht: 110 g, 3,9 oz (inkl. Batterien)

Umgebung

- Nur für den Innengebrauch
- Betriebstemperatur
0 °C bis 38 °C (32 °F bis 100 °F)
- Relative Luftfeuchtigkeit
15 % bis 95 % (nicht kondensierend)

Strom und Batterie

- Batteriestrom
Duracell (9V; MN1604),
Energizer (522) oder Ultralife
(9V; U9VL-J; Lithium)
- Stromverbrauch
Aktiv < 40 mA
Ruhezustand < 10 µA
- Betriebsdauer
Alkaline-Batterien ca. 3 Jahre
Lithium-Batterien ca. 6 Jahre

Sensortyp

- Optisch-thermal Sensor mit akustischem Alarm von > 85 dB(A) bei 3 m

Aktivierung

- Mit der Prüftaste
- Mit dem integrierten Rauchmelder
- Mit dem integrierten Temperatursensor, wenn eine Temperatur von etwa ca. 57 °C überschritten wird.

Frequenz und Reichweite


- Frequenz: 314,91 MHz, 433,92 MHz und 868,30 MHz, abhängig von der Region
- Reichweite: 50 - 250 m (55 - 273 yd), abhängig von Funkfrequenz und Gebäudeeigenschaften

Gesetzliche Anforderungen

- BE1480 erfüllt die Norm EN 14604: 2005 für Rauchmelde-Sender

Installation des Rauchmelde-Senders

- 1 Entfernen Sie die Montageplatte und schließen Sie die Batterie an den Batterie-Druckknöpfen an, um das Gerät zu starten. Warten Sie ungefähr zehn Sekunden, während der Rauchmelde-Sender einen Selbsttest durchführt. Wenn die Prüftaste einmal blinkt, ist der Selbsttest abgeschlossen.
- 2 Befestigen Sie die Montageplatte mit den beiliegenden Schrauben und Dübeln an der Zimmerdecke. Bringen Sie ihn in einem Mindestabstand von 50 cm (19,7 Zoll) zu Wänden und anderen Hindernissen an, siehe Installation des Rauchmelde-Senders.
- 3 Befestigen Sie den Rauchmelde-Sender durch Drehen im Uhrzeigersinn an der Montageplatte. Ziehen Sie die Antenne so heraus, dass sie nach unten gerichtet ist.

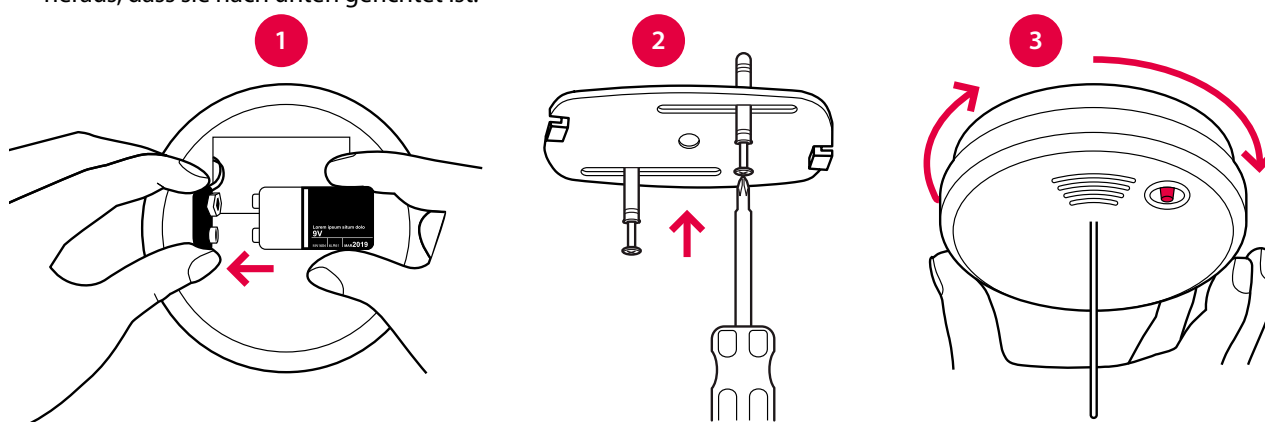


Prüfen der Verbindung

Mit der Prüftaste

- 1 Halten Sie die Prüftaste des Rauchmelde-Senders länger als eine Sekunde gedrückt. Der Rauchmelde-Sender gibt einen Piepton aus und überträgt ein Funksignal an den Empfänger.
- 2 Die rote Visit-LED am Empfänger leuchtet auf und zeigt damit an, dass das Signal empfangen wurde. Zusätzlich sendet der Empfänger Blitzlicht- oder Vibrationssignale aus. Dies ist abhängig vom Empfängermodell.


Hinweis: Sobald Sie die Prüftaste des Rauchmelde-Senders loslassen, wird der Piepton nach einigen Sekunden ausgeschaltet.

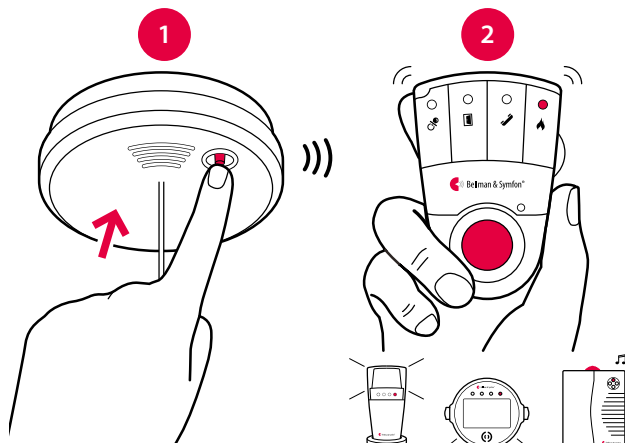

Mit dem Prüfaerosol für Rauchmelde-Sender

- 1 Sprühen Sie etwas Prüfaerosol in die Kammer und warten Sie fünf bis zehn Sekunden, bis der Rauchmelde-Sender einen Piepton ausgibt und ein Funksignal an den Empfänger sendet.
- 2 Die rote Visit-LED am Empfänger leuchtet auf und zeigt damit an, dass das Signal empfangen wurde. Zusätzlich sendet der Empfänger Blitzlicht- oder Vibrationssignale aus. Dies ist abhängig vom Empfängermodell.

Hinweis: Der Rauchmelde-Sender gibt einen Piepton aus und sendet das Signal an den Empfänger, solange sich Aerosol in der Kammer des Rauchmelde-Senders befindet.

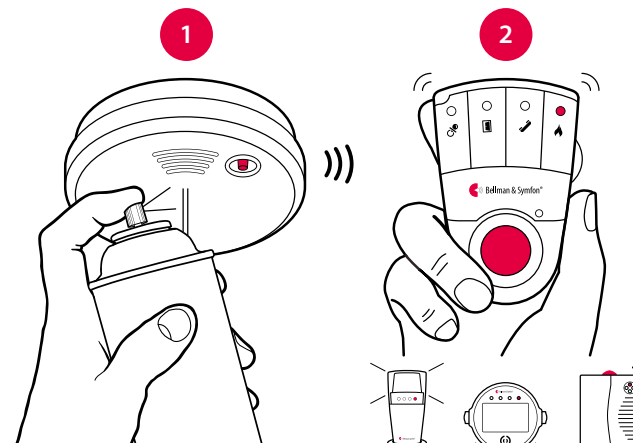

BE1480 Visit Rauchmelde-Sender

Standardmäßiges Signalmuster

Die LED des Rauchmelde-Senders blinkt einmal pro Minute rot und zeigt damit an, dass er korrekt funktioniert.

Je nach Alarm gibt es folgende Signalmuster:

Rauchmelde-Sender			Empfänger-Signalmuster			
Alarmtyp	LED	Ton	LED	Ton	Vibration	Blitzlicht
■ Feuer erkannt	Rotes Blinken	Feueralarm	Rotes Blinken	Feueralarm	Lang	■□□ Ja
■ Batterieladestand niedrig	2 x rotes Blinken	1 Piepton pro Minute	Rotes Blinken alle 5 s	Kein Signal	Kein Signal	□□□□ Kein Signal
■ Batterie leer	Rotes Blinken	1 Piepton pro Sekunde	Rotes Blinken alle 5 s	1 x Feueralarm	Langsam	■□□□ Kein Signal

Verwendung des Broadcast-Modus

Wenn das Signal des Rauchmelde-Senders an alle Visit-Empfänger in Reichweite gesendet werden soll, müssen Sie den Broadcast-Modus aktivieren. Damit werden die Funkfrequenzen außer Kraft gesetzt.

So aktivieren Sie den Broadcast-Modus:

- Stellen Sie den Funkfrequenzschalter Nr. 7 auf der Rückseite des Rauchmelde-Senders auf die obere Position (= Ein), um den Broadcast-Modus zu aktivieren.

Hinweis: Aktivierung über die Prüftasten und Batteriewarnungen werden nur an Geräte mit derselben Funkfrequenz übertragen.

Verwendung des Toaster-Modus

Um Fehlalarme z. B. beim Kochen zu vermeiden, können Sie die Empfindlichkeit des Rauchmelde-Senders vorübergehend verringern.

So aktivieren Sie den Toaster-Modus:


- Drücken Sie kurz die Prüftaste. Der Rauchmelde-Sender gibt einen Piepton aus und blinkt zweimal gelb. Im Toaster-Modus blinkt die LED dauerhaft rot.
- Drücken Sie erneut die Prüftaste, um den Toaster-Modus zu deaktivieren. Der Rauchmelde-Sender gibt einen Piepton aus und blinkt dreimal gelb.

Hinweis: Nach zwanzig Minuten schaltet sich der Toaster-Modus automatisch aus.

Installation des Rauchmelde-Senders

Befestigen Sie den Rauchmelde-Sender in der Mitte der Decke (außer in Schlafzimmern), wobei ein Mindestabstand von 50 cm zur Wand eingehalten werden muss. Wenn mehrere Schlafzimmer im Haus verteilt sind, empfehlen wir jeweils eigene Rauchmelde-Sender. Installieren Sie in mehrstöckigen Gebäuden mindestens einen Rauchmelde-Sender pro Etage.

Vermeiden Sie Küchen, Kamine und Garagen als Installationsorte, da Küchendunst, Wärmeentwicklung von Feuerstätten (wie Kamine) und Autoabgase zu Fehlalarmen führen können. Der Rauchmelde-Sender darf nicht in Feuchträumen, in der Nähe von Belüftungen/Ventilatoren oder in landwirtschaftlichen Gebäuden installiert werden.

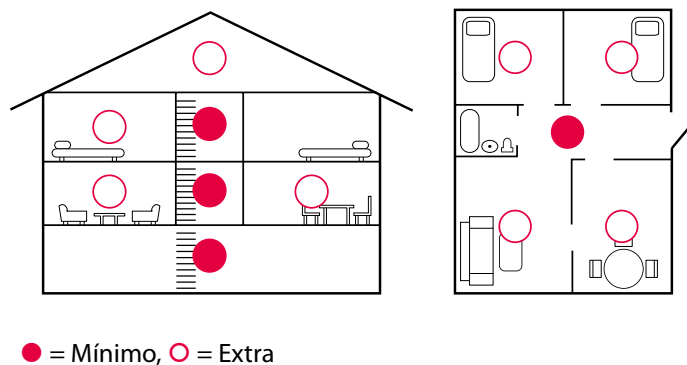

Prüfung und Wartung


Führen Sie regelmäßig Überprüfungen des/der Rauchmelde-Sender/s durch, am besten einmal pro Woche (z. B. beim Putzen), aber mindestens einmal pro Monat. Prüfen Sie das Gerät immer umgehend nach Phasen längerer Abwesenheit (z. B. nach dem Urlaub). Mit einem feuchten Tuch reinigen. Saugen Sie Ihren Rauchmelde-Sender bei jedem Batteriewechsel mit einem weichen Bürstenaufsatz des Staubsaugers aus. Rauchmelde-Sender niemals überstreichen!

Funkfrequenz ändern


Wenn Ihr Visit-System ohne Grund aktiviert wurde, ist vermutlich in der Nähe ein anderes System installiert, das Ihr System aktiviert. Um derartige Funkinterferenzen zu verhindern, müssen Sie an allen Geräten die Funkfrequenz ändern. Die Funkfrequenzschalter befinden sich auf der Rückseite des Rauchmelde-Senders.

So ändern Sie die Funkfrequenz:

- 1 Entfernen Sie die Montageplatte und stellen Sie einen der sechs Funkfrequenzschalter auf die obere Position (= Ein), um die Funkfrequenz zu ändern.
- 2 Halten Sie die Prüf-/Funktionstaste des Empfängers solange gedrückt, bis die grüne und die gelbe Visit-LED abwechselnd blinken. Lassen Sie die Taste los.
- 3 Halten Sie die Prüftaste des Rauchmelde-Senders länger als eine Sekunde gedrückt, um die neue Funkfrequenz zu übermitteln.
- 4 Am Empfänger blinken alle Visit-LEDs fünf Mal, um anzuzeigen, dass die Funkfrequenz geändert wurde. Anschließend kehrt das Gerät in den normalen Modus zurück.

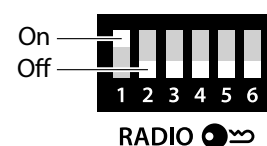

Hinweis: Um als Gruppe funktionieren zu können, muss an allen Visit-Geräten dieselbe Funkfrequenz eingestellt sein. Wenn der Broadcast-Modus aktiviert ist, reagieren alle Visit-Empfänger unabhängig von den Funkfrequenzeinstellungen.

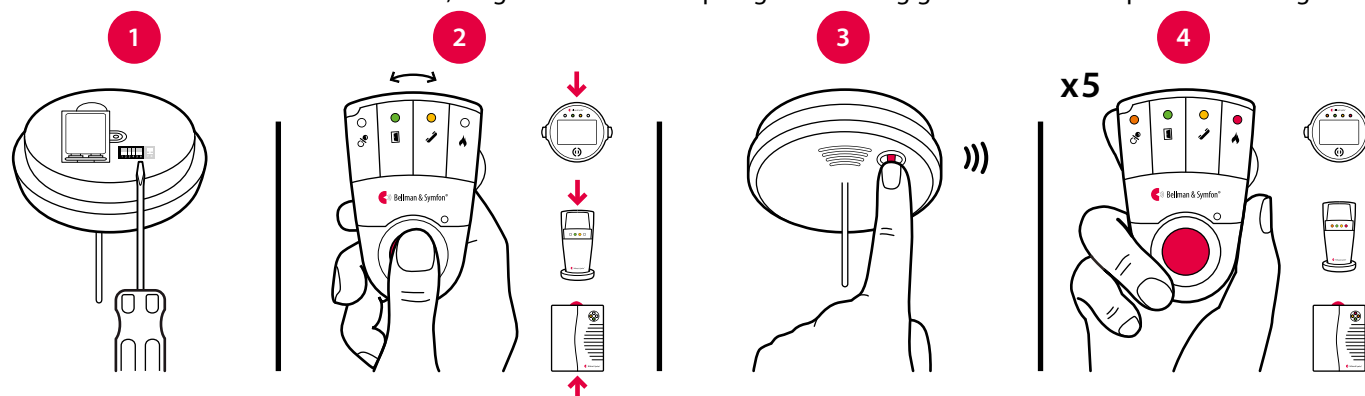


Fehlersuche

Die meisten Probleme lassen sich mit den nachstehenden Ratschlägen schnell beheben.

Problem	Lösung
Es passiert nichts, wenn ich die Prüftaste drücke.	Tauschen Sie die Batterie des Rauchmelde-Senders aus. Verwenden Sie eine Batterie vom Typ Duracell MN1604, Energizer 522 oder Ultralife U9VL-J.
Der Rauchmelde-Sender gibt einen Piepton aus, wenn ich die Prüftaste drücke, aber der Empfänger reagiert nicht.	- Stellen Sie sicher, dass die Antenne des Rauchmelde-Senders gerade nach unten ausgerichtet ist. - Überprüfen Sie die Batterien von Rauchmelde-Sender und Empfänger sowie die Verbindungen bzw. Anschlüsse. - Verringern Sie den Abstand zwischen Empfänger und Rauchmelde-Sender, um sicherzustellen, dass sie in Reichweite sind. - Stellen Sie sicher, dass die Geräte auf dieselbe Frequenz eingestellt sind, siehe Funkfrequenz ändern.
Der Empfänger wird ohne ersichtlichen Grund aktiviert.	- Tauschen Sie die Batterie aus. Verwenden Sie eine Batterie vom Typ Duracell MN1604, Energizer 522 oder Ultralife U9VL-J. - Wenn das Problem weiter besteht, ist vermutlich in der Nähe ein anderes Visit-System installiert, das Ihr System aktiviert. Ändern Sie bei allen Geräten die Funkfrequenz, siehe Funkfrequenz ändern.
Der Empfänger gibt ohne ersichtlichen Grund Pieptöne aus.	Der Rauchmelde-Sender ist defekt und muss zur Reparatur eingesendet werden.

Visit Tischblitzlampe

Tasten und Steuerelemente

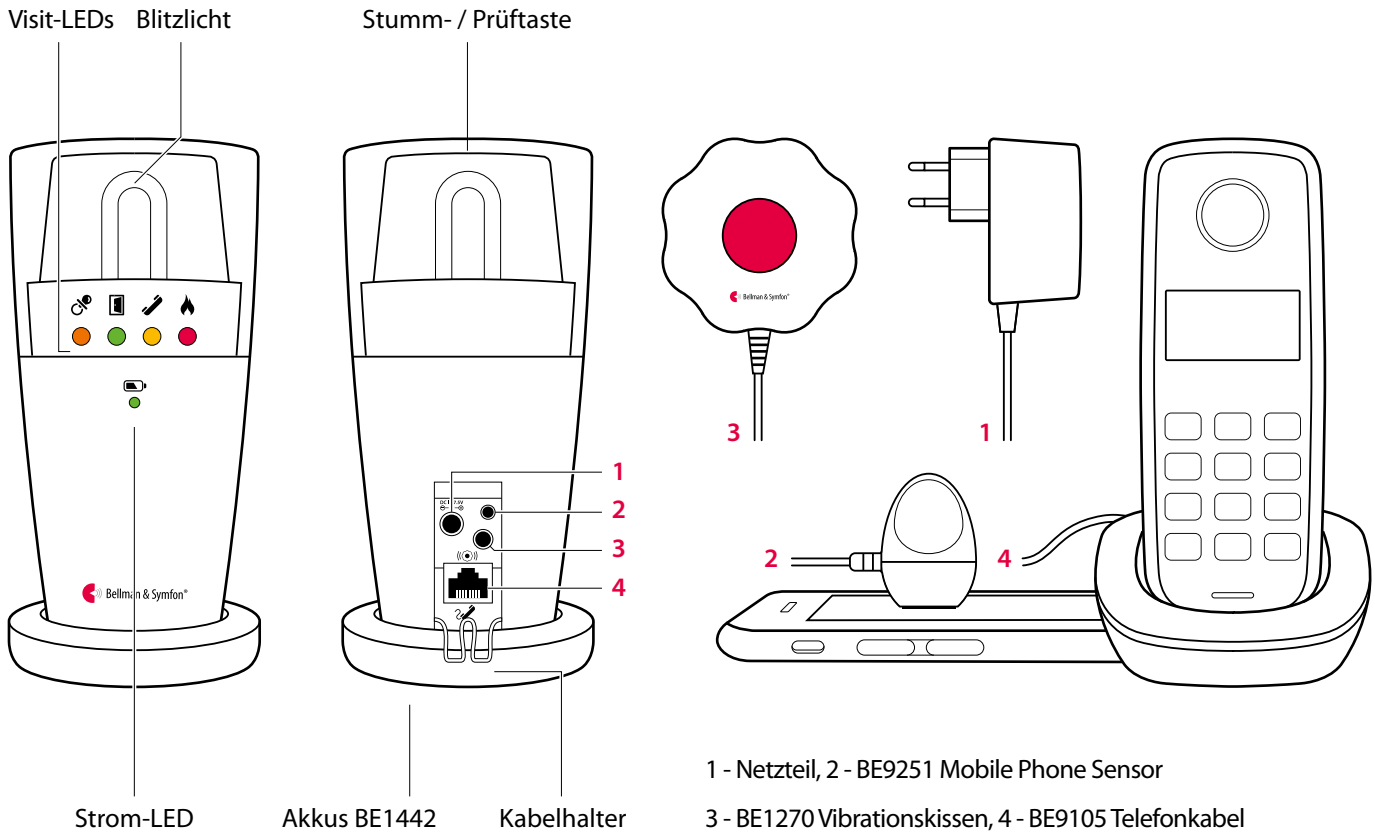

Technische Spezifikationen

Lieferumfang

- BE1441 Tischblitzlampe oder BE1442 Tischblitzlampe mit Ausfall-Akku
- Stromversorgung
- 4 x Akkus (1,2 V; AAA; NiMH) (nur Modell BE1442)

Strom und Batterie

- Netzstrom
7,5 V DC / 1500 mA
Externes Netzteil
- Stromverbrauch
Aktiv: 1250 mA, Ruhezustand: 10 mA
- Ausfall-Akkus (nur Modell BE1442)
4 x Akkus (1,2 V AAA NiMH)
- Betriebsdauer der Akkus ca. 48 h, wenn vollständig geladen

Abmessungen und Gewicht

- Höhe BE1441: 140 mm, 5,5 Zoll
BE1442: 155 mm, 6,1 Zoll
- Durchmesser BE1441: 70 mm, 2,7 Zoll
BE1442: 78 mm, 1,3 Zoll
- Gewicht 310 g, 10,9 oz.

Visit-LEDs

Die Visit-LEDs zeigen normalerweise Folgendes an:

- Orange LED, Schnuller-Symbol
Der Babyruf-Sender wurde aktiviert
- Grüne LED, Türsymbol
Der Tür-Sender wurde aktiviert
- Gelbe LED, Telefonsymbol
Der Telefon-Sender wurde aktiviert
- Rote LED, Feuersymbol
Der Rauchmelde-Sender wurde aktiviert

Zubehör

- BE9075 Wandkonsole
- BE1270 Vibrationskissen
- BE9251 Mobile Phone Sensor
- BE9105 Telefonkabel

Frequenz und Reichweite

- Funkfrequenz
314,91 MHz, 433,92 MHz oder 868,30 MHz, abhängig von der Region
- Reichweite
50 – 250 m (55 – 273 yd.)
abhängig von Funkfrequenz und Gebäudeeigenschaften

Ausgang


- Integriertes Xenon-Licht mit ca. 30 Candela **Warnung!** Blitzlichter können epileptische Anfälle hervorrufen.



BE1441 | BE1442

Erste Schritte

- 1 Verbinden Sie das Netzkabel mit dem Empfänger und schließen Sie es an eine Netzsteckdose an. Ziehen Sie die Batterielasche an der Unterseite heraus (nur BE1442). Stellen Sie den Empfänger auf einer flachen, ebenen Oberfläche auf oder installieren Sie ihn mit dem beiliegenden Wandkonsolen-Zubehör an der Wand (siehe separate Anweisungen).
- 2 Um die Funkverbindung überprüfen zu können, benötigen Sie einen Visit-Sender. Drücken Sie die Prüftaste/n des Senders.
- 3 Am Empfänger leuchtet eine Visit-LED auf und der Empfänger beginnt, zu blinken. Wenn ein Vibrationskissen angeschlossen ist, vibriert dieser Alarm. Durch kurzes Drücken der Stumm-/Prüftaste wird die letzte Signalausgabe wiederholt. Wenn nichts passiert, siehe **Fehlersuche**.

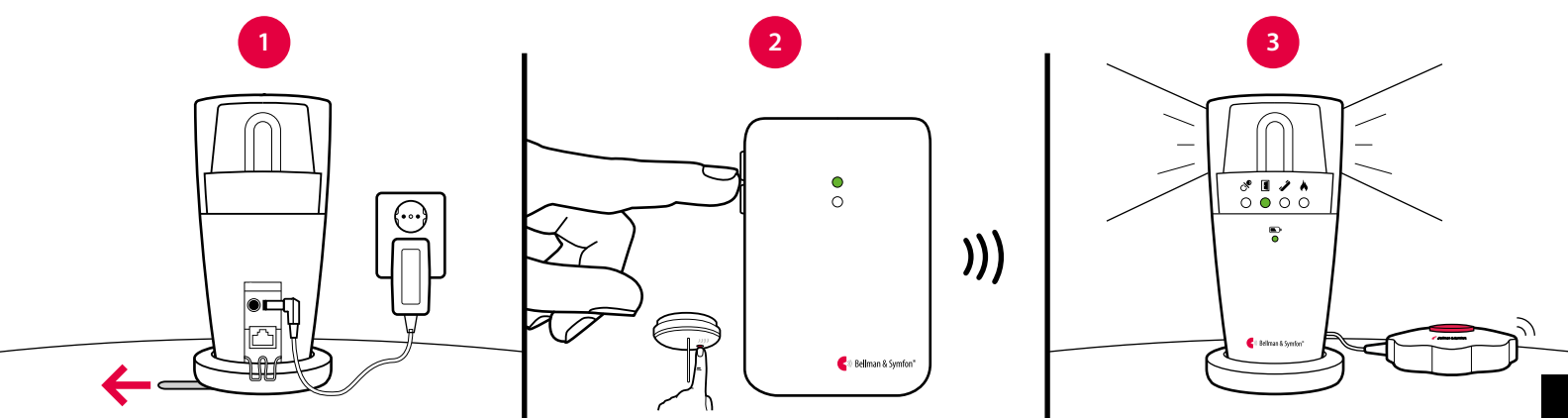

Standardmäßiges Signalmuster

Wenn ein Sender aktiviert wird, leuchtet eine LED an der Tischblitzlampe auf und das Vibrationskissen beginnt, mit einer bestimmten Geschwindigkeit zu vibrieren. Dies wird Signalmuster genannt. Der Sender gibt das Signalmuster vor, das standardmäßig wie folgt eingestellt ist:

Sender	Tischblitzlampe		Vibrationskissen
Aktivierte Quelle	Visit-LED	Blitzlicht	Vibration
■ Tür-Sender / Druckknopf-Sender	Grün	Ja	Langsam ■□□□
■ Telefon-Sender / angeschlossenes Telefon	Gelb	Ja	Mittel ■□■□
■ Babyruf-Sender	Orange	Ja	Schnell ■■■■■■
■ Rauchmelde-Sender	Rot	Ja	Lang ■■■■□

Signalmuster ändern

Das Signalmuster kann nur an den Sendern geändert werden. Siehe Signalmuster ändern für den jeweiligen Sender.

Strom-LED-Anzeigen

Wenn die Tischblitzlampe an den Netzstrom angeschlossen wird, leuchtet die Strom-LED grün auf. Das BE1442-Modell verfügt zudem über Ausfall-Akkus. Die Strom-LED zeigt Folgendes an:

Strom-LED	Status
■ Grünes Leuchten	Die Tischblitzlampe ist an den Netzstrom angeschlossen. Reservebatterien wurden erkannt.
■ Grünes Blinken	Die Tischblitzlampe ist an den Netzstrom angeschlossen. Es wurden keine Reservebatterien erkannt.
■ Rotes Leuchten	Die Tischblitzlampe läuft auf Reserve-Batterien.
■ Rotes Blinken	Die Reserve-Batterien sind fast leer.


Visit Tischblitzlampe

Funkfrequenz ändern


Wenn Ihr Visit-System ohne Grund aktiviert wurde, ist vermutlich in der Nähe ein anderes System installiert, das Ihr System aktiviert. Um derartige Funkinterferenzen zu verhindern, müssen Sie an allen Geräten die Funkfrequenz ändern. Die Funkfrequenzschalter befinden sich an den Sendern.

So ändern Sie die Funkfrequenz:

- 1 Öffnen Sie die Sender-Abdeckung und stellen Sie einen beliebigen Funkfrequenzschalter auf die obere Position (= Ein), um die Funkfrequenz zu ändern. Siehe Funkfrequenz ändern für den jeweiligen Sender.
- 2 Halten Sie die Stumm-/Prüftaste auf der Oberseite des Sender so lange gedrückt, bis die grüne und die gelbe Visit-LED abwechselnd blinken. Lassen Sie die Taste los.
- 3 Drücken Sie innerhalb von dreißig Sekunden am Empfänger die Prüftaste/n, um die neue Funkfrequenz zu übermitteln.
- 4 Am Empfänger blinken alle Visit-LEDs fünf Mal, um anzuzeigen, dass die Funkfrequenz geändert wurde. Anschließend kehrt das Gerät in den normalen Modus zurück.

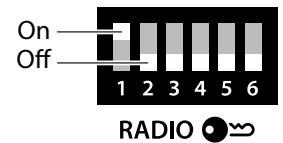


Hinweis: Um als Gruppe funktionieren zu können, muss an allen Visit-Geräten dieselbe Funkfrequenz eingestellt sein.

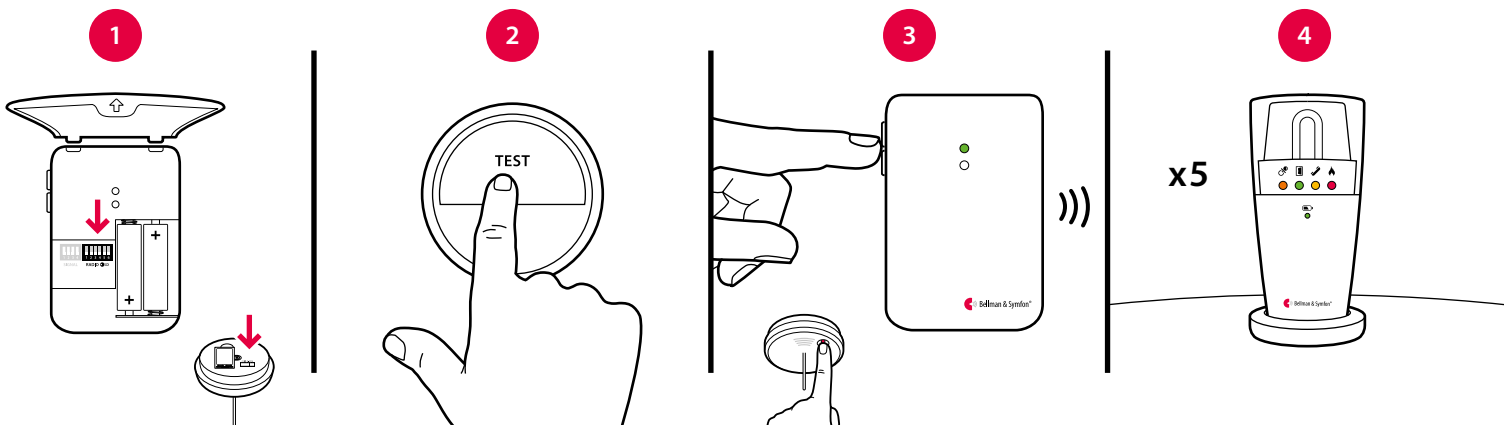

Zubehör

Die Tischblitzlampe kann mit dem folgenden Zubehör ergänzt werden:

- **BE1270 Vibrationskissen**
Weckt Sie mit Vibrationen unter dem Kissen oder der Matratze.
- **BE9250 Mobile Phone Sensor**
Legen Sie ihn auf Ihr Mobiltelefon oder Tablet und die Tischblitzlampe benachrichtigt Sie über eingehende Anrufe und Nachrichten.
- **BE9105 Telefonkabel**
Mit dem Kabel können Sie den Empfänger mit Ihrem Festnetztelefon verbinden und sich so mit Blitzlichtsignalen benachrichtigen lassen, wenn das Telefon klingelt.
- **BE9075 Wandkonsole**

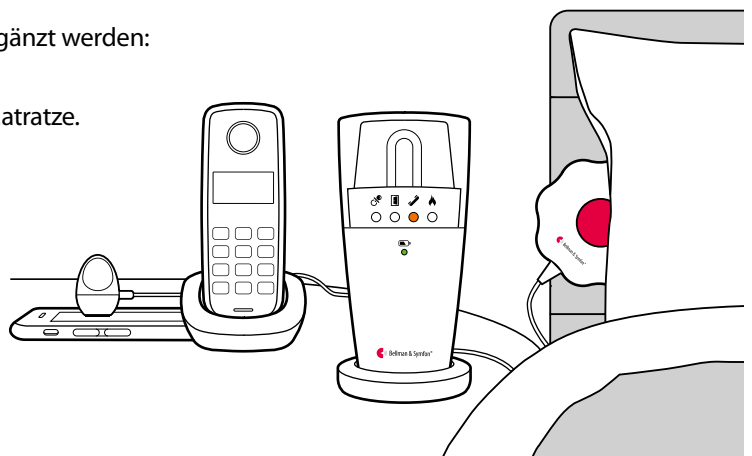

Blitzlicht ausrichten

Der Kopf der Tischblitzlampe ist drehbar, was eine einfache Ausrichtung des Lichts ermöglicht. So können Sie das Blitzlicht z. B. gegen eine Wand richten, wenn Sie es als zu stark empfinden. Für die Tischblitzlampe ist ebenfalls ein Silikon-Überzug in verschiedenen Farben erhältlich (Art.-Nr.: BE9164-BE9167).



Erweiterte Programmierung

Mit der erweiterten Programmierung können Sie das Signalmuster eines bestimmten Senders und für ein bestimmtes Ereignis sowie die angezeigten LED-Farben und das Vibrations-Signalmuster individuell nach Belieben anpassen. Die erweiterte Programmierung setzt die Funkfrequenz außer Kraft und verbindet die Geräte anhand der Seriennummer. Bitte beachten Sie, dass Rauchmelde-Sender aus Sicherheitsgründen nicht programmiert werden können.

Hinweis: Der Sender muss aktiviert werden, da er innerhalb des Systems darauf ausgelegt ist, das richtige Signal zu erzeugen. Dies bedeutet, dass Sie nicht immer die Sender-Prüftaste verwenden können (siehe **Standardmäßiges Signalmuster** für den jeweiligen Sender).

So programmieren Sie den Empfänger:

- 1 Halten Sie die Stumm-/Prüftaste des Empfängers gedrückt. Die grüne und die gelbe Visit-LED beginnen, abwechselnd zu blinken. Aktivieren Sie wie vorgesehen den gewünschten Sender, während Sie die Taste weiterhin gedrückt halten. Lassen Sie die Taste los.
- 2 Blättern Sie durch die verschiedenen **Visit-LED-Optionen**, indem Sie am Empfänger die Stumm-/Prüftaste drücken. Wählen Sie die gewünschte Visit-LED-Farbe aus, indem Sie die Stumm-/Prüftaste so lange gedrückt halten, bis die Strom-LED erlischt und wieder aufleuchtet.
- 3 Blättern Sie durch die verschiedenen **Vibrationssignal-Optionen**, indem Sie am Empfänger die Prüftaste drücken (Vibrationskissen erforderlich). Wählen Sie das gewünschte Vibrations-Signalmuster aus, indem Sie die Stumm-/Prüftaste so lange gedrückt halten, bis die Strom-LED erlischt und wieder aufleuchtet.
- 4 Der Empfänger zeigt jetzt die neue Visit-LED-Farbe und das neue Vibrations-Signalmuster an. Drücken Sie kurz die Stumm-/Prüftaste, um die Demonstration zu beenden. Nach kurzer Zeit kehrt das Gerät in den normalen Modus zurück.

Erweiterte Programmierung löschen

Befolgen Sie das nachstehende Verfahren zum Löschen der erweiterten Programmierung.

- 1 Halten Sie die Stumm-/Prüftaste des Empfängers so lange gedrückt, bis die grüne und die gelbe Visit-LED abwechselnd blinken. Lassen Sie die Taste los.
- 2 Drücken Sie die Stumm-/Prüftaste des Empfängers drei Mal in schneller Folge.
- 3 Alle LEDs blinken ca. zwei Sekunden lang und zeigen so an, dass die erweiterte Programmierung gelöscht wurde.


Fehlersuche

Die meisten Probleme lassen sich mit den nachstehenden Ratschlägen schnell beheben.

Problem	Lösung
Der Empfänger scheint ausgeschaltet zu sein.	▪ Überprüfen Sie, ob die Stromversorgung (bzw. das Netzteil) richtig angeschlossen ist. ▪ Laden Sie die Ausfall-Akkus mindestens 24 Stunden lang auf (nur BE1442).
Die Strom-LED blinkt rot.	▪ Die Ausfall-Akkus sind fast leer und die Stromversorgung (bzw. das Netzteil) ist nicht angeschlossen. Schließen Sie das Netzteil an und laden Sie die Ausfall-Akkus mindestens 24 Stunden lang auf.
Die Strom-LED blinkt grün.	▪ Der Empfänger erkennt keine Ausfall-Akkus. Ziehen Sie an der Batterielasche, siehe Erste Schritte.
Der Empfänger reagiert nicht, wenn ein Sender aktiviert wird, funktioniert aber, wenn ich die Prüftaste drücke.	▪ Überprüfen Sie die Batterien des Senders sowie die Verbindungen bzw. Anschlüsse. ▪ Verringern Sie den Abstand zwischen Empfänger und Sender, um sicherzustellen, dass sie in Reichweite sind. ▪ Überprüfen Sie, ob der Empfänger auf dieselbe Funkfrequenz eingestellt ist wie die anderen Geräte im Visit-System, siehe Funkfrequenz ändern.
Der Empfänger wird ohne ersichtlichen Grund aktiviert.	▪ Vermutlich ist in der Nähe ein anderes Visit-System installiert, das Ihr System aktiviert. Ändern Sie bei allen Geräten die Funkfrequenz, siehe Funkfrequenz ändern.
Das Blitzlicht ist zu grell.	▪ Richten Sie das Blitzlicht neu aus, indem Sie den Kopf schwenken, oder dämpfen Sie das Licht mit einem Silikon-Überzug.

Visit tragbarer Empfänger

Tasten und Steuerelemente

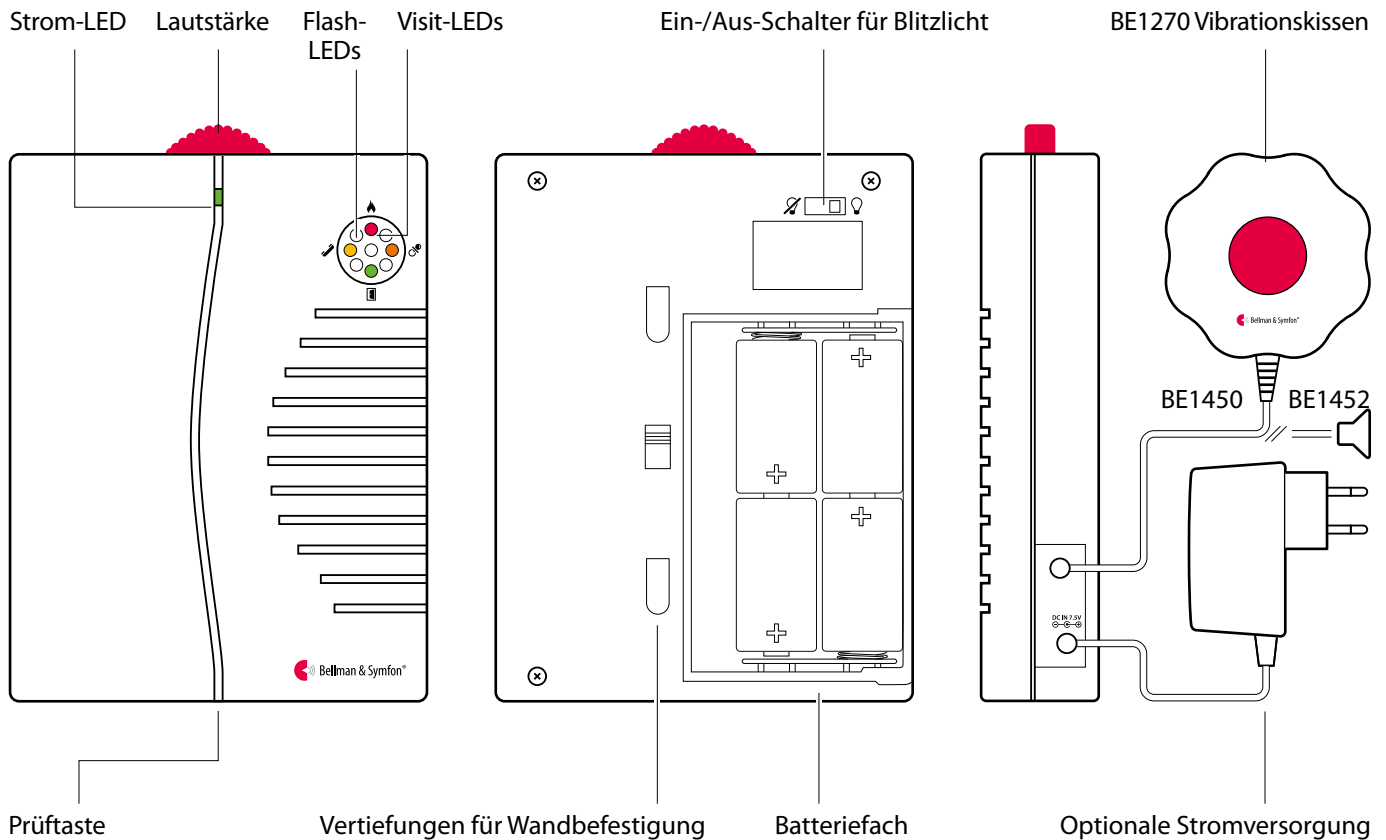

Technische Spezifikationen

Lieferumfang

- BE1450 Tragbarer Empfänger
- 4 x Batterien (1,5 V; LR14)
- Wandkonsole
- Schrauben und Wanddübel

Strom und Batterie

- Netzstrom
7,5 V DC / 1000 mA
Optionales Netzteil
Europa: BE9201, UK: BE9202
- Batteriestrom
4 x Alkaline-Batterien (1,5 V; LR14)
- Betriebsdauer
2 bis 3 Jahre mit Alkaline-Batterien
- Stromverbrauch
Aktiv: 1000 mA,
Ruhezustand: 0,1 mA

Abmessungen und Gewicht

- Höhe: 165 mm, 6,5 Zoll
- Breite: 130 mm, 5,1 Zoll
- Tiefe: 36 mm, 1,5 Zoll
- Gewicht: 590 g, 20,8 oz (inkl. Batterien)

Visit-LEDs

Die Visit-LEDs zeigen normalerweise Folgendes an:

- Orange LED, Schnuller-Symbol
Der Babyruf-Sender wurde aktiviert
- Grüne LED, Türsymbol
Der Tür-Sender wurde aktiviert
- Gelbe LED, Telefonsymbol
Der Telefon-Sender wurde aktiviert
- Rote LED, Feuersymbol
Der Rauchmelde-Sender wurde aktiviert

Ausgang

- Einstellbares Tonsignal
Max. 93 dBA bei 1 m,
Frequenzbereich: 500 bis 1000 Hz
- Ausgang Vibrationskissen:
2,0 bis 4,0 VDC oder
Lautsprecher-Ausgang:
10,0 kΩ, 0 – 4,0 V

Frequenz und Reichweite

- Funkfrequenz
314,91 MHz, 433,92 MHz und
868,30 MHz, abhängig von der Region
- Reichweite
50 – 250 m (55 – 273 yd.),
abhängig von Funkfrequenz und
Gebäudeeigenschaften

Zubehör


- BE1270 Vibrationskissen
- BE9201/BE9202 Netzteil



BE1450 | BE1452

Erste Schritte

- 1 Schieben Sie das Batteriefach auf, legen Sie die Batterien ein und schließen Sie das Fach wieder. Stellen Sie den Empfänger auf einer flachen, ebenen Oberfläche auf oder installieren Sie ihn mit der beiliegenden Wandkonsole an der Wand.
- 2 Um die Funkverbindung überprüfen zu können, benötigen Sie einen Visit-Sender. Drücken Sie die Prüftaste/n des Senders.
- 3 Am Empfänger leuchtet eine Visit-LED auf und der Empfänger beginnt, Blitz- und Tonsignale auszugeben. Wenn ein Vibrationskissen angeschlossen ist, vibriert dieser Alarm. Durch kurzes Drücken der Prüftaste wird die letzte Signalausgabe wiederholt. Wenn nichts passiert, siehe **Fehlersuche**.

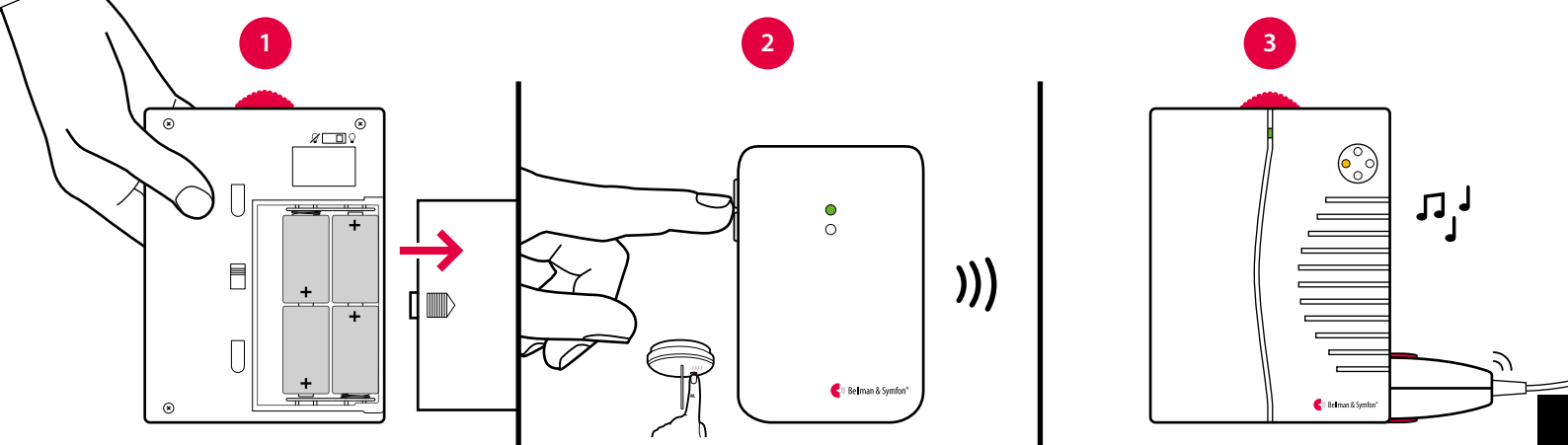

Standardmäßiges Signalmuster

Wenn ein Sender aktiviert wird, leuchtet eine LED an der Tischblitzlampe auf, der Empfänger beginnt, Blitz- und Tonsignale auszugeben, und das Vibrationskissen beginnt, mit einer bestimmten Geschwindigkeit zu vibrieren. Dies wird Signalmuster genannt. Der Sender gibt das Signalmuster vor, das standardmäßig wie folgt eingestellt ist:

Sender	Tragbarer Empfänger			Vibrationskissen
Aktivierte Quelle	Visit-LED	Ton	Blitzlicht	Vibration
■ Tür-Sender / Druckknopf-Sender	Grün	Türgong	Ja	Langsam ■ □ □ □
■ Telefon-Sender	Gelb	Klingelsignal	Ja	Mittel ■ □ ■ □
■ Babyruf-Sender	Orange	Babymelodie	Ja	Schnell ■ ■ ■ ■ ■ ■
■ Rauchmelde-Sender	Rot	Feueralarmsignal	Ja	Lang ■ ■ ■ ■

Signalmuster ändern

Das Signalmuster kann nur an den Sendern geändert werden. Siehe **Signalmuster ändern** für den jeweiligen Sender.

Lautstärke und Blitzlicht anpassen

Mit dem roten Lautstärkeregler auf der Oberseite des Empfängers können Sie die Lautstärke nach Wunsch anpassen. Die Lautstärke ist in einem Bereich von 0 bis 93 dBA (bei 1 m und einer Hauptfrequenz von 500 bis 1000 Hz) einstellbar. Mit dem Ein-/Aus-Schalter auf der Empfänger-Rückseite können Sie das Blitzlicht ein- und ausschalten.

Batterien ersetzen

Wenn die Strom-LED bei Einschalten des Empfängers gelb leuchtet, sind die Batterien fast leer. So ersetzen Sie die Batterien:

- Schieben Sie die Batterieabdeckung auf. Tauschen Sie die alten Batterien durch vier neue Alkaline-Batterien (1,5 V; LR14) aus, siehe die Angaben des Batteriefachs für korrekte Positionierung.



Visit tragbarer Empfänger

Funkfrequenz ändern

Wenn Ihr Visit-System ohne Grund aktiviert wurde, ist vermutlich in der Nähe ein anderes System installiert, das Ihr System aktiviert. Um derartige Funkinterferenzen zu verhindern, müssen Sie an allen Geräten die Funkfrequenz ändern. Die Funkfrequenzschalter befinden sich an den Sendern.

So ändern Sie die Funkfrequenz:


- 1 Öffnen Sie die Sender-Abdeckung und stellen Sie einen beliebigen Funkfrequenzschalter auf die obere Position (= Ein), um die Funkfrequenz zu ändern. Siehe Funkfrequenz ändern für den jeweiligen Sender.
- 2 Halten Sie die Prüftaste auf der Unterseite des tragbaren Empfängers so lange gedrückt, bis die grüne und die gelbe Visit-LED abwechselnd blinken. Lassen Sie die Taste los.
- 3 Drücken Sie innerhalb von dreißig Sekunden am Sender die Prüftaste/n, um die neue Funkfrequenz zu übermitteln.
- 4 Am Empfänger blinken alle Visit-LEDs fünf Mal, um anzuzeigen, dass die Funkfrequenz geändert wurde. Anschließend kehrt das Gerät in den normalen Modus zurück.

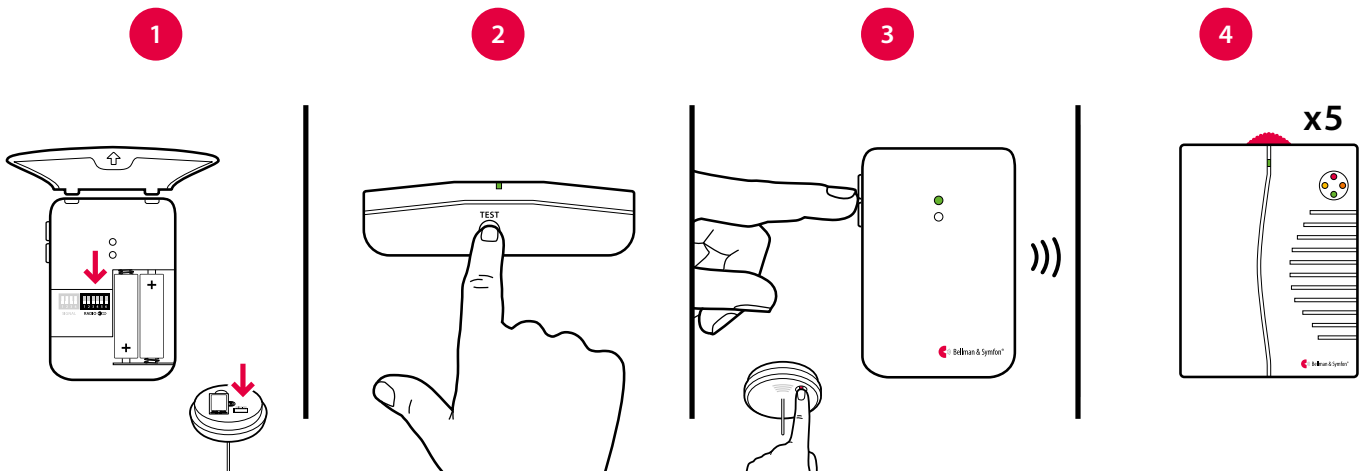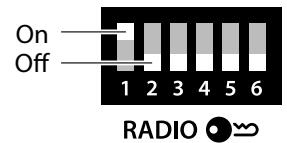

Zubehör

Der tragbare Empfänger kann mit dem folgenden Zubehör ergänzt werden:

- **BE1270 Vibrationskissen**
Weckt Sie durch Vibrationen, falls etwas passiert, während Sie schlafen. Schließen Sie das Vibrationskissen an den Empfänger an und schieben Sie es unter das Kopfkissen oder unter die Matratze Ihres Betts.
- **BE9201 EU / BE9202 Stromversorgung (UK)**
Wenn Ihr Empfänger immer am selben Platz steht, können Sie ihn an den Netzstrom anschließen und müssen sich keine Gedanken über Batterien machen.

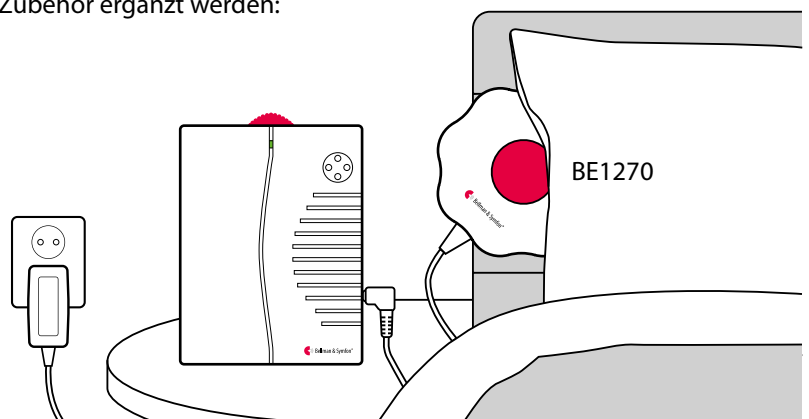



BE1450

Erweiterte Programmierung

Mit der erweiterten Programmierung können Sie das Signalmuster eines bestimmten Senders und für ein bestimmtes Ereignis sowie die angezeigten LED-Farben und das Ton- und Vibrations-Signalmuster individuell nach Belieben anpassen. Die erweiterte Programmierung setzt die Funkfrequenz außer Kraft und verbindet die Geräte anhand der Seriennummer. Bitte beachten Sie, dass Rauchmelde-Sender aus Sicherheitsgründen nicht programmiert werden können.

Hinweis: Der Sender muss aktiviert werden, da er innerhalb des Systems darauf ausgelegt ist, das richtige Signal zu erzeugen. Dies bedeutet, dass Sie nicht immer die Sender-Prüftaste verwenden können (siehe **Standardmäßiges Signalmuster** für den jeweiligen Sender).

So programmieren Sie den Empfänger:

- 1 Halten Sie die Prüftaste des Empfängers gedrückt. Die grüne und die gelbe Visit-LED beginnen, abwechselnd zu blinken. Aktivieren Sie wie vorgesehen den gewünschten Sender, während Sie die Taste weiterhin gedrückt halten. Die Strom-LED am Empfänger leuchtet gelb auf, um anzuzeigen, dass Sie sich im erweiterten Programmiermodus befinden. Lassen Sie die Taste los.
- 2 Blättern Sie durch die verschiedenen **Visit-LED-Optionen**, indem Sie am Empfänger die Prüftaste drücken. Wählen Sie die gewünschte Visit-LED-Farbe aus, indem Sie die Prüftaste so lange gedrückt halten, bis die Strom-LED erlischt und wieder aufleuchtet.
- 3 Blättern Sie durch die verschiedenen **Ton-Optionen**, indem Sie am Empfänger die Prüftaste drücken. Wählen Sie den gewünschten Ton aus, indem Sie die Prüftaste so lange gedrückt halten, bis die Strom-LED erlischt und wieder aufleuchtet.
- 4 Blättern Sie durch die verschiedenen **Vibrationssignal-Optionen**, indem Sie am Empfänger die Prüftaste drücken (Vibrationskissen erforderlich). Wählen Sie das gewünschte Vibrations-Signalmuster aus, indem Sie die Prüftaste so lange gedrückt halten, bis die Strom-LED erlischt und wieder aufleuchtet.
- 5 Der Empfänger zeigt jetzt die neue Visit-LED-Farbe sowie das neue Ton- und Vibrations-Signalmuster an. Drücken Sie kurz die Prüftaste, um die Demonstration zu beenden. Nach kurzer Zeit kehrt das Gerät in den normalen Modus zurück.

Erweiterte Programmierung löschen

Befolgen Sie das nachstehende Verfahren zum Löschen der erweiterten Programmierung.


- 1 Halten Sie die Prüftaste des Empfängers solange gedrückt, bis die grüne und die gelbe Visit-LED abwechselnd blinken. Lassen Sie die Taste los.
- 2 Drücken Sie die Prüftaste des Empfängers drei Mal in schneller Folge.
- 3 Alle Visit-LEDs blinken ca. zwei Sekunden lang und zeigen so an, dass die erweiterte Programmierung gelöscht wurde.

Fehlersuche

Problem	Lösung
Der Empfänger scheint ausgeschaltet zu sein.	▪ Die Batterien sind leer. Ersetzen Sie sie mit vier Alkaline-Batterien (1,5 V; LR14).
Bei Aktivierung des Empfängers leuchtet die Strom-LED gelb.	▪ Der Batterieladestand ist niedrig. Ersetzen Sie sie mit vier Alkaline-Batterien (1,5 V; LR14).
Der Empfänger reagiert nicht, wenn ein Sender aktiviert wird, funktioniert aber, wenn ich die Prüftaste drücke.	▪ Überprüfen Sie die Batterien des Senders sowie die Verbindungen bzw. Anschlüsse. ▪ Verringern Sie den Abstand zwischen Empfänger und Sender, um sicherzustellen, dass sie in Reichweite sind. ▪ Überprüfen Sie, ob der Empfänger auf dieselbe Funkfrequenz eingestellt ist wie die anderen Geräte im Visit-System, siehe Funkfrequenz ändern.
Der Empfänger wird ohne ersichtlichen Grund aktiviert.	▪ Vermutlich ist in der Nähe ein anderes Visit-System installiert, das Ihr System aktiviert. Ändern Sie bei allen Geräten die Funkfrequenz, siehe Funkfrequenz ändern.
Der Empfänger ist zu leise.	▪ Stellen Sie die Lautstärke mit dem roten Lautstärkeregler auf der Oberseite des Empfängers lauter.
Der Empfänger gibt keine Blitzlicht-Signale aus.	▪ Vergewissern Sie sich, dass der Blitzlichtsignal-Schalter auf der Rückseite des Geräts auf der ON- Position (= Ein) steht.

Visit Pager-Empfänger

Tasten und Steuerelemente

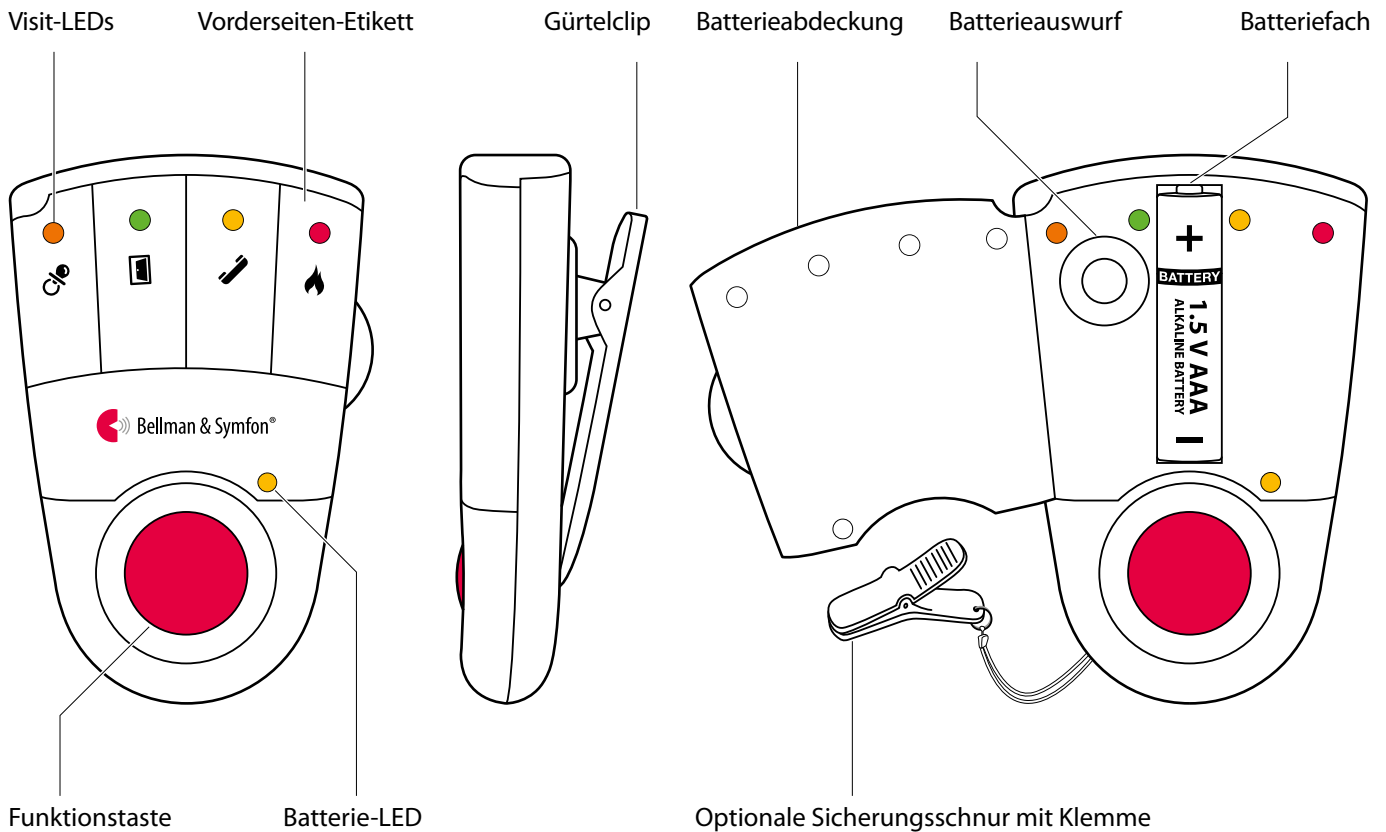

Technische Spezifikationen

Lieferumfang:

- BE1470 Visit Pager-Empfänger
- Sicherungsschnur mit Klemme
- Zweites Vorderseiten-Etikett

Strom und Batterie

- Netzstrom
7,5 V DC 200 mA mit Ladegerät
- Batteriestrom
1 x Alkaline (1,5 V; AAA) oder
nachladbare NiMH-Akku
(1,2 V; AAA)
- Betriebsdauer
Alkaline-Batterie: 2 bis 3 Wochen
NiMH-Akku:
ca. 1 Woche Stromverbrauch
- Stromverbrauch
Aktiv: ≤ 200 mA, Ruhezustand: ≤ 1 mA

Abmessungen und Gewicht

- Höhe: 86 mm, 3,4 Zoll
- Breite: 57 mm, 2,2 Zoll
- Tiefe: 29 mm, 1,1 Zoll
- Gewicht: 70 g, 2,5 oz (inkl. Batterien)

Visit-LEDs

Die Visit-LEDs zeigen normalerweise Folgendes an:

- Orange LED, Schnuller-Symbol
Der Babyruf-Sender wurde aktiviert
- Grüne LED, Türsymbol
Der Tür-Sender wurde aktiviert
- Gelbe LED, Telefonsymbol
Der Telefon-Sender wurde aktiviert
- Rote LED, Feuersymbol
Der Rauchmelde-Sender wurde aktiviert

Umgebung

- Nur für den Innengebrauch
Betriebstemperatur
15 °C bis 35 °C (59 °F bis 95 °F)
- Relative Luftfeuchtigkeit
5 % bis 95 % (nicht kondensierend)

Frequenz und Reichweite


- Funkfrequenz
314,91 MHz, 433,92 MHz oder
868,30 MHz, abhängig von der
Region
- Reichweite
50 – 250 m (55 – 273 yd.),
abhängig von Funkfrequenz und
Gebäudeeigenschaften

Zubehör

- BE1260 Pager-Ladegerät
- BE1270 Vibrationskissen

Erste Schritte

- 1 Öffnen Sie das Batteriefach, legen Sie die Batterie ein und schließen Sie das Fach wieder. Befestigen Sie den Pager mit dem Gürtelclip an Ihrem Gürtel. Für zusätzliche Sicherung gegen Verlust können Sie die beiliegende Sicherungsschnur verwenden.
- 2 Um die Funkverbindung überprüfen zu können, benötigen Sie einen Visit-Sender. Drücken Sie die Prüftaste/n des Senders.
- 3 Der Pager beginnt zu vibrieren und die Visit-LED leuchtet auf. Wenn während des Ladens ein Vibrationskissen angeschlossen ist, vibriert dieses. Wenn nichts passiert, siehe **Fehlersuche**.

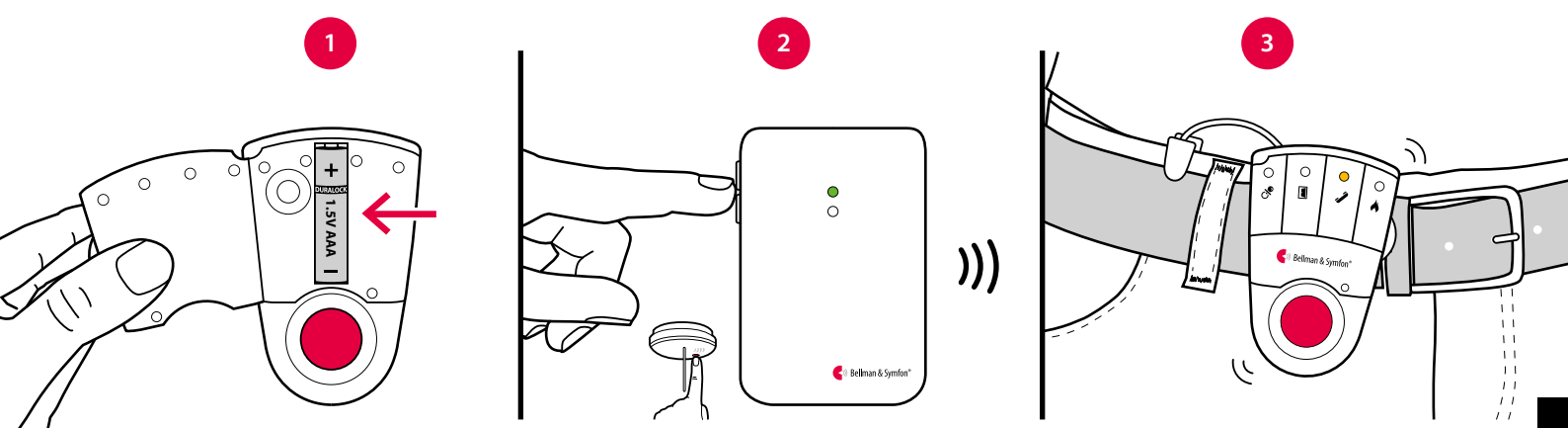

Standardmäßiges Signalmuster

Wenn ein Sender aktiviert wird, leuchtet die LED am Pager auf und der Pager beginnt, mit einer bestimmten Geschwindigkeit zu vibrieren. Dies wird Signalmuster genannt. Der Sender gibt das Signalmuster vor, das standardmäßig wie folgt eingestellt ist:

Aktivierter Sender	Pager-LED	Pager- / Vibrationskissen Vibration
■ Tür-Sender	Grün	Langsam ■□□□
■ Druckknopf-Sender	Grün	Langsam ■□□□
■ Telefon-Sender	Gelb	Mittel ■□■□
■ Babyruf-Sender	Orange	Schnell ■□■□■□
■ Rauchmelde-Sender	Rot	Lang ■■■□

Signalmuster ändern

Das Signalmuster kann nur an den Sendern geändert werden. Siehe **Signalmuster ändern** für den jeweiligen Sender.

Vorderseiten-Etikett wechseln

Wenn Sie Visit für andere Zwecke verwenden möchten, können Sie das Vorderseiten-Etikett austauschen. So wechseln Sie das Etikett:

- Öffnen Sie das Batteriefach, ersetzen Sie das originale durch das beiliegende zweite Etikett und schließen Sie das Fach wieder.

Batterie ersetzen

Wenn die Batterie-LED beginnt, gelb zu blinken, ist die Batterie fast leer. So ersetzen Sie die Batterie:

- Öffnen Sie das Batteriefach und drücken Sie die Auswurfaste, um die Batterie zu entfernen. Legen Sie eine Alkaline-Batterie (1,5 V; AAA) oder eine nachladbare NiMH-Akku (1,2 V; AAA) ein, wenn Sie das Ladegerät BE1260 verwenden.


Visit Pager-Empfänger

Funkfrequenz ändern


Wenn Ihr Visit-System ohne Grund aktiviert wurde, ist vermutlich in der Nähe ein anderes System installiert, das Ihr System aktiviert. Um derartige Funkinterferenzen zu verhindern, müssen Sie an allen Geräten die Funkfrequenz ändern. Die Funkfrequenzschalter befinden sich an den Sendern.

So ändern Sie die Funkfrequenz:

- 1 Öffnen Sie die Sender-Abdeckung und stellen Sie einen beliebigen Funkfrequenzschalter auf die obere Position (= Ein), um die **Funkfrequenz zu ändern**. Siehe Funkfrequenz ändern für den jeweiligen Sender.
- 2 Halten Sie die Funktionstaste des Pagers solange gedrückt, bis die grüne und die gelbe Visit-LED abwechselnd blinken. Lassen Sie die Taste los.
- 3 Drücken Sie innerhalb von dreißig Sekunden am Sender die Prüftaste/n, um die neue Funkfrequenz zu übermitteln.
- 4 Am Pager blinken alle Visit-LEDs fünf Mal, um anzuzeigen, dass die Funkfrequenz geändert wurde. Anschließend kehrt das Gerät in den normalen Modus zurück.

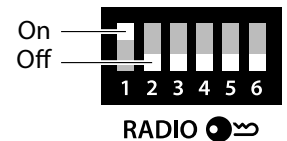

Hinweis: Um als Gruppe funktionieren zu können, muss an allen Visit-Geräten dieselbe Funkfrequenz eingestellt sein.

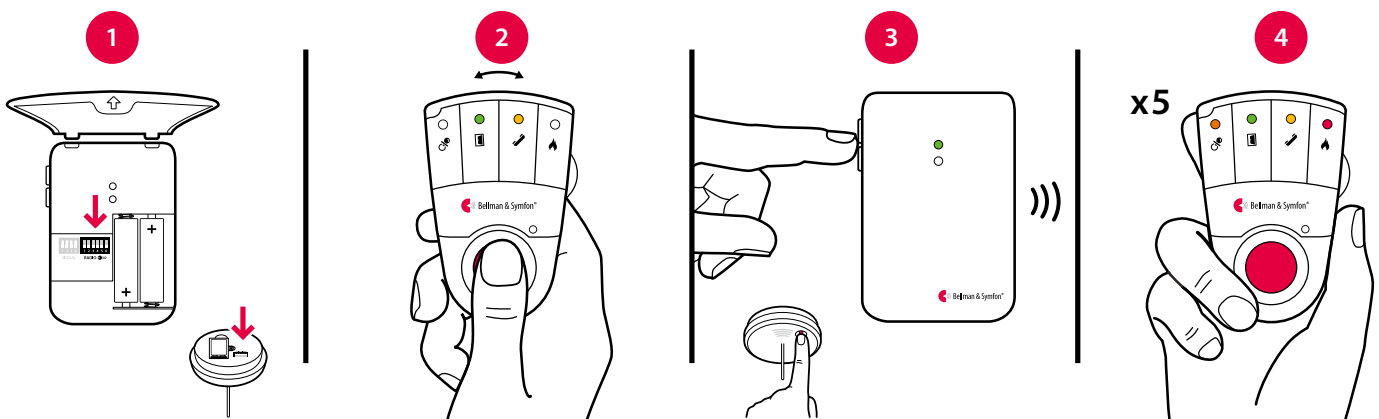

Pager-Zubehör


Der Pager kann mit dem folgenden Zubehör ergänzt werden:

■ BE1260 Pager-Ladegerät

Lädt Ihren Pager über Nacht auf. Sie können es auf dem Nachttisch platzieren und maximal zwei Vibrationskissen anschließen. Bitte beachten Sie, dass der Pager während des Ladevorgangs nicht vibriert, die Visit-LED funktioniert jedoch wie gewohnt.

■ BE1270 Vibrationskissen

Weckt Sie durch Vibrationen, falls etwas passiert, während Sie schlafen. Schließen Sie das Vibrationskissen an das Pager-Ladegerät an und schieben Sie es unter das Kopfkissen oder unter die Matratze Ihres Betts.

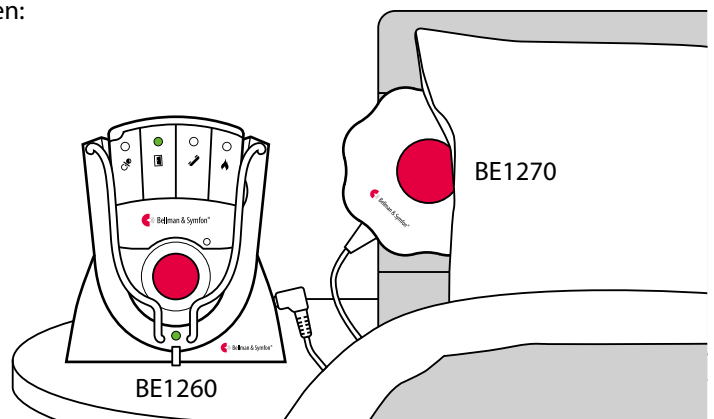

Warnung! Bei Verwendung des Pager-Ladegeräts dürfen Sie **AUSSCHLIESSLICH NACHLADBARE NiMH-Akkus** im Pager verwenden. Nicht-nachladbare Batterien laufen aus, wenn der Pager in das Ladegerät eingelegt wird, und die auslaufende Batteriesäure beschädigt die Elektronik. Daraus resultierende Schäden sind von der Garantie ausgeschlossen.

Erweiterte Programmierung

Mit der erweiterten Programmierung können Sie das Signalmuster eines bestimmten Senders und für ein bestimmtes Ereignis sowie die angezeigten LED-Farben und das Vibrations-Signalmuster individuell nach Belieben anpassen. Die erweiterte Programmierung setzt die Funkfrequenz außer Kraft und verbindet die Geräte anhand der Seriennummer. Bitte beachten Sie, dass Rauchmelde-Sender aus Sicherheitsgründen nicht programmiert werden können.

Hinweis: Der Sender muss aktiviert werden, da er innerhalb des Systems darauf ausgelegt ist, das richtige Signal zu erzeugen. Dies bedeutet, dass Sie nicht immer die Sender-Prüftaste verwenden können (siehe **Standardmäßiges Signalmuster** für den jeweiligen Sender).

So programmieren Sie den Pager:

- 1 Halten Sie die Funktionstaste des Pagers gedrückt. Die grüne und die gelbe Visit-LED beginnen abwechselnd zu blinken. Aktivieren Sie wie vorgesehen den gewünschten Sender, während Sie die Taste weiterhin gedrückt halten. Die gelbe Batterie-LED am Pager leuchtet auf, um anzuzeigen, dass Sie sich im erweiterten Programmiermodus befinden. Lassen Sie die Taste los.
- 2 Blättern Sie durch die verschiedenen Visit-LED-Optionen, indem Sie am Empfänger die Funktionstaste drücken. Wählen Sie das gewünschte Visit-LED-Signalmuster aus, indem Sie die Funktionstaste so lange gedrückt halten, bis die Batterie-LED erlischt und wieder aufleuchtet.
- 3 Blättern Sie durch die verschiedenen Vibrations-Optionen, indem Sie am Pager die Funktionstaste drücken. Wählen Sie das gewünschte Vibrations-Signalmuster aus, indem Sie die Funktionstaste so lange gedrückt halten, bis die Batterie-LED erlischt und wieder aufleuchtet.
- 4 Der Pager zeigt jetzt die neue Visit-LED-Farbe und das neue Vibrations-Signalmuster an. Drücken Sie kurz die Funktionstaste, um die Demonstration zu beenden. Nach kurzer Zeit kehrt der Pager in den normalen Modus zurück.

Erweiterte Programmierung löschen

Befolgen Sie das nachstehende Verfahren zum Löschen der erweiterten Programmierung.

- 1 Halten Sie die Funktionstaste des Pagers solange gedrückt, bis die grüne und die gelbe Visit-LED abwechselnd blinken. Lassen Sie die Taste los.
- 2 Drücken Sie die Funktionstaste des Pagers drei Mal in schneller Folge.
- 3 Alle Visit-LEDs blinken ca. zwei Sekunden lang und zeigen so an, dass die erweiterte Programmierung gelöscht wurde.


Fehlersuche

Die meisten Probleme lassen sich mit den nachstehenden Ratschlägen schnell beheben.

Problem	Lösung
Der Pager scheint ausgeschaltet zu sein.	▪ Die Batterie ist leer. Ersetzen Sie sie mit einer Alkaline-Batterie (1,5 V; AAA).  Wichtig! Wenn Sie ein Pager-Ladegerät haben, dürfen Sie ausschließlich nachladbare NiMH-Akkus (1,2 V; AAA) für den Pager verwenden.
Die Batterie-LED blinkt gelb.	▪ Der Batterieladestand ist niedrig. Ersetzen Sie sie mit einer Alkaline-Batterie (1,5 V; AAA).  Wichtig! Wenn Sie ein Pager-Ladegerät haben, dürfen Sie ausschließlich nachladbare NiMH-Akkus (1,2 V; AAA) für den Pager verwenden.
Der Pager reagiert nicht, wenn ein Sender aktiviert wird.	▪ Überprüfen Sie die Batterien der Sender. ▪ Verringern Sie den Abstand zwischen Pager und Sender, um sicherzustellen, dass sie in Reichweite sind. ▪ Überprüfen Sie, ob der Pager auf dieselbe Funkfrequenz eingestellt ist wie die anderen Geräte im Visit-System, siehe Funkfrequenz ändern.
Der Pager wird ohne ersichtlichen Grund aktiviert.	▪ Vermutlich ist in der Nähe ein anderes Visit-System installiert, das Ihr System aktiviert. Ändern Sie bei allen Geräten die Funkfrequenz, siehe Funkfrequenz ändern.

Visit Armband-Empfänger

Tasten und Steuerelemente

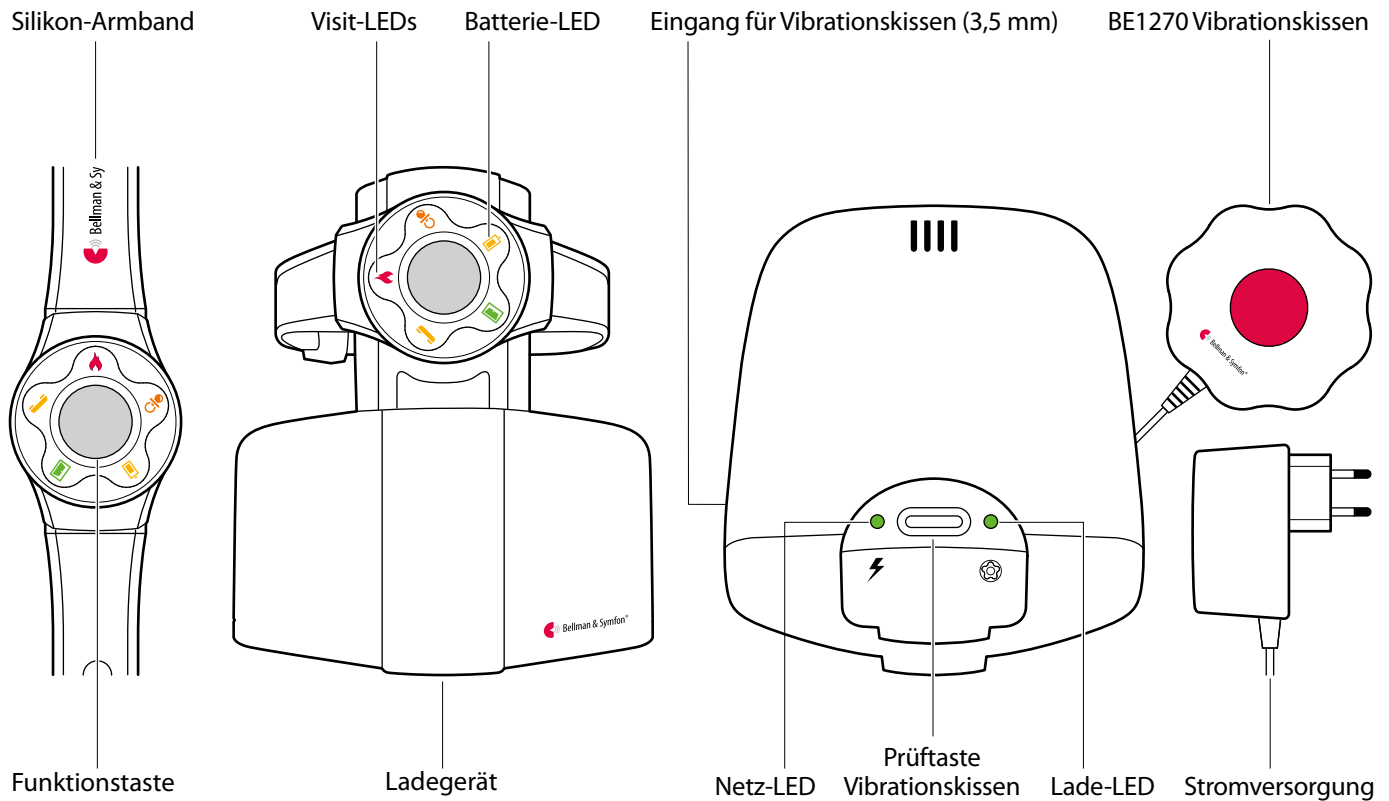

Technische Spezifikationen

Lieferumfang

- BE1560 Visit-Armband-Empfänger
- BE1570 Ladegerät
- Elastisches Armband
- Stromversorgung

Strom und Batterie

- Netzstrom: 7,5 V DC / 1500 mA
- Stromverbrauch
Empfänger: Aktiv: 100 mA, Ruhezustand: 3 mA
Ladegerät: Aktiv: 650 mA, Ruhezustand: 70 mA
- Batteriestrom
Empfänger: 1 x nachladbarer Knopfakku (1,2 V; V40H)
Ladegerät: 4 x nachladbare NiMH Akkus (1,2 V; NiMH)
- Betriebs- und Ladedauer
Receiver: ca. 30 h, Ladedauer: ca. 8 h
Ladegerät: Ladedauer des Akkus: ca. 24 h

Abmessungen und Gewicht

	Empfänger	Ladegerät
■ Höhe	49 mm	100 mm
■ Breite	38 mm	95 mm
■ Tiefe	12 mm	117 mm
■ Gewicht	27 g	185 g

Visit-LEDs

Die Visit-LEDs zeigen normalerweise Folgendes an:

- Orange LED, Schnuller-Symbol
Der Babyruf-Sender wurde aktiviert
- Grüne LED, Türsymbol
Der Tür-Sender wurde aktiviert
- Gelbe LED, Telefonsymbol
Der Telefon-Sender wurde aktiviert
- Rote LED, Feuersymbol
Der Rauchmelde-Sender wurde aktiviert

Umgebung

- Nur für den Innengebrauch
Betriebstemperatur
15 °C bis 35 °C (59 °F bis 95 °F)
- Relative Luftfeuchtigkeit
5 % bis 95 %
(nicht kondensierend)

Frequenz und Reichweite


- Funkfrequenz
314,91 MHz, 433,92 MHz und
868,30 MHz, abhängig von der
Region
- Reichweite
50 – 100 m (55 – 110 yd.),
abhängig von Funkfrequenz und
Gebäudeeigenschaften

Zubehör

- BE1270 Vibrationskissen
- BE9086 Kabel für externen Trigger

Erste Schritte

- 1 Ziehen Sie die Batterielasche heraus und schließen Sie das Netzteil an eine Netzsteckdose an. Die Netz-LED leuchtet grün auf. Legen Sie den Armband-Empfänger in das Ladegerät und laden Sie ihn mindestens 2 Stunden lang auf. Während des Ladevorgangs leuchtet die Lade-LED grün.
- 2 Um die Funkverbindung überprüfen zu können, benötigen Sie einen Visit-Sender. Drücken Sie die Prüftaste/n des Senders.
- 3 Der Empfänger beginnt zu vibrieren und die Visit-LED leuchtet auf. Wenn während des Ladens ein Vibrationskissen angeschlossen ist, vibriert dieser Alarm. Wenn nichts passiert, siehe **Fehlersuche**.

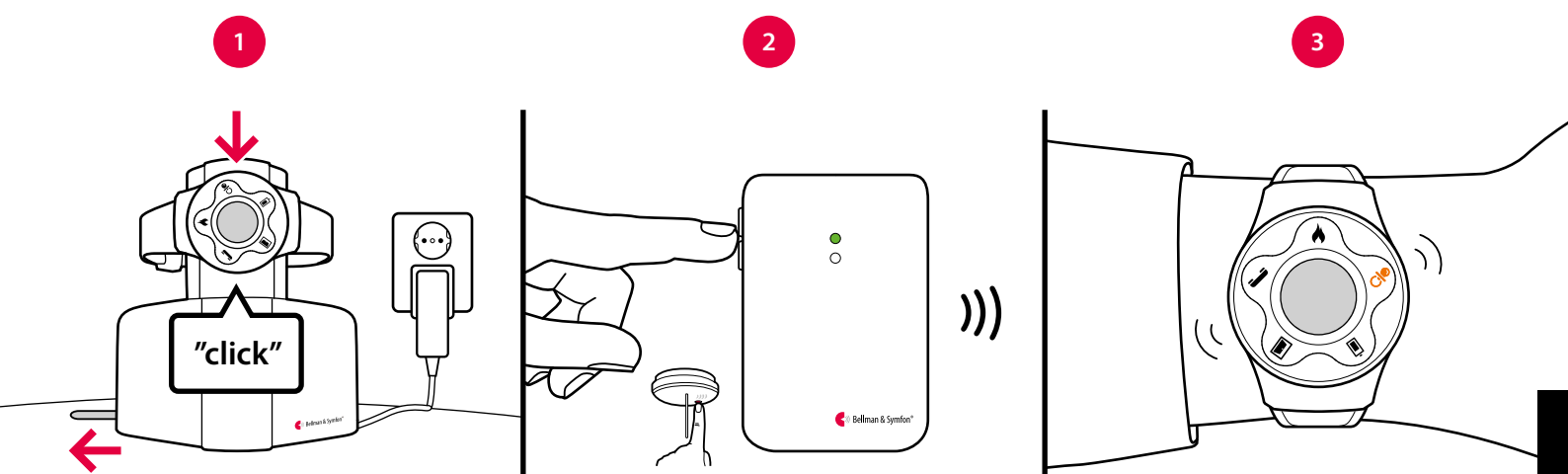

Standardmäßiges Signalmuster

Wenn ein Sender aktiviert wird, leuchtet eine LED am Empfänger auf und der Empfänger beginnt, mit einer bestimmten Geschwindigkeit zu vibrieren. Dies wird Signalmuster genannt. Der Sender gibt das Signalmuster vor, das standardmäßig wie folgt eingestellt ist:

Aktivierter Sender

- Tür-Sender
- Druckknopf-Sender
- Telefon-Sender
- Babyruf-Sender
- Rauchmelde-Sender

Armband-Empfänger-LED

- Grün
- Grün
- Gelb
- Orange
- Rot

Armband-Empfänger-/Vibrationskissen- Vibration

- Langsam ■■■■
- Langsam ■■■■
- Mittel ■■■■
- Schnell ■■■■
- Lang ■■■■

Signalmuster ändern

Das Signalmuster kann nur an den Sendern geändert werden. Siehe Signalmuster ändern für den jeweiligen Sender.

LED-Anzeigen

Die Batterie-LED beginnt gelb zu blinken, wenn die Batterie des Armband-Empfängers fast leer ist. Die Ladedauer beträgt bis zu acht Stunden. Das Ladegerät verfügt über einen Ausfall-Akku und die Lade-LED zeigt Folgendes an:

LED

- Lade-LED
- Netz-LED
- Netz-LED

Anzeige

- Grünes Leuchten
- Grünes Leuchten
- Grünes Blinken

Status

- Der Empfänger-Akku wird geladen.
- Das Ladegerät wird mit Netzstrom versorgt.
- Das Ladegerät wird von den Ausfall-Akkus mit Strom versorgt.

Visit Armband-Empfänger



Funkfrequenz ändern

Wenn Ihr Visit-System ohne Grund aktiviert wurde, ist vermutlich in der Nähe ein anderes System installiert, das Ihr System aktiviert. Um derartige Funkinterferenzen zu verhindern, müssen Sie an allen Geräten die Funkfrequenz ändern. Die Funkfrequenzschalter befinden sich an den **Sendern**.

So ändern Sie die Funkfrequenz:

- 1 Öffnen Sie die Sender-Abdeckung und stellen Sie einen beliebigen Funkfrequenzschalter auf die obere Position (= Ein), um die Funkfrequenz zu ändern. Siehe Funkfrequenz ändern für den jeweiligen Sender.
- 2 Halten Sie die Funktionstaste des Armband-Empfängers so lange gedrückt, bis die grüne und die gelbe Visit-LED abwechselnd blinken. Lassen Sie die Taste los.
- 3 Drücken Sie innerhalb von dreißig Sekunden am Sender die Prüftaste/n, um die neue Funkfrequenz zu übermitteln.
- 4 Am Empfänger blinken alle Visit-LEDs fünf Mal, um anzuzeigen, dass die Funkfrequenz geändert wurde. Anschließend kehrt das Gerät in den normalen Modus zurück.

Hinweis: Um als Gruppe funktionieren zu können, muss an allen Visit-Geräten dieselbe Funkfrequenz eingestellt sein.

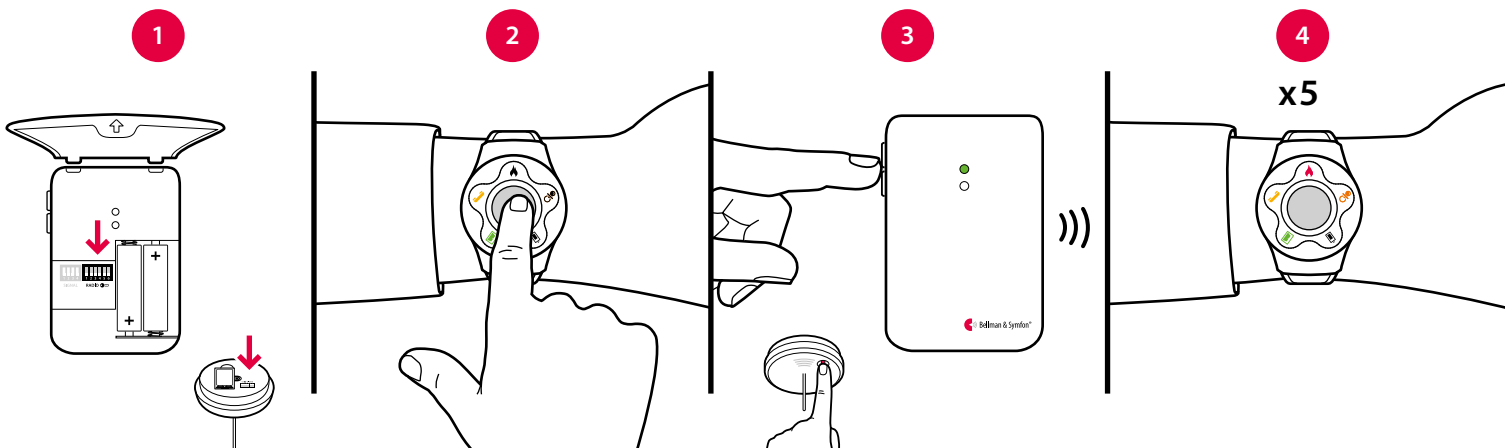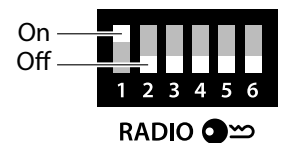

Zubehör


Der Armband-Empfänger kann mit dem folgenden Zubehör ergänzt werden:

■ BE1270 Vibrationskissen

Weckt Sie durch Vibrationen, falls etwas passiert, während Sie schlafen. Schließen Sie den Vibrationskissen an das Ladegerät an und schieben Sie es unter das Kopfkissen oder unter die Matratze Ihres Betts.

Hinweis: Das Vibrationskissen funktioniert nur, wenn sich der Armband-Empfänger im Ladegerät befindet. Der Empfänger vibriert nicht während des Ladevorgangs, die Visit-LED funktioniert jedoch wie gewohnt.

Drücken Sie die Vibrationskissen-Prüftaste auf der Oberseite des Ladegeräts, um die Vibrationskissen-Vibration auszuprobieren.

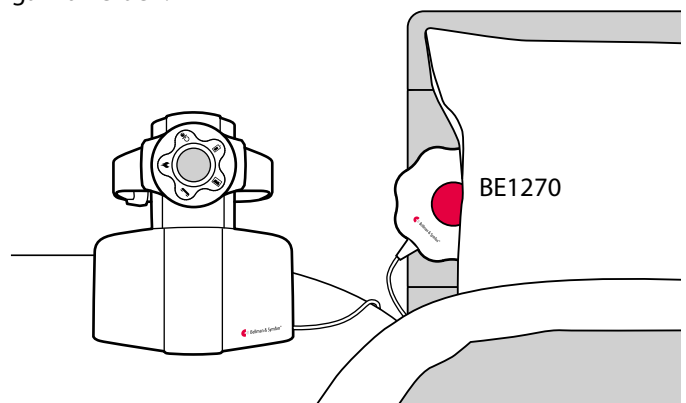

Warnung! Für Armband-Empfänger und Ladegerät dürfen **AUSSCHLIESSLICH NACHLADBARE Akkus (NiMH)** verwendet werden. Nicht-nachladbare Batterien laufen während des Ladens aus und die auslaufende Batteriesäure beschädigt die Elektronik von Armband-Empfänger und Ladegerät. Daraus resultierende Schäden sind von der Garantie ausgeschlossen.



Erweiterte Programmierung

Mit der erweiterten Programmierung können Sie das Signalmuster eines bestimmten Senders und für ein bestimmtes Ereignis sowie die angezeigten LED-Farben und das Vibrations-Signalmuster individuell nach Belieben anpassen. Die erweiterte Programmierung setzt die Funkfrequenz außer Kraft und verbindet die Geräte anhand der Seriennummer. Bitte beachten Sie, dass Rauchmelde-Sender aus Sicherheitsgründen nicht programmiert werden können.

Hinweis: Der Sender muss aktiviert werden, da er innerhalb des Systems darauf ausgelegt ist, das richtige Signal zu erzeugen. Dies bedeutet, dass Sie nicht immer die Sender-Prüftaste verwenden können (siehe **Standardmäßiges Signalmuster** für den jeweiligen Sender).

So programmieren Sie den Armband-Empfänger:

- 1 Halten Sie die Prüftaste des Empfängers gedrückt. Die grüne und die gelbe Visit-LED beginnen, abwechselnd zu blinken. Aktivieren Sie wie vorgesehen den gewünschten Sender, während Sie die Taste weiterhin gedrückt halten. Die Batterie-LED am Empfänger leuchtet gelb auf, um anzuzeigen, dass Sie sich im erweiterten Programmiermodus befinden. Lassen Sie die Taste los.
- 2 Blättern Sie durch die verschiedenen Visit-LED-Optionen, indem Sie am Empfänger die Funktionstaste drücken. Wählen Sie die gewünschte Visit-LED-Farbe aus, indem Sie die Funktionstaste so lange gedrückt halten, bis die Batterie-LED erlischt und wieder aufleuchtet.
- 3 Blättern Sie durch die verschiedenen Vibrations-Optionen, indem Sie am Empfänger die Funktionstaste drücken. Wählen Sie das gewünschte Vibrations-Signalmuster aus, indem Sie die Funktionstaste so lange gedrückt halten, bis die Batterie-LED erlischt und wieder aufleuchtet.
- 4 Der Armband-Empfänger zeigt jetzt die neue Visit-LED-Farbe und das neue Vibrations-Signalmuster an. Drücken Sie kurz die Funktionstaste, um die Demonstration zu beenden. Nach kurzer Zeit kehrt das Gerät in den normalen Modus zurück.

Erweiterte Programmierung löschen

Befolgen Sie das nachstehende Verfahren zum Löschen der erweiterten Programmierung.

- 1 Halten Sie die Funktionstaste des Empfängers so lange gedrückt, bis die grüne und die gelbe Visit-LED abwechselnd blinken. Lassen Sie die Taste los.
- 2 Drücken Sie die Funktionstaste des Empfängers drei Mal in schneller Folge.
- 3 Alle Visit-LEDs blinken ca. zwei Sekunden lang und zeigen so an, dass die erweiterte Programmierung gelöscht wurde.


Fehlersuche

Die meisten Probleme lassen sich mit den nachstehenden Ratschlägen schnell beheben.

Problem	Lösung
Der Empfänger scheint ausgeschaltet zu sein.	▪ Der Akku ist leer. Laden Sie den Akku auf oder ersetzen Sie sie mit einem VARTA-Akku (V40H; NiHM).
Die Batterie-LED blinkt gelb.	▪ Der Akkuladestand ist niedrig. Laden Sie den Akku auf oder ersetzen Sie sie mit einem VARTA-Akku (V40H; NiHM).
Der Empfänger lädt nicht.	▪ Überprüfen Sie, ob der Empfänger richtig im Ladegerät positioniert und die Stromversorgung (bzw. das Netzteil) richtig angeschlossen ist. Die Netz-LED und die Lade-LED sollten leuchten. ▪ Laden oder ersetzen Sie die Ausfall-Akkus durch vier nachladbare Akkus (1,2 V; NiMH) aus.
Der Empfänger reagiert nicht, wenn ein Sender aktiviert wird.	▪ Überprüfen Sie die Batterien des Senders sowie die Verbindungen bzw. Anschlüsse. ▪ Verringern Sie den Abstand zwischen Empfänger und Sender, um sicherzustellen, dass sie in Reichweite sind. ▪ Überprüfen Sie, ob der Empfänger auf dieselbe Funkfrequenz eingestellt ist wie die anderen Geräte im Visit-System, siehe Funkfrequenz ändern.
Der Empfänger wird ohne ersichtlichen Grund aktiviert.	▪ Vermutlich ist in der Nähe ein anderes Visit-System installiert, das Ihr System aktiviert. Ändern Sie bei allen Geräten die Funkfrequenz, siehe Funkfrequenz ändern.
Das Vibrationskissen vibriert nicht.	▪ Überprüfen Sie, ob das Vibrationskissen angeschlossen und der Empfänger im Ladegerät ist.

Visit Alarm Clock-Empfänger

Visit Alarm Clock-Empfänger

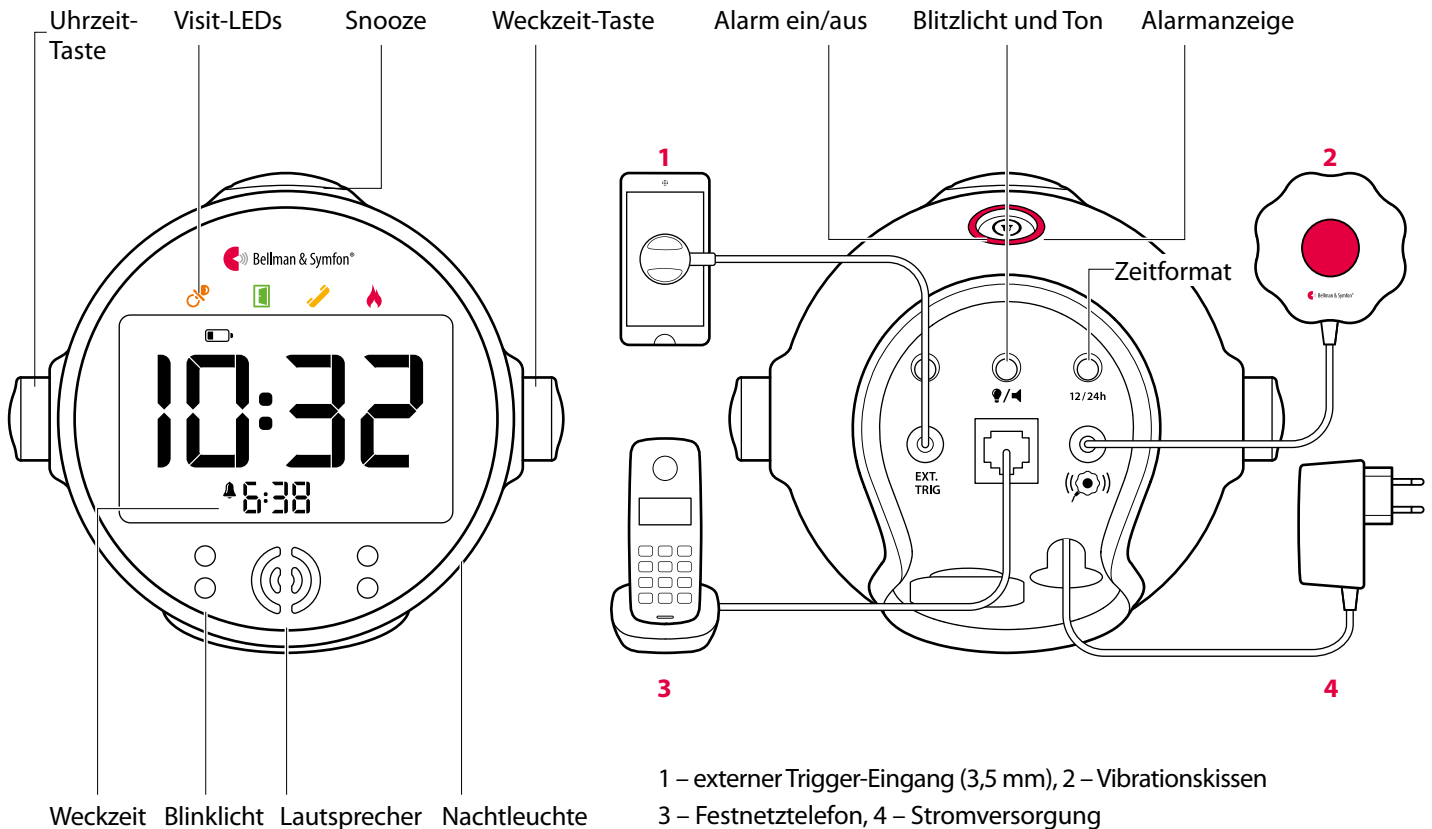

Technische Spezifikationen

Lieferumfang

- BE1580 Visit Alarm Clock
- BE1272 Vibrationskissen mit Ton
- Stromversorgung
- 4 x Ausfall-Akkus (1,2 V; AAA; NiMH)

Strom und Batterie

- Netzstrom
7,5 V DC / 1000 mA
Externes Netzteil
- Reservebatterien
4 x nachladbare Akkus
(1,2 V AAA NiMH)
- Betriebsdauer der Ausfall-Akkus
ca. 24 h, wenn vollständig geladen
- Ladedauer der Ausfall-Akkus
ca. 10 h, wenn vollständig leer

Abmessungen und Gewicht

- Höhe: 108 mm, 4,3 Zoll
- Breite: 121 mm, 4,7 Zoll
- Tiefe: 92 mm, 3,6 Zoll
- Gewicht: 390 g, 13,7 oz
(inkl. Batterien)

Visit-LEDs

Die Visit-LEDs zeigen normalerweise Folgendes an:

- Orange LED, Schnuller-Symbol
Der Babyruf-Sender wurde aktiviert
- Grüne LED, Türsymbol
Der Tür-Sender wurde aktiviert
- Gelbe LED, Telefonsymbol
Der Telefon-Sender wurde aktiviert
- Rote LED, Feuersymbol
Der Rauchmelde-Sender wurde aktiviert

Ausgangssignale

- Ton
100 dB bei 10 cm, 950 Hz – 3 kHz
- Vier hochintensiv blinkende LEDs
- Stromversorgung Vibrationskissen:
2,0 bis 4,0 VDC
Das Vibrationskissen gibt ein Tonsignal aus

Frequenz und Reichweite


- Funkfrequenz
314,91 MHz, 433,92 MHz oder
868,30 MHz, abhängig von der Region
- Reichweite
50 – 250 m (55 – 273 yd.),
abhängig von Funkfrequenz und
Gebäudeeigenschaften

Zubehör

- BE1271 Vibrationskissen ohne Ton
- BE9250 Mobile Phone Sensor

Erste Schritte

- 1 Ziehen Sie die Batterielasche heraus und schließen Sie das Netzteil an den Blitzlichtwecker und an eine Netzsteckdose an. Schließen Sie das Vibrationskissen an, schieben Sie es unter das Kissen oder die Matratze Ihres Bettes und stellen Sie den Blitzlichtwecker auf Ihren Nachttisch.
- 2 Um die Funkverbindung überprüfen zu können, benötigen Sie einen Visit-Sender. Drücken Sie die Prüftaste/n des Senders.
- 3 Am Blitzlichtwecker leuchtet eine Visit-LED auf und der Blitzlichtwecker beginnt, Ton- und Blinklichtsignale auszugeben. Das Vibrationskissen gibt ein Tonsignal aus und vibriert. Wenn nichts passiert, siehe **Fehlersuche**.

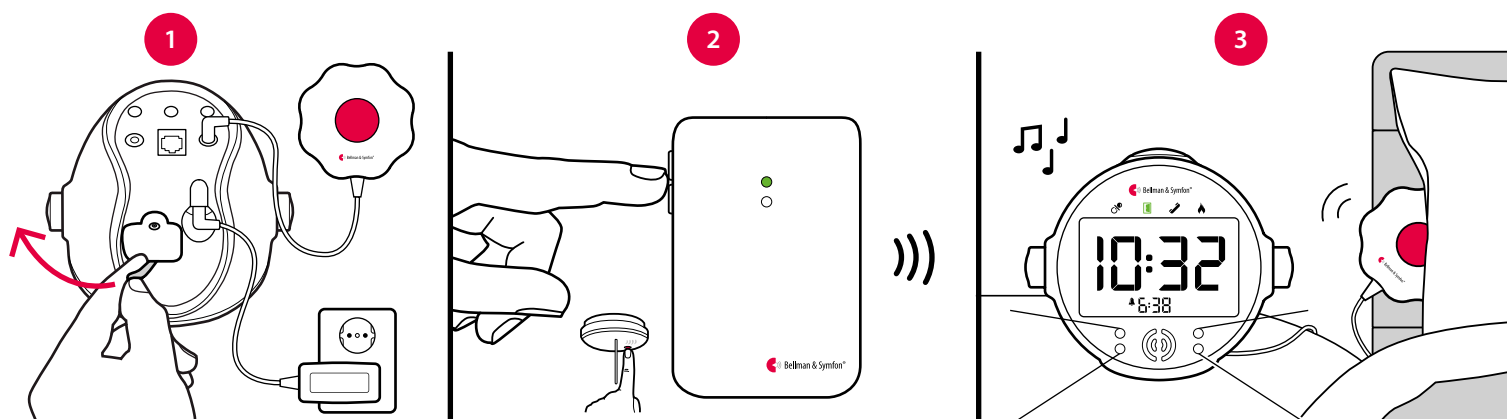

Standardmäßiges Signalmuster

Wenn ein Sender aktiviert wird, leuchtet eine LED am Blitzlichtwecker auf, der Wecker beginnt, Blinklicht- und Tonsignale auszugeben und das Vibrationskissen beginnt, mit einer bestimmten Geschwindigkeit zu vibrieren. Dies wird Signalmuster genannt. Der Sender gibt das Signalmuster vor, dieses ist standardmäßig wie folgt eingestellt:

Sender	Blitzlichtwecker			Vibrationskissen
Aktivierte Quelle	Visit-LED	Ton	Blitzlicht	Vibration
■ Tür-Sender / Druckknopf-Sender	Grün	Türgong	Ja	Langsam ■■■■
■ Telefon-Sender / angeschlossenes Telefon	Gelb	Klingelsignal	Ja	Mittel ■■■■
■ Babyruf-Sender	Orange	Babymelodie	Ja	Schnell ■■■■
■ Rauchmelde-Sender	Rot	Feueralarmsignal	Ja	Lang ■■■■

Signalmuster ändern

Das Signalmuster kann nur an den Sendern geändert werden. Siehe **Signalmuster ändern** für den jeweiligen Sender.

Einstellungen

Blinklicht und Ton Ein/Aus

Drücken Sie wiederholt die mit  gekennzeichneten Tasten Blinklicht und Ton Ein/Aus auf der Rückseite des Blitzlichtweckers, um zwischen den Optionen zu wechseln. Beim Ausschalten des Blinklichts wird auf der Vorderseite des Blitzlichtweckers das Symbol  und beim Stummschalten des Tons das Symbol  angezeigt.

Stärke der Hintergrundbeleuchtung

Drücken Sie wiederholt die mit  gekennzeichnete Taste Hintergrundbeleuchtung auf der Rückseite des Blitzlichtweckers, um die Stärke in fünf Stufen anzupassen.


Zeitformat

Drücken Sie die mit 12/24h gekennzeichnete Zeitformat-Taste auf der Rückseite des Blitzlichtweckers, um zwischen der 12-Stunden- und der 24-Stunden-Anzeige zu wechseln.

Visit Alarm Clock-Empfänger


Uhrzeit einstellen

Drücken Sie die **linke** Wähltaste und stellen Sie durch Drehen der Taste die Stunden ein. Um die Minuten einzustellen, wiederholen Sie den vorherigen Schritt. Zum Speichern der Einstellung erneut drücken.

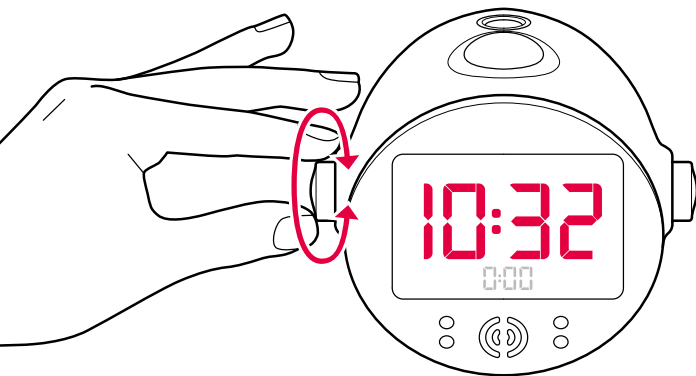


Weckzeit einstellen

Drücken Sie die **rechte** Wähltaste und stellen Sie durch Drehen der Taste die Stunden ein. Um die Minuten einzustellen, drücken und drehen Sie die Wähltaste erneut. Zum Speichern der Einstellung erneut drücken.

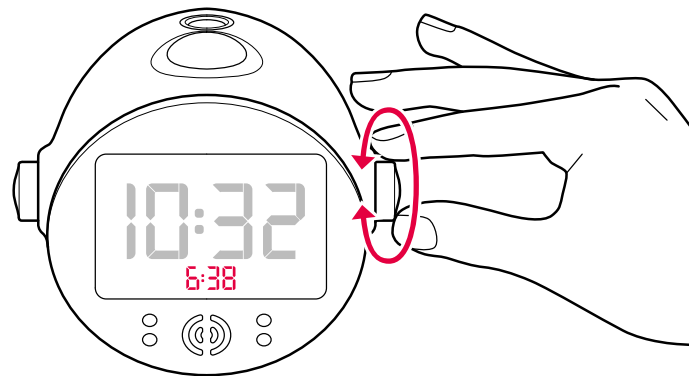


Weckzeit aktivieren

Drücken Sie die Taste Wecker Ein/Aus, um die Weckzeit zu aktivieren. Die Blitzlichtwecker-Anzeige leuchtet rot auf. Zum Deaktivieren der Weckzeit die Taste erneut drücken.

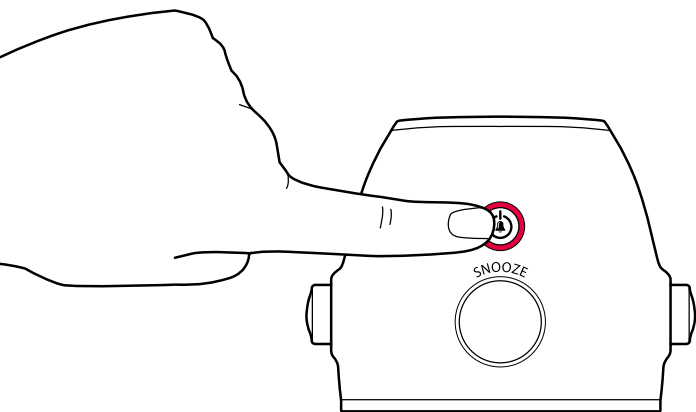

Verwendung von Schlummerfunktion (Snooze) und Nachtleuchte


Drücken Sie kurz die Snooze-Taste, um den Weckalarm stumm zu schalten (Feueralarme können aus Sicherheitsgründen nicht stummgeschaltet werden). Halten Sie die Snooze-Taste drei Sekunden lang gedrückt, um die Nachtleuchte einzuschalten. Drücken Sie die Taste erneut, um die Nachtleuchte auszuschalten.

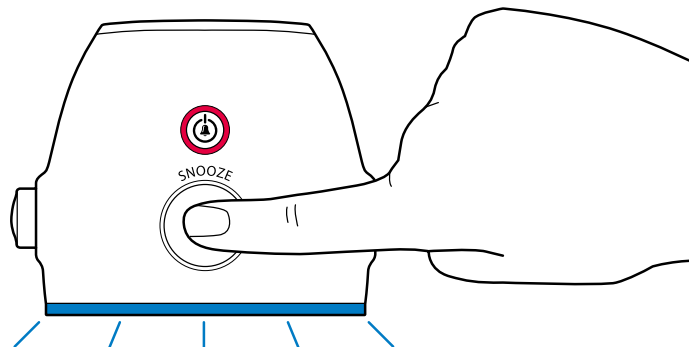

Blitzlichtwecker-Zubehör

Der Blitzlichtwecker kann mit dem folgenden Zubehör ergänzt werden:

- **BE9105 Telefonkabel**
Mit dem Kabel können Sie Ihr Festnetztelefon am RJ11-Eingang des Blitzlichtweckers anschließen und sich so benachrichtigen lassen, wenn das Telefon klingelt.
- **BE9250 Mobile Phone Sensor**
Schließen Sie ihn an den Ext.Trig.-Eingang des Blitzlichtweckers an und legen Sie ihn auf das Display, um über eingehende Anrufe oder Nachrichten informiert zu werden.
- **BE9024 Alarmtrittmatte**
Schließen Sie sie an den Ext.Trig.-Eingang des Blitzlichtweckers an, um benachrichtigt zu werden, wenn Ihr Partner das Bett verlässt.

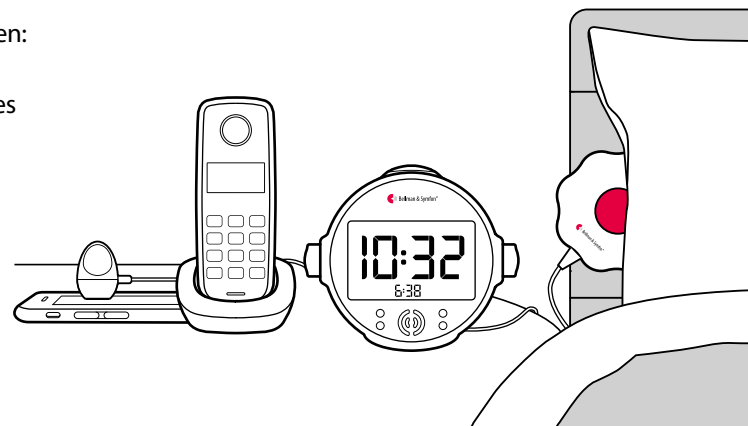


Funkfrequenz ändern


Wenn Ihr Visit-System ohne Grund aktiviert wurde, ist vermutlich in der Nähe ein anderes System installiert, das Ihr System aktiviert. Um derartige Funkinterferenzen zu verhindern, müssen Sie an allen Geräten die Funkfrequenz ändern. Die Funkfrequenzschalter befinden sich an den **Sendern**.

So ändern Sie die Funkfrequenz:

- 1 Öffnen Sie die Sender-Abdeckung und stellen Sie einen beliebigen Funkfrequenzschalter auf die obere Position (= Ein), um die Funkfrequenz zu ändern. Siehe **Funkfrequenz ändern** für den jeweiligen Sender.
- 2 Halten Sie die Snooze-Taste des Blitzlichtweckers so lange gedrückt, bis die grüne und die gelbe Visit-LED abwechselnd blinken. Lassen Sie die Taste los.
- 3 Drücken Sie innerhalb von dreißig Sekunden am Sender die Prüftaste/n, um die neue Funkfrequenz zu übermitteln.
- 4 Am Blitzlichtwecker blinken alle Visit-LEDs fünf Mal, um anzuzeigen, dass die Funkfrequenz geändert wurde. Anschließend kehrt das Gerät in den normalen Modus zurück.

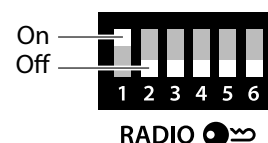

Hinweis: Um als Gruppe funktionieren zu können, muss an allen Visit-Geräten dieselbe Funkfrequenz eingestellt sein.

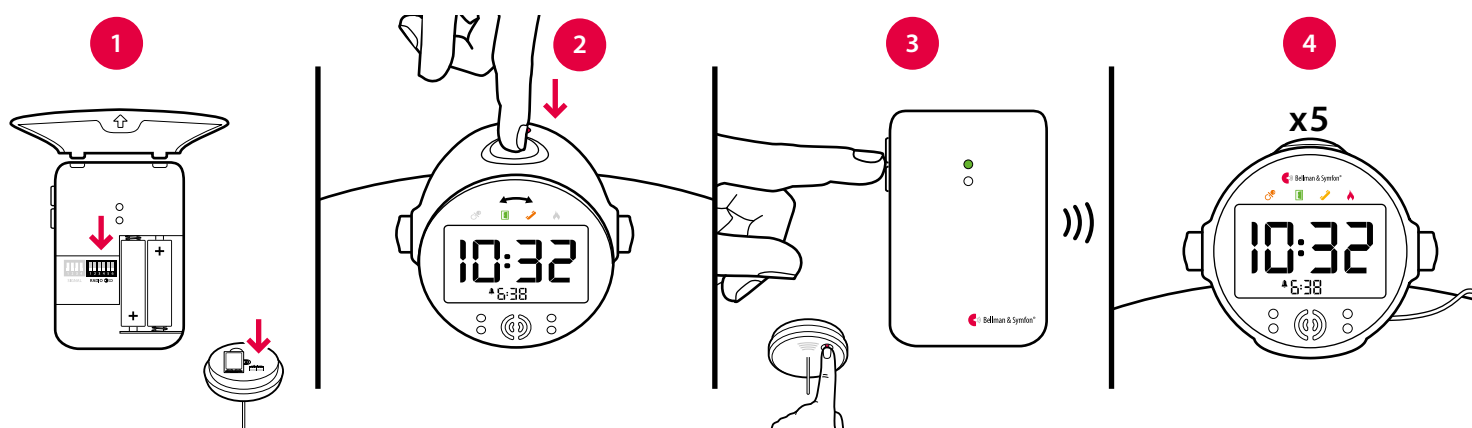


Fehlersuche

Problem	Lösung
Der Blitzlichtwecker scheint ausgeschaltet zu sein.	▪ Überprüfen Sie, ob die Stromversorgung (bzw. das Netzteil) richtig angeschlossen ist. ▪ Laden Sie die Ausfall-Akkus einige Stunden lang auf.
Das  -Symbol auf der Vorderseite des Blitzlichtweckers beginnt, zu blinken.	▪ Die Stromversorgung (bzw. das Netzteil) ist nicht angeschlossen und die Ausfall-Akkus sind fast leer. Schließen Sie das Netzteil an und laden Sie die Ausfall-Akkus einige Stunden lang auf.
Das  -Symbol wird auf der Vorderseite des Blitzlichtweckers angezeigt.	▪ Der Empfänger erkennt keine Ausfall-Akkus. Ziehen Sie an der Batterielasche, siehe Erste Schritte.
Der Blitzlichtwecker reagiert nicht, wenn ein Sender aktiviert wird.	▪ Überprüfen Sie die Batterien des Senders sowie die Verbindungen bzw. Anschlüsse. ▪ Verringern Sie den Abstand zwischen Blitzlichtwecker und Sender, um sicherzustellen, dass sie in Reichweite sind. ▪ Überprüfen Sie, ob der Blitzlichtwecker auf dieselbe Funkfrequenz eingestellt ist wie die anderen Geräte im Visit-System, siehe Funkfrequenz ändern.
Der Blitzlichtwecker wird ohne ersichtlichen Grund aktiviert.	▪ Vermutlich ist in der Nähe ein anderes Visit-System installiert, das Ihr System aktiviert. Ändern Sie bei allen Geräten die Funkfrequenz, siehe Funkfrequenz ändern.
Die Alarm-Lautstärke ist zu niedrig.	▪ Die Lautstärke nimmt allmählich zu und erreicht mehr als 100 dB.

Pager-Ladegerät

Tasten und Steuerelemente


Ladegerät-Halterungen

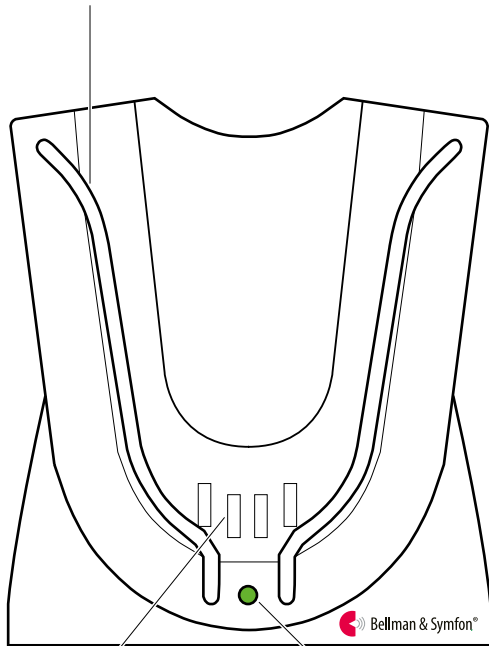

Ladekontakte

Lade-LED

BE1270 Vibrationskissen

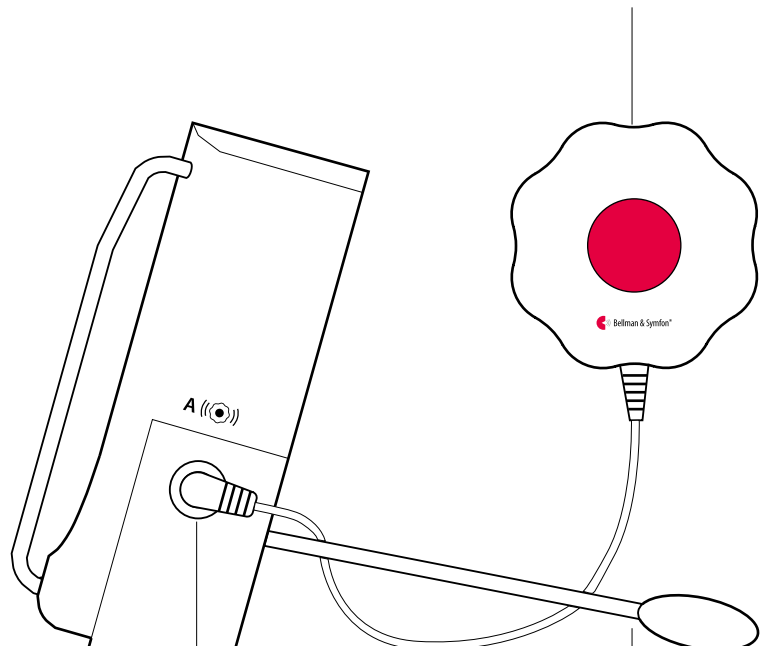

2 x Vibrationskissen-Buchsen

Stützbügel

Lieferumfang

Include:

- BE1260 Pager-Ladegerät mit vorinstallierten Ausfall-Akkus
- Externes Netzteil
- 1 x nachladbarer Akku (1,2 V; NiMH) für den Pager
- Stützbügel, Schrauben und Dübel

Lade-LED

- Grünes Leuchten: Der Pager lädt.
- Kein Leuchten: Der Pager ist vollständig geladen oder das Netzteil ist nicht an den Netzstrom angeschlossen.

Strom und Batterie

- Netzstrom: 8 VDC / 800 mA
- Batteriestrom
4 x nachladbare Akkus (1,2 V NiMH)
- Hinweis: Die Ausfall-Akkus müssen in einem Service-Center ausgetauscht werden.
- Ladedauer des Pagers
Normale Ladedauer: ca. 6 h
Mit leeren Ausfall-Akkus: ca. 24 h
- Strom für Vibration: 2,0 bis 4,0 VDC

Umgebung

- Nur für den Innengebrauch

Abmessungen und Gewicht

- Höhe: 78 mm, 3 Zoll
- Breite: 88 mm, 3,5 Zoll
- Tiefe: 43 mm, 1,7 Zoll
- Gewicht: 385 g, 16,3 oz (inkl. Batterien)

Zubehör


- BE1270 Vibrationskissen
Verbindet max. zwei Vibrationskissen
- BE9086 Kabel für externen Trigger
Ausgang B verwenden



Warnung! Bei Verwendung des Pager-Ladegeräts dürfen Sie **AUSSCHLIESSLICH NACHLADBARE NiMH-Akkus** im Pager verwenden. Nicht-nachladbare Batterien laufen aus, wenn der Pager in das Ladegerät eingelegt wird und die auslaufende Batteriesäure beschädigt die Elektronik. Daraus resultierende Schäden sind von der Garantie ausgeschlossen.

Erste Schritte

- 1 Wichtig!** Ersetzen Sie die alte Alkaline-Batterie durch den beiliegenden nachladbaren Akku (1,2 V; NiHM).
- 2** Bringen Sie die Stützbügel an der Rückseite des Ladegeräts an und stellen Sie es auf einer ebenen Fläche auf. Mit den beiliegenden Schrauben und Dübeln können Sie es auch an der Wand befestigen.
- 3** Schließen Sie das Netzteil an einer Netzsteckdose an und legen Sie den Pager in das Ladegerät. Während des Ladens leuchtet die Lade-LED grün und erlischt, sobald der Pager vollständig geladen ist. Schließen Sie das Vibrationskissen an und schieben Sie es unter das Kissen oder die Matratze Ihres Bettes.

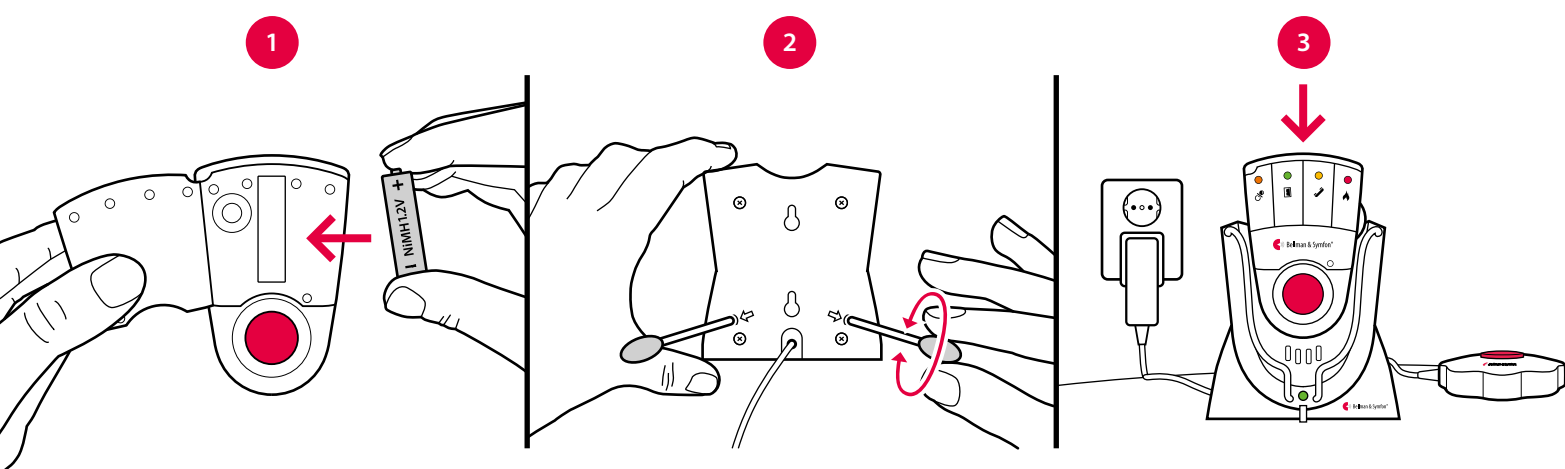

Prüfen der Verbindung

Hinweis: Laden Sie die Ausfall-Akkus 24 Stunden lang, bevor Sie sie für ein Vibrationskissen verwenden.

- 1** Um die Funkverbindung überprüfen zu können, benötigen Sie den Pager und einen Visit-Sender. Drücken Sie Prüftaste/n des Senders (siehe Prüfen der Funkverbindung des jeweiligen Senders).
- 2** Wenn der Pager in das Ladegerät gelegt wird, leuchtet eine Visit-LED auf und das Vibrationskissen beginnt zu vibrieren. Wenn nichts passiert, siehe **Fehlersuche**.


Fehlersuche

Die meisten Probleme lassen sich mit den nachstehenden Ratschlägen schnell beheben.

Problem	Lösung
Der Pager lädt nicht, wenn er in das Ladegerät gelegt wird.	▪ Überprüfen Sie, ob der Pager richtig im Ladegerät positioniert ist. Die Lade-LED leuchtet grün auf und zeigt damit an, dass der Pager geladen wird. ▪ Wenn die Lade-LED nicht grün aufleuchtet, sind evtl. die Ausfall-Akkus leer. Schließen Sie das Netzteil an eine Netzsteckdose und laden Sie die Ausfall-Akkus auf.
Wenn der Pager aktiviert wird, vibriert das Vibrationskissen nicht.	▪ Überprüfen Sie, ob das Vibrationskissen richtig am Ladegerät angeschlossen ist. ▪ Überprüfen Sie, ob der Pager richtig im Ladegerät positioniert ist. Die Lade-LED leuchtet grün auf und zeigt damit an, dass der Pager geladen wird. ▪ Wenn die Lade-LED nicht grün aufleuchtet, sind evtl. die Ausfall-Akkus leer. Schließen Sie das Netzteil an eine Netzsteckdose und laden Sie die Ausfall-Akkus auf.

Mobile Phone Sensor

Tasten und Verbindungen

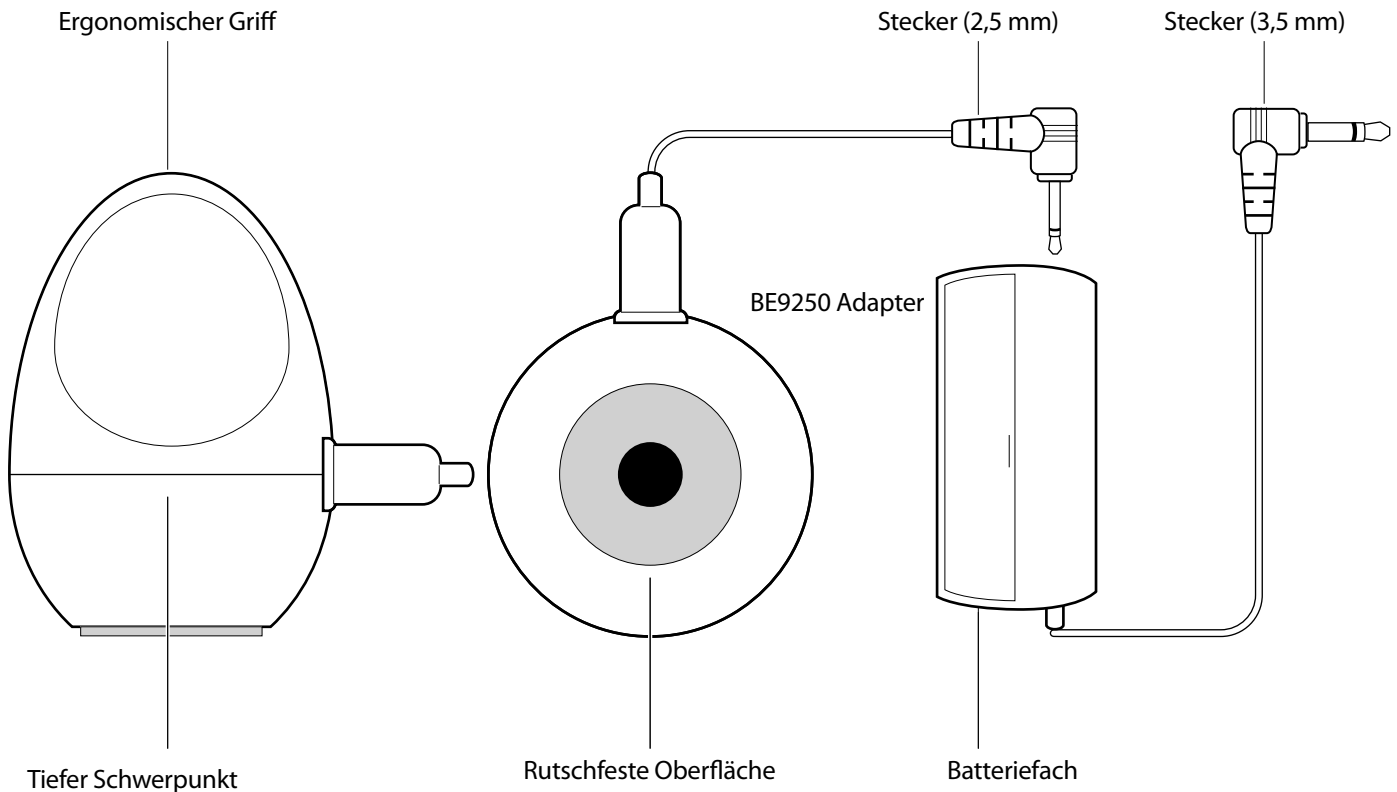

Modellübersicht

Modell BE9250

Das Modell BE9250 verfügt über einen Adapter für den Anschluss von Geräten von Bellman & Symfon über einen externen Trigger-Eingang (3,5 mm).

Kompatibilität

- BE1580 Visit Alarm Clock
- BE1370 Alarm Clock Pro
- BE1350 Alarm Clock Classic

Technische Spezifikationen

- Batteriestrom: 1 x Alkaline-Batterie (1,5 V; AAA)
- Optische Erkennung: Wird aktiviert, wenn das Display eingeschaltet wird
- Lichtempfindlichkeit: Sichtbares Licht > 3 Lux mehr als 2 s
- Anschlüsse:
Mobile Phone Sensor: Mono-Klinkenstecker (2,5 mm)
Adapter: Mono-Klinkenstecker (3,5 mm)
- Kabellänge: 120 cm, 4 Zoll
- Abmessungen und Gewicht des Sensors:
24 x 34 x 24 mm, 20 g
- Abmessungen und Gewicht des Adapters:
53 x 25 x 18 mm, 27 g

Modell BE9251

Das Modell BE9251 kann an alle Geräte von Bellman & Symfon angeschlossen werden, die über einen externen Trigger-Eingang (2,5 mm) verfügen.

Kompatibilität

- BE1431 Visit Telefon-Sender
- BE1441 Visit Tischblitzlampe
- BE1442 Visit Tischblitzlampe mit Ausfall-Akkus

Technische Spezifikationen


- Anbringung: Waagrecht am Display
- Optische Erkennung: Wird aktiviert, wenn das Display eingeschaltet wird
- Lichtempfindlichkeit: Sichtbares Licht > 3 Lux mehr als 2 s
- Anschluss: Mono-Klinkenstecker (2,5 mm)
- Kabellänge: 120 cm, 4 Zoll
- Abmessungen und Gewicht des Sensors:
24 x 34 x 24 mm, 20 g



BE9250 | BE9251

Verwendung von BE9250 mit Blitzlichtwecker

- 1 Öffnen Sie das Batteriefach, legen Sie die beiliegende Batterie ein und schließen Sie den Mobile Phone Sensor an dem Eingang (2,5 mm) an.
- 2 Schließen Sie den Adapter an den externen Trigger-Eingang (3,5 mm) auf der Rückseite des Blitzlichtweckers an.
- 3 Legen Sie den Sensor auf das Mobiltelefon- oder Tablet-Display und rufen Sie das Mobiltelefon vom z. B. Festnetztelefon an. Wenn sich das Display einschaltet, blinkt die gelbe Visit-LED des Blitzlichtweckers und der Wecker beginnt, Ton-, Blitzlicht- oder Vibrationssignale auszusenden.

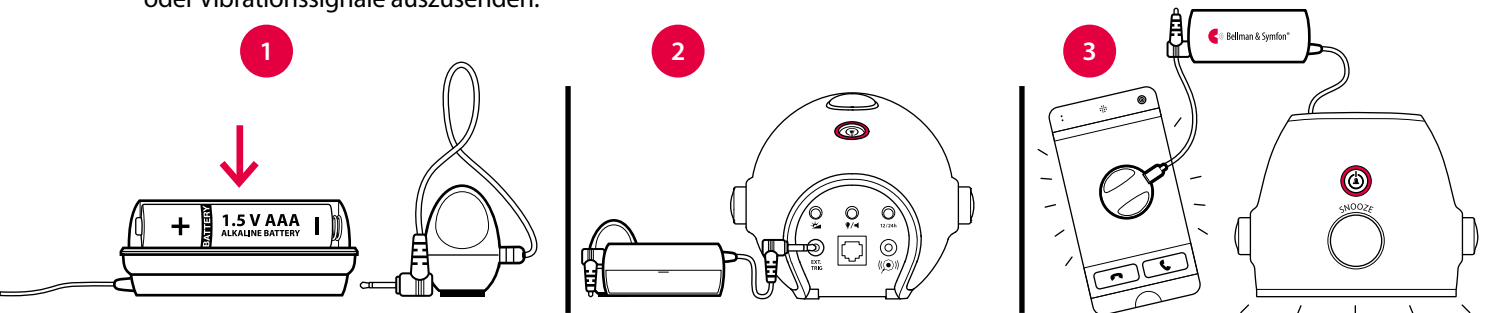


Verwendung von BE9251 mit Tischblitzlampe

- 1 Schließen Sie den Mobile Phone Sensor an den externen Trigger-Eingang (2,5 mm) auf der Rückseite des Empfängers an. Legen Sie ihn auf das Mobiltelefon- oder Tablet-Display.
- 2 Rufen Sie das Mobiltelefon vom z. B. Festnetztelefon an. Wenn sich das Mobiltelefon-Display einschaltet, blinkt die gelbe Visit-LED des Empfängers und der Empfänger beginnt, Blitzlichtsignale auszusenden.



Verwendung von BE9251 mit Telefon-Sender

- 1 Öffnen Sie die vordere Abdeckung des Telefon-Senders und schließen Sie den Mobile Phone Sensor an den externen Trigger-Eingang (2,5 mm) an. Legen Sie ihn auf das Mobiltelefon- oder Tablet-Display.
- 2 Rufen Sie das Mobiltelefon vom z. B. Festnetztelefon an. Wenn sich das Mobiltelefon-Display einschaltet, leuchtet die obere LED des Senders grün auf, um anzuzeigen, dass das Funksignal übertragen wird.
- 3 Die gelbe Visit-LED am Empfänger leuchtet auf und zeigt damit an, dass das Signal empfangen wurde. Zusätzlich sendet der Empfänger Blitzlicht- oder Vibrationssignale aus. Dies ist abhängig vom Empfängermodell.

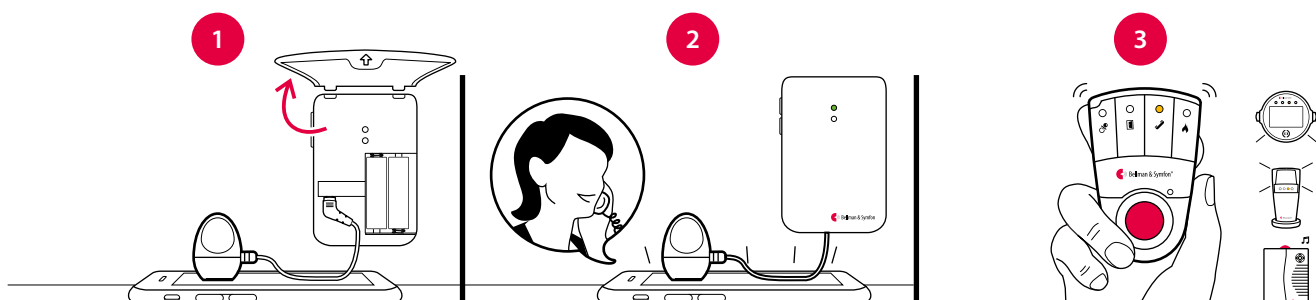




BE1270


Vibrationskissen

Tasten und Verbindungen

Rutschfeste
Oberfläche




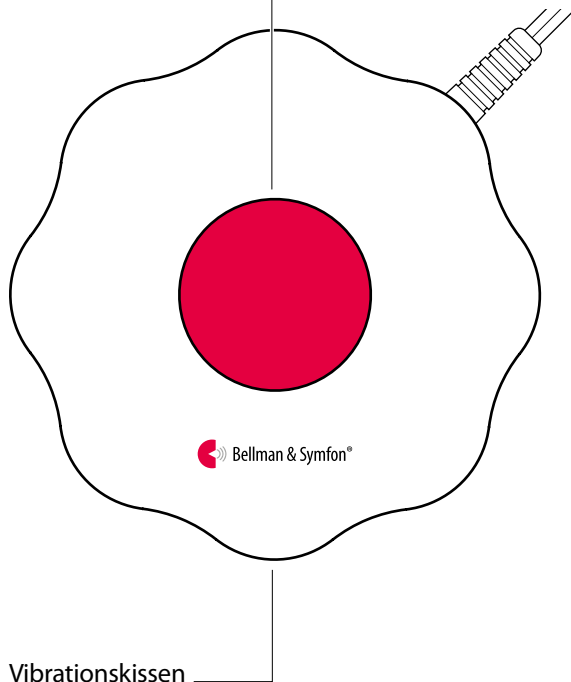


Vibrationskissen

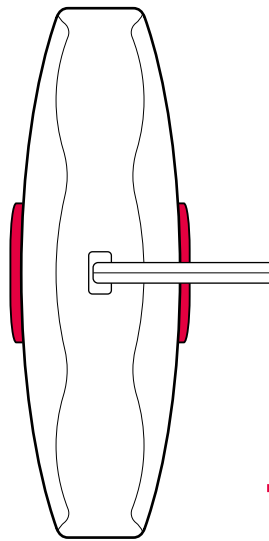

Tragbarer Empfänger

Tischblitzlampe

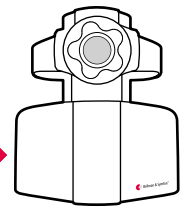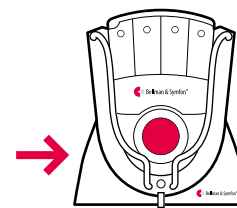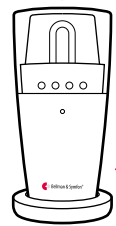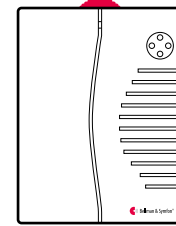

Pager-Ladegerät

Armband-Empfänger

Technische Spezifikationen

Funktion

Weckt Sie mit Vibrationen unter dem Kissen oder der Matratze. Benötigt keine interne Batterie und verbindet sich mit allen Visit-Empfängern und Ladegeräten.

Lieferumfang

- BE1270 Vibrationskissen

Stromverbrauch

- Betriebsspannung
2,0 – 4,0 V DC von einem Visit-Empfänger
- Stromverbrauch 250 – 750 mA

Kabel und Anschlüsse

- Kabellänge: 2 m, 6,5 Zoll
- Anschluss: Mono-Klinkenstecker (3,5 mm)

Abmessungen und Gewicht

- Höhe: 88 mm, 3,5 Zoll
- Breite: 88 mm, 3,5 Zoll
- Tiefe: 27 mm, 1,1 Zoll
- Gewicht: 120 g, 4,2 oz.

Umweltbestimmungen

- Nur für den Innengebrauch
- Temperatur: 15 °C bis 35 °C (59° bis 95 °F)
- Relative Luftfeuchtigkeit: 5 % -95 % Nicht kondensierend

Wartung und Pflege

- Mit einem trockenen Tuch reinigen
- Verwenden Sie keine Haushaltsreinigungsmittel, Aerosol-Sprays, Lösungsmittel, keinen Alkohol, Ammoniak oder Scheuermittel.

Kompatibilität

Das Vibrationskissen kann an die folgenden Visit-Empfänger und Ladegerät-Zubehöerteile angeschlossen werden:

Visit-Empfänger

- BE1450 Visit tragbarer Empfänger
- BE1441 Visit Tischblitzlampe
- BE1442 Visit Tischblitzlampe mit Ausfall-Akkus
- Ladegerät für BE1570 Visit-Armband-Empfänger

Zubehör


- BE1260 Pager-Ladegerät für den BE1470 Visit-Pager-Empfänger

Wandkonsole für Tischblitzlampe

Verwendung einer Tischblitzlampe

BE1441


- 1 Verwenden Sie die Bohrschablone zum Markieren und Bohren der Montagelöcher für die Dübel bzw. Schrauben.
- 2 Entfernen Sie mit einem Innensechskantschlüssel den Tischständer der Tischblitzlampe.
- 3 Bringen Sie die Wandkonsole an der Wand an. Bringen Sie die Unterseite an und montieren Sie die Tischblitzlampe an der Wandkonsole.

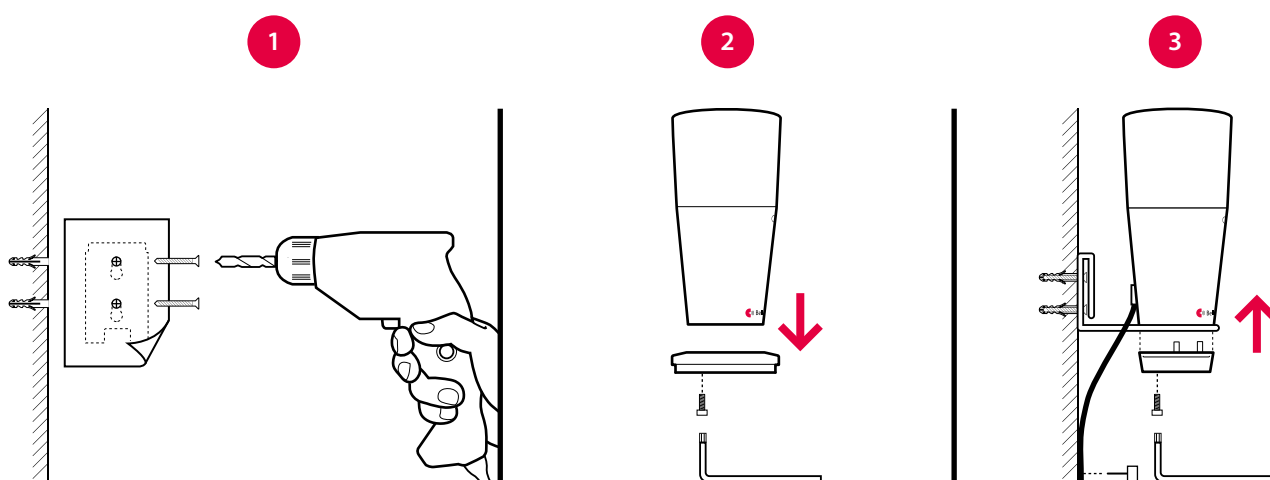

Verwendung einer Tischblitzlampe mit Ausfall-Akkus

BE1442/BE1444

- 1 Verwenden Sie die Bohrschablone zum Markieren und Bohren der Montagelöcher für die Dübel bzw. Schrauben.
- 2 Entfernen Sie die rot markierte Schraube an der Unterseite der Tischblitzlampe.
- 3 Bringen Sie die Wandkonsole an der Wand an. Bringen Sie die Schraube wieder an, um die Tischblitzlampe an der Wandkonsole zu befestigen.

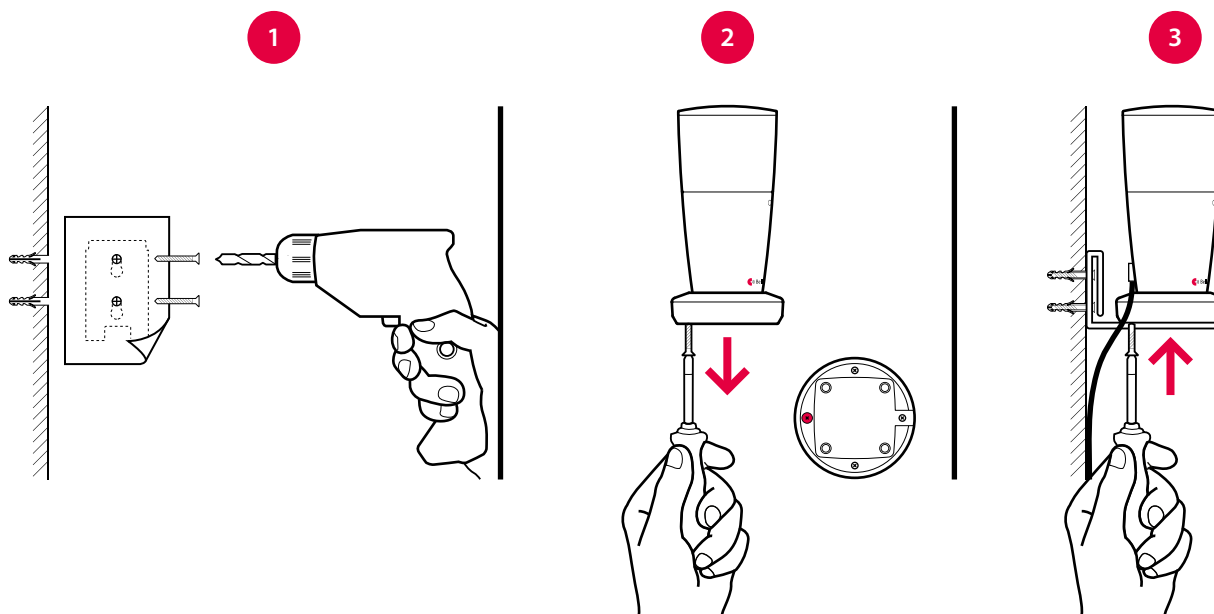

Visit-Zubehör


Magnetschalter

Überwacht die Eingangstür und die Fenster.

Bringen Sie den Magnetschalter am Tür- oder Fensterrahmen an und verbinden Sie ihn mit dem Telefon-Sender. Wenn die Magneten des Magnetschalters getrennt werden, sendet der Sender ein Signal an den Visit-Empfänger.

Technische Spezifikationen

- Abmessungen 25 x 62 x 13 mm, 1 x 2,5 x 0,5 Zoll
- Gewicht 25 g, 0,9 oz.
- Anschluss Mono-Klinkenstecker (3,5 mm)
- Kabellänge 0,5 m, 1,6'
- Unterbrecherkontakt
 - Open > 1,0 cm, 0,4 Zoll Abstand vom Magneten
 - Geschlossen < 2,0 cm, 0,8 Zoll Abstand vom Magneten
- Farbe Weiß
- Umgebung Nur für den Innengebrauch

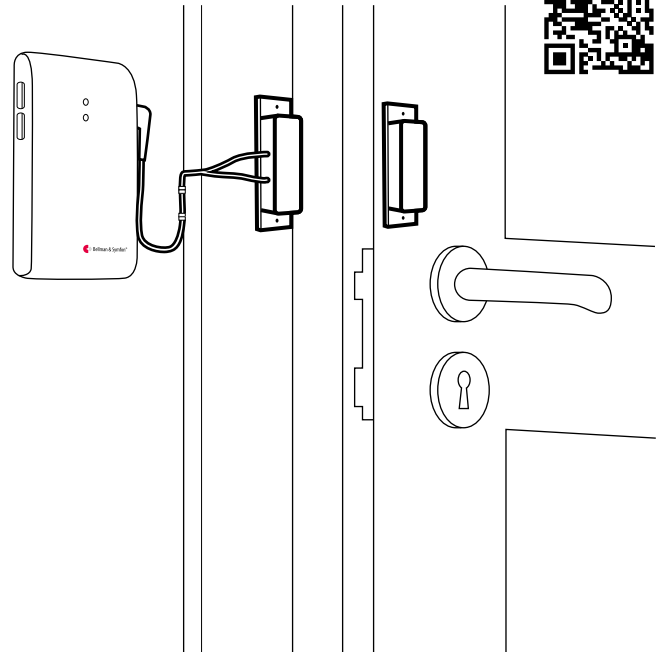

BE9023




Alarmtrittmatte

Benachrichtigt Sie, wenn jemand auf die Matte tritt.

Legen Sie die Alarmtrittmatte vor die Eingangstür oder vor das Bett und schließen Sie sie an den Telefon-Sender oder den Babyruf-Sender an, um benachrichtigt zu werden, wenn jemand ein Zimmer betritt oder das Bett verlässt.

Technische Spezifikationen

- Abmessungen 720 x 390 x 3 mm, 28 x 15 x 0,1 Zoll
- Gewicht 290 g, 10 oz.
- Anschluss Mono-Klinkenstecker (3,5 mm)
- Kabellänge 200 cm, 6,6'
- Staubdicht und gemäß IP64 versiegelt (nicht wasserdicht)

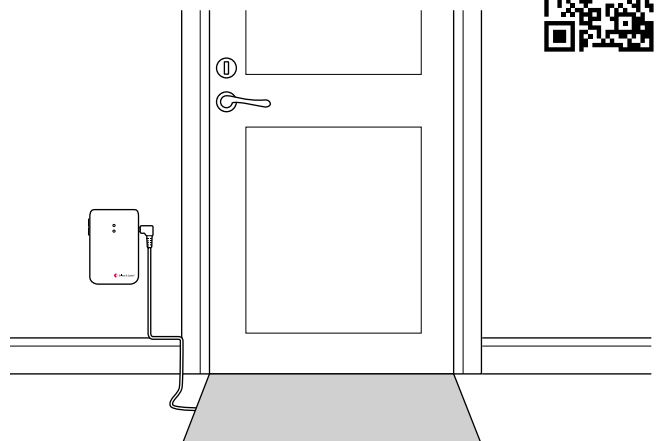

BE9024



Betrieb

- Kontakt Schließer (N/O)
- Kontaktwiderstand 1 Ω (abhängig vom Druck)
- Betriebsdruck Nenndruck 25 kg pro 50-mm-Platte.
- Temperaturbereich -10 °C bis 70 °C, 14 °F bis 158 °F

Maximale Leistung/Grenzwerte

- Kontaktgrenzwert 10 VA
- Schaltspannung 25 VDC
- Schaltstrom 0,25 A DC Ohmsche Last
- Dauerstrom 0,25 A DC Ohmsche Last

Externes Mikrofon

BE9199 | BE9200




Erweitert die Reichweite des Tür-Senders

Das externe Mikrofon kann mit dem Tür-Sender verwendet werden, wenn die externe Schallquelle zu weit vom internen Mikrofon entfernt ist oder wenn getrennte Informationen von Türklingel und Gegensprechanlage gewünscht sind.

Technische Spezifikationen

- Abmessungen 33 x 36 x 4 mm, 1,3 x 1,4 x 0,2 Zoll
- Gewicht 15 g, 0,5 oz.
- Anschluss Mono-Klinkenstecker (3,5 mm)
- Kabellänge BE9199: 2,5 m, 8,2'
BE9200: 0,75 m, 5,2'
- Mikrofontyp Piezoelektrisch
- Farbe Weiß
- Umgebung Nur für den Innengebrauch

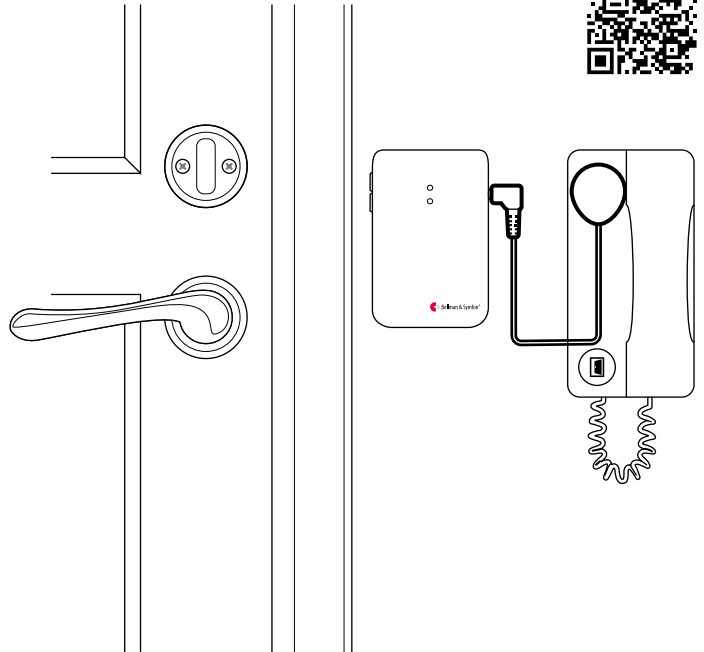

Kabel für externen Trigger

Verbindet eine externe Trigger-Quelle mit Visit

Mit dem externen Trigger-Kabel wird eine externe Trigger-Quelle mit einem Visit-Produkt verbunden. Verwenden Sie es, um z. B. eine vorhandene Türklingel an den Telefon-Sender anzuschließen und sich benachrichtigen zu lassen, wenn jemand die Türklingel läutet.

Technische Spezifikationen



- Gewicht 25 g, 0,9 oz.
- Anschluss Mono-Klinkenstecker (3,5 mm)
- Kabellänge 0,5 m, 1,6'
- Farbe Weiß

Spannung

- Ⓢ 2 bis 30 VDC
- 3 bis 24 VAC

Siehe den jeweiligen Visit-Produktabschnitt für detaillierte Informationen.

BE9253

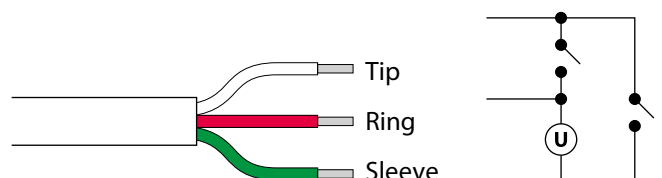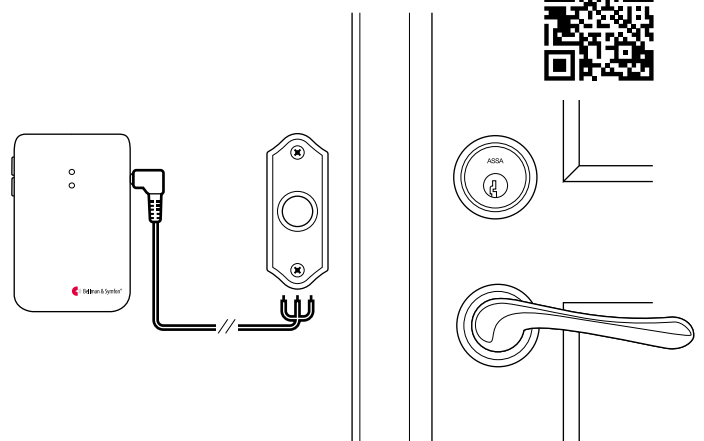



Das schwedische Unternehmen Bellman & Symfon widmet sich seit über 25 Jahren der Verbesserung der Lebensqualität der Menschen mit Hörproblemen und Betreuungsbedarf. Unsere Mitarbeiter und Partner haben sich dieser Mission verschrieben. Wir arbeiten eng mit medizinischen Fachleuten und führenden Gesundheitsexperten zusammen, um ein unbeschwertes und selbstbestimmtes Leben für Alle zu ermöglichen.

Bellman & Symfon
Södra Långebergsgatan 30
421 32 Västra Frölunda
Sweden
Telefon: +46 31 68 28 20
Fax: +46 31 68 28 90
E-Mail: info@bellman.com

Bellman & Symfon Deutschland GmbH
Uelzener Str. 14
21335 Lüneburg
t: +49 (0)4131 28 48 333
f: +49 (0)4131 28 46 578
Email: info@bellman.de

ISG_001ART001_DE

