

Vermietung einer
Induktionsanlage oder
FM-Anlage

WWW.IHRZUBEHOER.AT



Nicht nur ältere Personen sind von Schwerhörigkeit betroffen sondern auch viele Jugendliche und Kinder, meist tragen sie ein Hörgerät oder Cochlea Implantat (CI). Laute Umgebung und Hintergrundgeräusche machen das Verstehen der Sprache oft sehr schwer. Nicht immer ist es möglich eine Induktionsanlage fix zu installieren bzw. ist eine Induktionsanlage auch nicht immer die richtige Wahl.

INDUKTIONSANLAGE

Bei Gruppenveranstaltungen im geschlossenen Raum ist die Induktionsanlage ideal einsetzbar. Der Seminarleiter überträgt seine Sprache mittels Mikrophon an die Ringschleifenanlage.

Um das Signal einer Induktionsschleife hören zu können muss das Hörgerät oder CI-Gerät auf „T“ oder „MT“ umgeschaltet werden, somit verstehen Sie jedes Wort.




Symbol zur Kennzeichnung
einer Induktionsanlage



FM-ANLAGE

Bei Führungen wie z.B. in Museen verwendet man vorzugsweise eine FM-Anlage. Diese kommuniziert mittels Funk zwischen Sende- und Empfängergerät. Die sprechende Person bedient den Sender mit Mikrophon und alle Teilnehmer mit Empfängergerät empfangen diese Signale gleichzeitig.

Die Teilnehmer können selbst entscheiden welche Art von Kopfhörer Sie benutzen wollen. Ein gut Hörender kann einen Standard Kopfhörer verwenden, ein CI- oder Hörgeräteträger verwendet eine um den Hals getragene Induktionsschleife, womit er den Ton direkt in seinem Hörgerät oder CI-Gerät hört. Auch hier wieder mittels „T“ und „MT“ Programm.

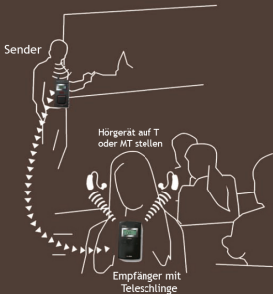

Selbstverständlich können auch mehrere Sender bzw. Empfänger gleichzeitig verwendet werden.

Da die Geräte nicht immer fix angeschafft werden können, bieten wir eine Induktionsanlage oder FM-Anlage auch zur Vermietung an. Wenn eine Tonanlage vorhanden ist, brauchen Sie nur die Induktionsschleife, sollte keine Tonanlage vorhanden sein, dann wird die Induktionsschleife mit Mischpult und Funk-Mikrofonen angeboten. Für jeden Auftrag wird ein individuelles Angebot erstellt. Die Kontaktdaten finden Sie auf der Rückseite.

ihr zubeHÖR

Hörtechnik für's Leben!

Otto-Bauer-Gasse 16
1060 Wien

Herr Manfred Kapfenberger

Tel: 0664 39 38 890

Fax: 01 604 86 32

Mail: office@ihrzubehoer.at

WWW: www.ihrzubehoer.at

